

Látex**Descripción del producto:**

El Dique Dental de látex President Dental comprende finas láminas cuadradas hechas de látex. El Dique Dental de látex President Dental está especialmente diseñado para ser elástico, con una alta tolerancia al desgarro (con una mínima expansión de 10 veces del agujero de perforación original), gran resistencia a la tensión (por encima de 24 MPa) y un buen nivel de módulo (1.0 MPa) que permite una fácil aplicación de las grapas, todos los cuales son cruciales en la aplicación práctica y eficaz de la barrera dental.

Estas hojas son diseñadas para su uso en procedimientos dentales en el aislamiento de dientes específicos para así simplificar la facilidad de los tratamientos y procedimientos dentales.

Descripción del producto:

El Dique Dental de látex President Dental comprende finas láminas cuadradas hechas de látex. El Dique Dental de látex President Dental está especialmente diseñado para ser elástico, con una alta tolerancia al desgarro (con una mínima expansión de 10 veces del agujero de perforación original), gran resistencia a la tensión (por encima de 24 MPa) y un buen nivel de módulo (1.0 MPa) que permite una fácil aplicación de las grapas, todos los cuales son cruciales en la aplicación práctica y eficaz de la barrera dental.

Dique Dental:

- aisla un diente para permitir un campo operatorio seco
- es una barrera efectiva para control de infección
- incrementa la eficiencia operacional
- facilita una mejor gestión del paciente durante los procedimientos dentales

Almacenamiento y Garantía

El Dique Dental de Látex es susceptible al daño y al deterioro por efectos de la temperatura y el tiempo. Por lo tanto, deben ser almacenados lejos de la luz solar y en condiciones por debajo de los 104 grados F o 40 grados centígrados.

El Dique Dental de Látex actúa mejor dentro de su período estipulado de vida útil de 5 años desde la fecha de fabricación. Para una máxima eficacia, deberán ser usados antes de la fecha de caducidad impresa en la caja.

Especificaciones del producto:

Especificaciones de los productos de Diques Dentales: Tamaños de los Diques Dentales por Color:

Látex

152mm x 152mm (6"x6") Verde

152mm x 152mm (6"x6") Azul

152mm x 152mm (6"x6") Negro

Cómo usar el Dique Dental

1. Identificar la posición correcta del agujero. Usted puede utilizar la plantilla de la ubicación del orificio del Dique Dental President Dental y perforar a continuación un agujero de aproximadamente 2 mm de diámetro. Asegúrese de que el tamaño de la perforadora corresponde con el diente en el que se trabaja.
2. Agrande el agujero y asegúrelo con una grapa de metal usando fórceps.
3. Coloque un Dique Dental y la grapa en el diente afectado.
4. Use un porta dique (armazón del dique) afuera de la boca para controlar el exceso del material del Dique Dental.
5. Desechar cada pieza del Dique Dental después de su uso.
6. Utilice una nueva pieza de Dique Dental para cada diente en que se trabaja.

Precaución: Este producto contiene goma de látex natural la cual puede ocasionar reacciones alérgicas

Ürün Açıklaması**Yeşil & Mavi**

Yeşil ve Mavi Dental Damlar, diş tedavisi ve işlemlerinin kolaylığını kolaylaştırmak amacıyla belirli dişleri izole etmek için diş işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Dental Dam, lateks malzemeden yapılmış ince kare tabakalardan oluşur. Özel olarak tasarlanan Dental Dam, yüksek yırtılma toleransı (orijinal delme deliğinden en az 10 kat genişleme) ile yüksek gerilme dayanımı (24MPa üstü) ve kelepçenin kolay sabitlenebilmesi için iyi bir modül seviyesi (1.0 MPa), Bunların tümü, dental barajın pratik ve verimli uygulamasında çok önemlidir.

Siyah

Siyah Dental Dam, radyografi sırasında en uygun fotografik sonuçlar için formüle edilmiş ve tasarlanmıştır. Açık ve ayırt edici bir şekle sahip olması, diş hekimlerinin prosedürler sırasında doğru karar vermeleri için çok önemlidir.

Dental Dam:

- Kuru bir çalışma alanı sağlamak için dişleri izole eder
- Enfeksiyon kontrolü için etkili bir bariyerdir
- Operasyonel verimliliği artırır
- Prosedürler sırasında hasta yönetimini kolaylaştırır

Depolama ve garanti

Dental Dam, sıcaklık ve zamanın zararlı ve yıprandırıcı etkilerine maruz kalır. Güneş ışığından uzakta ve 40°C (104°F) altındaki koşullarda saklanmalıdır. Dental Dam üretim tarihinden itibaren 5 yıl öngörülen raf ömrü içerisinde kullanılmalıdır. Maksimum performans için, kutuda yazılı son kullanma tarihinden önce kullanılmalıdır.

Dental Dam Ölçü ve Renkleri:

152mm x 152mm (6 "x 6") Siyah

152mm x 152mm (6 "x 6") Yeşil

152mm x 152mm (6 "x 6") Mavi

Dental Dam Nasıl Kullanılır?

1. Delmek için doğru yeri belirleyin. Bunun için Dental Dam için konum şablonunu kullanabilir ve yaklaşık 2 mm çapında bir delik açabilirsiniz. Delginin boyutunun üzerinde çalışılacak dişe karşılık geldiğinden emin olun.
2. Deliği büyütün ve bir clamp pensi kullanarak metal bir clamp ile sabitleyin.
3. Dental Dam'ı ve kelepçeyi diş üzerine yerleştirin.
4. Fazla Dental materyalini tutmak için ağızın dış tarafında bir dental dam frame kullanın.
5. Kullandıktan sonra her bir Dental Dam parçasını atın.
6. Çalıştığınız her diş için yeni bir Dental Dam kullanın.

Dikkat: Bu ürün alerjik reaksiyonlara neden olabilecek doğal kauçuk lateks içerir.



PRESIDENT DENTAL GMBH

Kesselbodenstrasse 5, 85391 Allershausen, Germany
Tel: +49 8166 389 9 820 • Fax: +49 8166 389 9 821
www.presidentdental.com • info@presidentdental.com

