



Kalzinol

POLİMER TAKVİYELİ HIZLI SERTLEŞEN DENTİN RENGİNDE ÇİNKO OKSİT ÖJENOL SİMANI

Kalzinol ISO 3107-1988, Type III, Class 1 şartlarına uygundur.

ENDİKASYONLARI

- Dolgu maddelerinin altında kaide olarak.
- Yatıştırıcı geçici dolgu olarak.
- İlaç uygulamalarında geçici yalıtım olarak.
- İndirekt pulpa kuafajında.

DOZ VE ÇALIŞMA

Doz

Tüm uygulamalar için tavsiye edilen toz-sıvı oranı 5:1'dir (ağırlıkça¹)

Karıştırma

Uygun miktarda toz ve sıvıyı temiz bir karıştırma camı üzerine koyun². Küçük miktarlarda gerektiği kadar toz ilave ederek, her ilaveden sonra iyice karışmasına dikkat edin. Pat kıvamında bir karışım elde edinceye kadar toz eklemeye devam edin.

Karıştırma süresi

1 – ½ dakika.

Çalışma süresi

Karıştırmanın tamamlanmasından itibaren 2 dakika.²
Çalışma ve sertleşme süresi sıcakta azalır, soğukta artar.

Sertleşme süresi

ISO 3107 standardına göre 37°C'de ölçülen sertleşme süresi 3 dak. 30 san. İle 4 dak. 30 san. Arasında değişir.

Yerleştirme

Siman, kurutulmuş kaviteye yerleştirilir ve hafifçe bastırarak yerine oturtulur. Simanın kaviteye yerleştirme sırasında alete yapışmaması için aletin ucunu karıştırma peti üzerinde kalan toza batırılır.

Bitirme

Ağıza yerleştirdikten yaklaşık 3 dakika içinde sertleştikten sonra, siman düzeltilebilir ve bitirilebilir. Kaide maddesi olarak kullanıldığında, dolgu maddesi yerleştirilmeden önce, kavite kenarları temizlenmelidir.

DENTAL MALZEMELERLE OLUMSUZ ETKİLEŞİM:

Çinko oksit öjenol simanını kompozit restorasyonların altında kaide dolgusu olarak kullanmayın. Aksi takdirde, bu kaide dolgusunun üzerine oturtulan kompozit malzeme yumuşayabilir.

KONTRENDİKASYONLARI VE YAN ETKİLERİ:

Herhangi bir kontrendikasyonları ve yan etkisi bildirilmemiştir.

¹ ISO 3107'ye göre yapılan testlerde önerilen toz/sıvı oranı 5.5 g/ml : 1 ml sıvıdır.

² 23°C oda ısısında ve %50 relatif nem ortamında

ÖZEL NOTLAR:

Bu ürün yalnızca diş hekimliğinde kullanılmak üzere formüle edilmiştir. Gözlerle temas etmemesine dikkat edilmelidir. Gözle temas ettiği takdirde derhal bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır. Kullandıktan sonra kapağı sıkıca kapatılmalıdır.

Saklama

Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

Üretim Numarası Ve Son Kullanma Tarihi

Son kullanma tarihinden sonra kullanılmamalıdır.

Üretim numarası ürünün tanımlanmasını gerektiren tüm yazışmalarda belirtilmelidir.

Herhangi bir sorunuz olduğunda başvurulacak adresler:

(Üretici)

DENTSPLY DeTrey GmbH
De-Trey-Strasse. 1
D-78467 Konstanz
Tel: (07531) 583-0

DENTSPLY Limited
Hamm Moor Lane
Addlestone
UK-Weybridge, Surrey KT15 2SE
Tel: (01932) 853422