

MAJOR – ALGINKID – KULLANIM KILAVUZU

Ortodontik Aljinat ölçü maddesi


- ISO 1563 / ADA 18 Hızlı donma süreli
- Donma süresi: 1'50" (23° C'de)
- Tozsuz materyal
- Mükemmel bio uyumluluk
- Kurşun ve Kadmiyum içermez
- Hızlı donma
- Kolay Karıştırılır
- Doğru muhafaza edildiğinde 5 gün bekleme süresi

25 Komple ölçü alınır 453 g / 1 lb
Ürün Kodu: A3000

Diş hekimliğinde kullanılır / Refil Poşet

Kullanım Şekli:

Paketi sallayarak karışmasını sağlayınız.

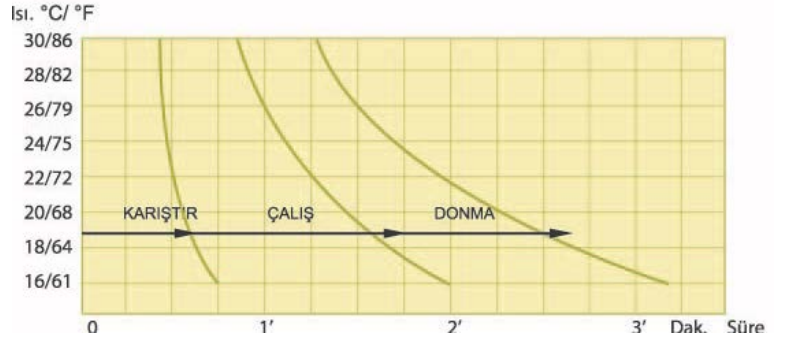

Dozaj: Tam bir ölçü için 2 toz ölçüğüne(19g) 2 su ölçüğü (40ml). Spatül kullanarak iyice karıştırınız.

Karıştırma Süresi: 30" saniye

Tepsi üzerine hızlı bir şekilde koyunuz.

Ağıza tespiti yerleştiriniz

Çalışma Süresi: 1' Dakika 10" saniye (karıştırma süresi başladıktan sonra)

Donma Süresi: 1' Dakika 50" saniye (karıştırma süresi başladıktan sonra)

Verilmiş olan bilgiler 23°C derecelik oda ve su ısında uygulanması gereken sürelerdir. Isı veya su sertlik değerlerindeki değişiklikler çalışma ve donma sürelerini direkt etkileyecektir. (Isı Süre Diagramına bakınız).

Ölçülerin doğru olması açısından alınan ölçüden tükürük ve diğer yabancı sıvılar derhal alınmalı ve uygulanmalıdır.

Ölçü hemen kullanılmayacak ise su kaybını önlemek için ölçüyü nemli odada bekletiniz, su içerisine koymayınız. Ürünü kapalı poşetler içerisinde ve kuru serin odada bekletiniz. Kullanırken poşeti daima kapalı tutunuz.

Karşılaştırılabilir markalar:

Tip: 3 (KERR Hydracal)

Tip: 4 (WHIP MIX Prima Rock)

DİKKAT

- Aljinat tozunu tenefüs etmeyiniz.
- Havalandırılma olan odalarda kullanınız.
- Uygulama esnasında maske kullanımı önerilir.