

## MAJOR – ALGINMAX – KULLANIM KILAVUZU

### Aljinat ölçü maddesi


- ISO 1563 / ADA 18 Hızlı donma süreli
- Donma süresi: 2'00" (23° C'de)
- Dört farklı renk değiştirme süreci
- Tozsuz materyal
- Mükemmel bio uyumluluk
- Kurşun ve Kadmiyum içermez
- Hızlı donma
- Kolay Karıştırılır
- Doğru muhafaza edildiğinde 5 gün bekleme süresi

25 Komple ölçü alınır 453 g / 1 lb  
Ürün Kodu: A2000

Diş hekimliğinde kullanılır / Refil Poşet

### Kullanım Şekli:

Paketi sallayarak karışmasını sağlayınız.

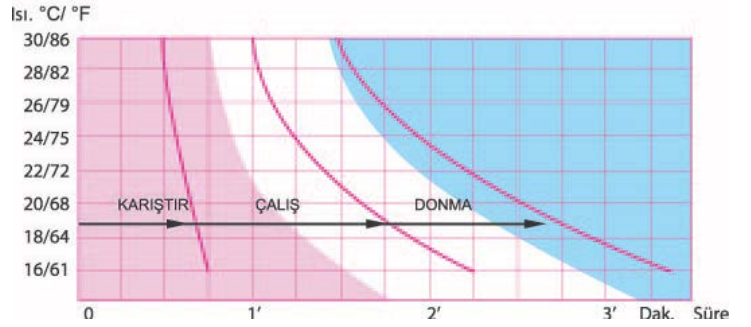

**Dozaj:** Tam bir ölçü için 2 toz ölçeğine (19g) 2 su ölçeği (40ml). Spatül kullanarak iyice karıştırınız.

**Karıştırma Süresi:** 35 saniye (Kromatik safhanın parlak mor renkli kısmı)

Tepsi üzerine hızlı bir şekilde koyunuz.

Ağza tepsiyi yerleştiriniz

**Çalışma Süresi:** 1' Dakika 20" saniye karıştırma süresi başladıktan sonra (Kromatik safhanın beyaz renkli kısmı)

**Donma Süresi:** 2'Dakika 00" saniye karıştırma süresi başladıktan sonra (Kromatik safhanın mat gökyüzü mavisi renkli kısmı).

Verilmiş olan bilgiler 23°C derecelik oda ve su ısında uygulanması gereken sürelerdir. Isı veya su sertlik değerlerindeki değişiklikler çalışma ve donma sürelerini direkt etkileyecektir. (Isı Süre Diagramına bakınız)

Ölçülerin doğru olması açısından alınan ölçüden tükürük ve diğer yabancı sıvılar derhal alınmalı ve uygulanmalıdır.

Ölçü hemen kullanılmayacak ise su kaybını önlemek için ölçüyü nemli odada bekletiniz, su içerisine koymayınız. Ürünü kapalı poşetler içerisinde ve kuru serin odada bekletiniz. Kullanırken poşeti daima kapalı tutunuz.

Karşılaştırılabilir markalar:

Tip: 3 (KERR Hydracal)

Tip: 4 (WHIP MIX Prima Rock)

### DİKKAT

- Aljinat tozunu teneffüs etmeyiniz.
- Havalandırılma olan odalarda kullanınız.
- Uygulama esnasında maske kullanımı önerilir.