


CLESTA II

Dental Treatment Centre

Dental Ünit

KULLANIM KILAVUZU

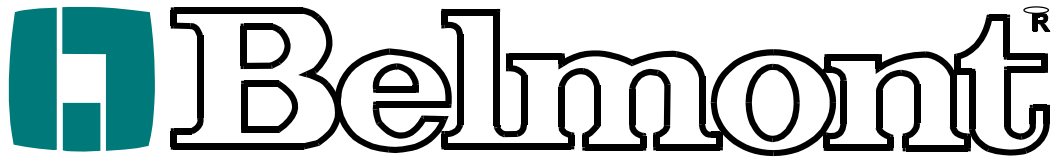

İÇİNDEKİLER

1. Genel görünüm ve ana parçalar
2. Ölçüler ve özellikler
 - 2-1. Ölçüler
 - 2-2. Özellikler
3. Kullanım Talimatları
 - 3-1. Doktor tablası bölümü
 - 3-2. Greşuar üniti bölümü
 - 3-3. Ayak pedalı bölümü

1. GENEL GÖRÜNÜM VE ANA PARÇALAR

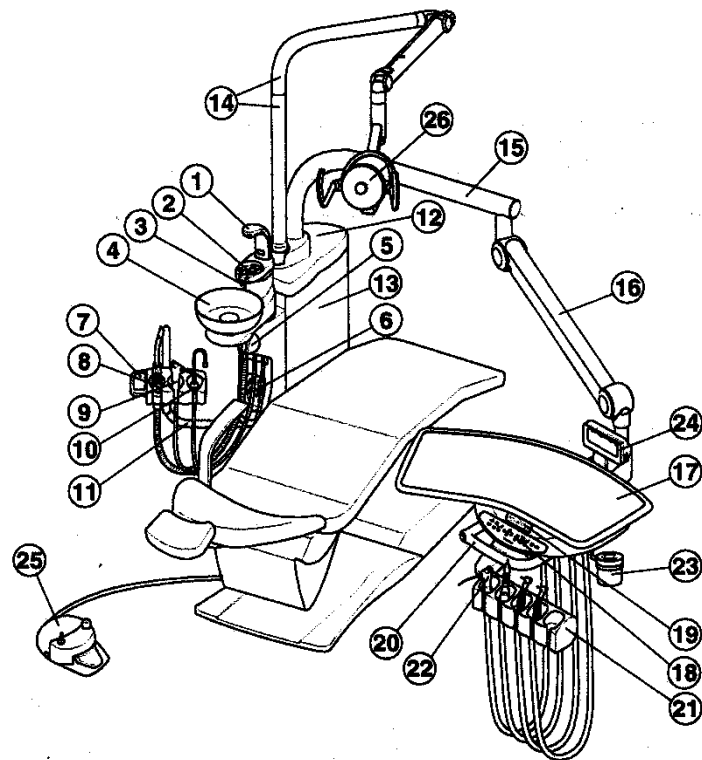


Fig.1-1-1

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Bardak doldurucu ağız | 14. Reflektör borusu |
| 2. Bardak doldurucu altı | 15. İlk kol (yatay kol) |
| 3. Çanak yıkama ağız | 16. Denge kolu |
| 4. Greşuar çanağı | 17. Enstrüman tablası |
| 5. Katı toplayıcı | 18. Ana kontrol paneli |
| 6. Greşuar üniti kontrol paneli | 19. Doktor tablası göstergesi |
| 7. Asistan başlık tutucusu (zarlı sviçler) | 20. Tabla kulpu |
| 8. Cerrahi aspiratör | 21. Doktor tablası başlık tutucusu |
| 9. Asistan hava/su şırıngası | 22. Doktor hava şırıngası |
| 10. Tükürük emici | 23. Atık kabı |
| 11. Asistan kısmı tutucu kolu | 24. Negateskop |
| 12. Greşuar üstü | 25. Ayak pedalı |
| 13. Greşuar gövdesi | 26. Reflektör |

2. Ölçüler ve özellikler

2-1. Ölçüler

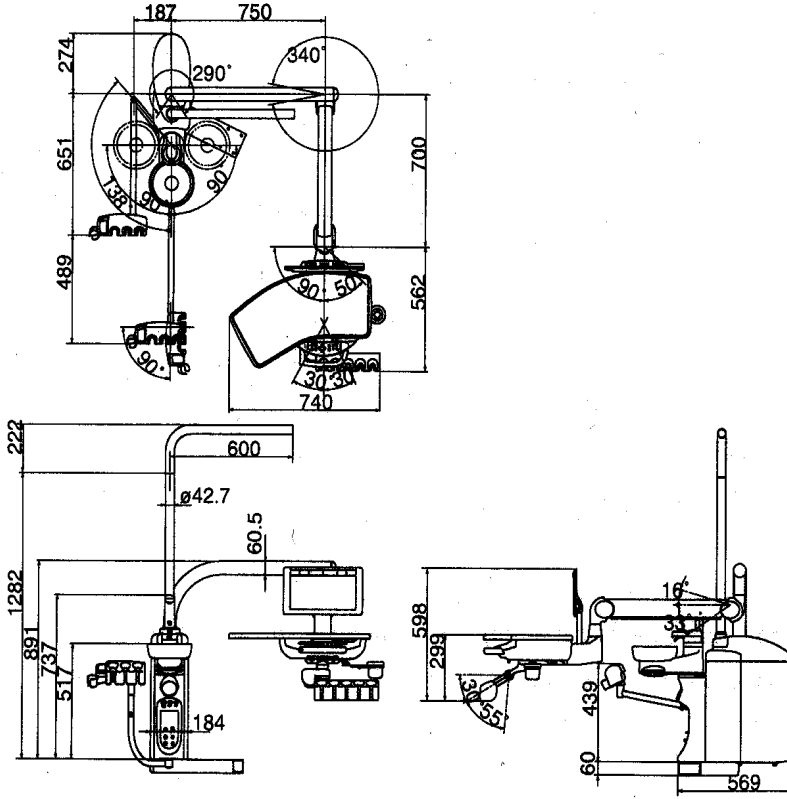


Fig.2-1 Dimensions

Doktor Kısmı Enstrümanlar

2 x Yüksek hızlı Türbin boruları
1 x Düşük hızlı mikromotor boruları
1 x 3 yollu şırınga

Asistan Kısmı Enstrümanlar

Tükürük emici (merkezi vakum tip)
Cerrahi aspiratör (merkezi vakum tip)
1 x 3 yollu şırınga

Çanak Yıkama

Timer modu ve sürekli mod

Bardak Doldurucu Timer

Timer

Net Ağırlık

94.6 kg. (reflektör hariç)

3. KULLANIM TALİMATLARI

3-1. Doktor Tablası Bölümü

Günün sonunda veya uzun süreli kullanılmama durumunda master sviçi kapatın

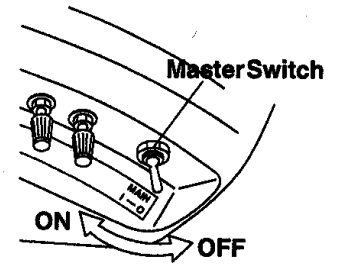


Fig. 3-1 Master Sviç

(1) Master sviç (Fig. 3-1 & Fig. 3-2)

Doktor tablasının sağ alt kısmında olan master sviçi açın, ana kontrol panelindeki gösterge yeşil yanar.

(2) Ana Kontrol Paneli

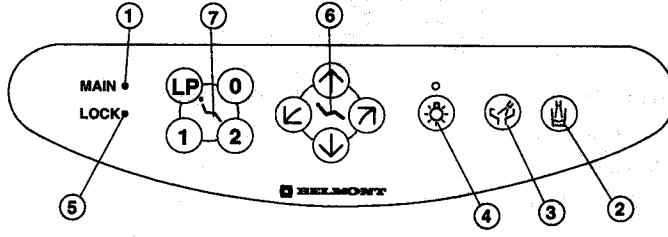


Fig.3-2 Main Control Panel

- (1) Güç göstergesi
- (2) Bardak doldurucu sviçi
- (3) Çanak yıkama sviçi
- (4) Başlık ışığı sviçi
- (5) Güvenlik kilidi göstergesi
- (6) Koltuk manuel kontrol sviçleri
- (7) Koltuk otomatik mod sviçleri

A. Bardak Doldurma Sviçi

Bardak doldurma sviğine basın () bardak doldurucu ağzından yaklaşık 4 saniye su gelir ve otomatik olarak durur. Aynı anda çanak yıkayıcıdan da su gelir ve 6 saniye kadar çalışır durur.

Bardak doldurucu çalışırken bardak doldurma sviğine tekrar basılırsa bardak doldurma işlemi iptal olur.

Bardak doldurucu çalışırken çanak yıkama da 6 saniye kadar senkronize olarak çalışır ve durur.

Not: Bardak doldurucu su akış şiddeti ayarı greşuarın içindeki bardak doldurucu akış kontrol düğmesinden yapılır. Bkz. 3-2 (2).



Fig. 3.3 Bardak doldurma sviçi

B. Çanak Yıkama Sviçi (Fig. 3-2 & Fig.3-4)

Çanak Yıkama sviğine basın () Çanak Yıkayıcı ağzından yaklaşık 6 saniye su gelir ve otomatik olarak durur.

Çanak Yıkama çalışırken çanak yıkama sviğine tekrar basılırsa Çanak Yıkama işlemi iptal olur.


Not2: Clesta 2 ünite çanak yıkama timer moduna (standart ayar) yada sürekli moda ayarlanabilir. Çanak yıkama su akış şiddeti ayarı greşuarın içindeki çanak yıkama akış kontrol düğmesinden yapılır. Bkz. 3-2 (3).




Fig. 3.4 Çanak yıkama sviçi

C. Başlık Işık Sviçi (opsiyonel) (Fig. 3-2 & Fig.3-5)

Fiber optik başlığı yerinden kaldırın ve

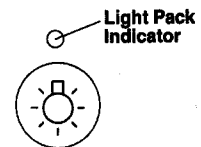

Kontrol Paneli (elektrik motor tipi ana kontrol paneli Fig. 3-6 da gösterilmiştir)

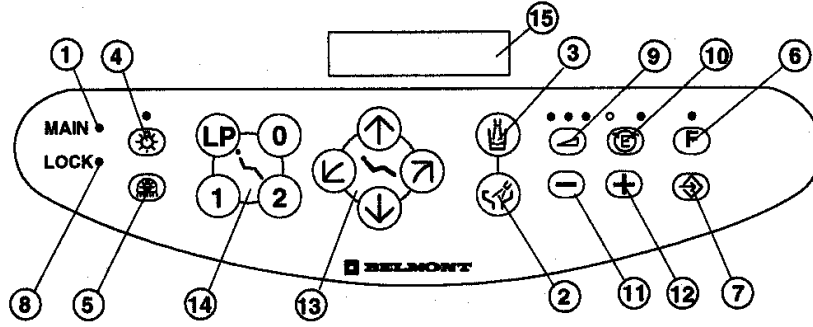

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Güç göstergesi | 9. Mikromotor maksimum hız ayar sviçi |
| 2. Bardak doldurucu sviçi | 10. Mikromotor yön kontrol sviçi |
| 3. Çanak yıkama sviçi | 11. Azaltma sviçi |
| 4. Başlık ışık sviçi | 12. Artırma sviçi |
| 5. Ekstra sviçi (Fonksiyon yok) | 13. Koltuk manuel kontrol sviçleri |
| 6. Fonksiyon sviçi (Fonksiyon yok) | 14. Koltuk otomatik mod seçenekleri |
| 7. Kaydet sviçi (Fonksiyon yok) | 15. Fonksiyon göstergesi |
| 8. Güvenlik Kilidi (lock) göstergesi | |

Fig. 3-6 Elektrik Motor Tipi

D. Elektrikli Mikromotor Yön Kontrol Sviçi (opsiyonel)

(Fig.3-6 & Fig.3-7)

Mikromotoru yuvasından kaldırdıktan sonra, mikromotor dönme yönü (E) sviçine basarak değiştirilebilir. Dönme yönü amber yada yeşil renkli LED ler ile gösterilir.

Yeşil gösterge : İleri yön

Amber gösterge : Ters yön

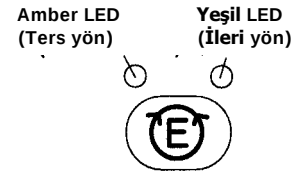


Fig. 3-7 Elektrikli Mikromotor Yön Kontrol Sviçi

Not: Mikromotor çalışırken yönünü değiştirmeyiniz.

E. Mikromotor Maksimum Hız Ayar Sviçi (opsiyonel)

(Fig.3-6 & Fig.3-8)

Mikromotoru yuvasından kaldırdıktan sonra, mikromotor dönme hızı (E) sviçine basarak değiştirilebilir.

3 farklı dönme hız vardır (High: Yüksek, Medium: Orta, ve Low: Düşük) ve (+) ve (-) tuşları ile ayarlanır.

Mikromotor hız ayarları değiştirilebilir ve gösterge ayarlanan hız ekranda gösterilir.

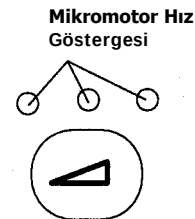


Fig. 3-8 Elektrikli Mikromotor Maksimum Hız Ayar Sviçi

- High: Yüksek (%100 rpm. Mikromotor için)
- Medium: Orta (%50 rpm. Mikromotor için)
- Low: Düşük (%25 rpm. Mikromotor için)

* ● yanan LED

F. Koltuk Manuel Kontrol Sviçleri (Fig.3-2 & Fig.3-9)

- a. Koltuk Kaldırma Koltuk istenen pozisyona kalkana kadar (↑) sviçine basın
- b. Koltuk İndirme Koltuk istenen pozisyona inene kadar (↓) sviçine basın
- c. Sırtlık İndirme Sırtlık istenen pozisyona inene kadar (↙) sviçine basın
- d. Sırtlık Kaldırma Sırtlık istenen pozisyona kalkana kadar (↗) sviçine basın

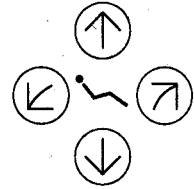


Fig. 3-9 Koltuk Manuel Kontrol Sviçleri

G. Koltuk Otomatik Mod Sviçleri (Fig.3-2 & Fig.3-10)

a. Hafıza İşlemi

- 1 no'lu hafıza sviçine (①) basın, koltuk 1 no'lu hafıza pozisyonuna geçecek ve otomatik olarak duracaktır.
- 2 no'lu hafıza sviçine (②) basın, koltuk 2 no'lu hafıza pozisyonuna geçecek ve otomatik olarak duracaktır.

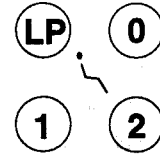


Fig. 3-10 Koltuk Otomatik Mod Sviçleri

Not: Koltuk hareketlerini hafızaya alma işlemi için bakınız Koltuk Kullanım Talimatları.

b. Otomatik Toplanma Pozisyonu

Otomatik Toplanma Pozisyonu sviçine (⓪) basın, koltuk ilk başlangıç pozisyonuna dönecektir. (Koltuk en düşük pozisyonda ve sırtlık dik konumda toplanmış vaziyette)

c. Son Pozisyon

Tedavi sırasında Son Pozisyon Sviçine (LP) basın, sırtlık toplanarak tükürme pozisyonuna geçer ve greşuara yaklaşır ve otomatik olarak durur.

Tekrar (LP) sviçine basın, sırtlık bir önceki pozisyonuna dönecektir.

d. Acil Durdurma (Güvenlik durdurma)

Otomatik hareketler sırasında (0,1,2, LP) herhangi bir kontrol sviçine tekrar basılması durumunda koltuk hemen durur.

d. Güvenlik Kilit Göstergesi

Başlık çalışırken yada greşuar çanağı güvenlik sviçi çalışırken, güvenlik kilit göstergesi kırmızı yanar ve koltuk kontrol sviçleri çalışmaz.

H. Ünit İlave Fonksiyonları

a. Grup Seçim Modu

Grup seçim modu özellikle birden fazla hekimin (4 adete kadar) çalıştığı klinikler için çok kullanışlıdır.

Aşağıdaki fonksiyonlar her kişi için ayrı ayarlanabilir.

Koltuk hafıza programları

Mikromotor hız ayarları

Grupları hafızaya almak için:

1) Fonksiyon sviğine basın, fonksiyon göstergesi grup numarasını gösterecektir.

2) 0, 1, 2, LP tularına basarak grup numarasını seçin.

0; Grup1 / 1; Grup 2 / 2; Grup 3, / LP; Grup 4

b. Flush out sistemi

Clesta II de 2 tip flush out sistemi mevcuttur.

Kısa süreli flush out; başlık su yollarını temizlemek için

Uzun süreli flush out; başlık su yollarını, çanak yıkama su yollarını ve bardak doldurucu su yollarını temizlemek içindir.



1) Kısa süreli Flush out

Fonksiyon sviğine 2 kez kısa basın ve azaltma sviğine basın.

Başlığı yuvasından kaldırın ve greşuar çanağına tutun.

Ayak pedalına kısa basma işlemi kısa süreli flush out işlemi başlatır.

Başlıktan su gelir ve yaklaşık 40 saniye sonra otomatik olarak durur.

Flush out işlemi süresince, herhangi bir sviçe yada ayak pedalına basmak suretiyle işlem iptal edilir.

2) Uzun süreli flush out

Fonksiyon sviğine 2 kez kısa basın ve artırma sviğine basın.

Başlığı yuvasından kaldırın ve greşuar çanağına tutun.

Ayak pedalına kısa basma işlemi uzun süreli flush out işlemi başlatır.

Flush Out işlemi başlar ve bardak doldurucu ve çanak yıkayıcı da sırasıyla yaklaşık 10 dakika kadar çalışıp sonra otomatik olarak durur.

Flush out işlemi süresince, herhangi bir sviçe yada ayak pedalına basmak suretiyle işlem iptal edilir.



c. Kontrol paneli sviç sesi aç/kapa

Kontrol panelinde bir tuşa basmak elektronik bir ses çıkmasına sebep olur.

Bu ses şu şekilde iptal edilebilir.



Fonksiyon sviğine 3 kez kısa basın ve azaltma sviğine basın.

Orijinal ayara dönmek için

Fonksiyon sviğine 3 kez kısa basın ve artırma sviğine basın.

d. Fiber optik başlık ışık modu

Fiber optik başlık takılıysa, başlık yuvadan kaldırılınca fiber optik ışık yanar ve yerine konunca söner.

Bu ayar şu şekilde değiştirilebilir; başlık yuvadan kaldırılınca ve havalı ayak pedalına basılması durumunda açılır.



Fonksiyon sviğine 4 kez kısa basın ve azaltma sviğine basın.

Orijinal ayara dönmek için.

Fonksiyon sviğine 4 kez kısa basın ve artırma sviğine basın.

e. Mikromotor maksimum hız ayarı

Mikromotor maksimum hız ayarı 3 mod'a ayarlıdır (10.000, 20.000, 40.000 rpm.).

Bu ayar aşağıda anlatıldığı gibi 5 mod olarak değiştirilebilir (5.000, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 rpm)



Fig. 3-1-1

f. Bardak doldurucu ve çanak yıkayıcı

Bardak doldurucu ve çanak yıkayıcı beraber çalışmak üzere ayarlıdır. (bardak doldurucu çalıştırıldığında çanak yıkayıcı da otomatik olarak çalışır)

Bunların bağımsız çalışmasını istiyorsanız.



Fig. 3-1-1

Fonksiyon sviğine 6 kez kısa basın ve azaltma sviğine basın.

Orijinal ayara dönmek için.

Fonksiyon sviğine 6 kez kısa basın ve artırma sviğine basın.

(3) Doktor Tablası Kısmı Kontrol düğmeleri

A. Başlık Sprey Su Kontrol Düğmeleri (Fig.3-11)

Başlık Sprey Su Kontrol Düğmeleri doktor tablasının altındadır.

Her bir spre su kontrol düğmesi soldan sağa 1-4 olarak işaretlenmişlerdir; HP1, HP2, HP3, ...

Başlık spre su akış ayarı bağımsız olarak ayarlanabilir.

B. Başlık Sprey Hava Kontrol Düğmesi (Fig.3-11)

Başlık Sprey Su Kontrol Düğmeleri doktor tablasının altındadır.

Her bir spre su kontrol düğmesi soldan sağa 1-4 olarak işaretlenmişlerdir; HP1, HP2, HP3, ...

Başlık spre su akış ayarı bağımsız olarak ayarlanabilir.

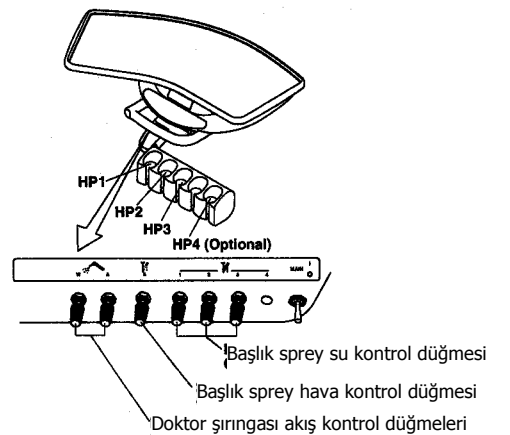


Fig.3-11 Doktor Tablası Bölümü Kontrol Düğmeleri

- C. Doktor Şıngası Akış Kontrol Düğmeleri (Fig.3-11)
Doktor şıngası akış kontrol düğmeleri doktor tablasının altında sağ taraftadır.
Akış kontrol düğmeleri doktor şıngasının hava ve su hacmini ayarlama da kullanılır.
Sarı kapaklı düğme hava akış kontrol düğmesidir, mavi kapaklı düğme ise su akış kontrol düğmesidir.

Not: Düğmeyi saatin ters yönünde döndürmek akış hacmini artırır, Saat yönünde döndürmek ise azaltır. (Fig.3-12)

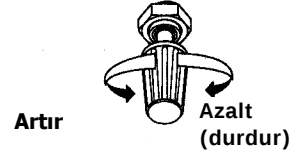


Fig. 3-12 Kontrol Düğmesi

- (4) Başlık Basınç Göstergesi (Fig.3-13)
Başlık hava basınç göstergesi doktor tablasının arka kısmındadır.
Bir başlık çalışırken, başlık hava basıncı göstergeden okunabilir.

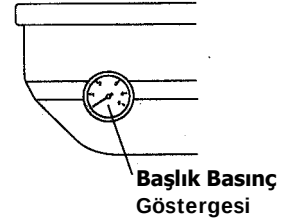


Fig. 3-13 Başlık Basınç Göstergesi

- (5) Denge Kolu Hava Freni (Fig. 3-14)
Denge kolu hava freni tabla kulpunun üzerindedir.
Master sviçi açıkken, balans kolu kilitlidir.
Kulpu tutun ve hava freni düğmesine basıp tabla Yüksekliğini ayarlayın.
Hava fren butonunu istenen pozisyona gelince bırakın
Denge kolu kilitlenir.

Not: Tablanın üzerine 1.5 kg. dan fazla yük koymayınız.

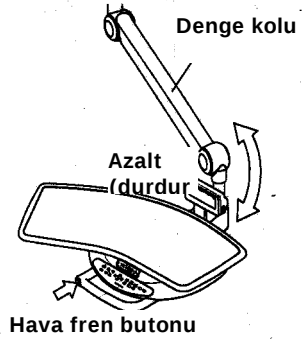


Fig. 3-14 Denge Kolu Hava Freni

- (6) Dental Hacimde Negateskop (Fig.3-15)
Negateskop ON/OFF sviçi negateskopun sağ tarafındadır.
Sviçe basın, negateskop açılır.
Tekrar basın, negateskop kapanır.

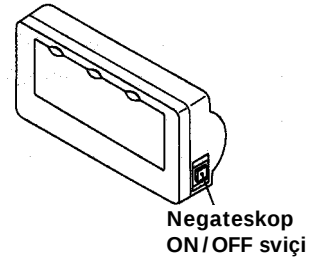


Fig. 3-15 Dental Hacimde Negateskop

- (7) Dental Hacimde Negateskop (Fig.3-16)
Negateskop ON/OFF sviçi ve dimmeri (ışık şiddet ayarı) negateskopun sağ tarafındadır.
Negateskop parlaklığı dimmer kontrol düğmesi ile ayarlanır.

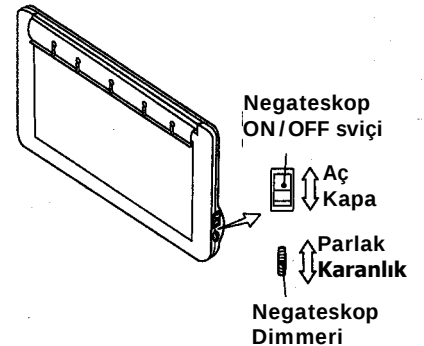


Fig. 3-16 Panorama Hacimli Negateskop

3-2.GREŞUAR ÜNİT BÖLÜMÜ

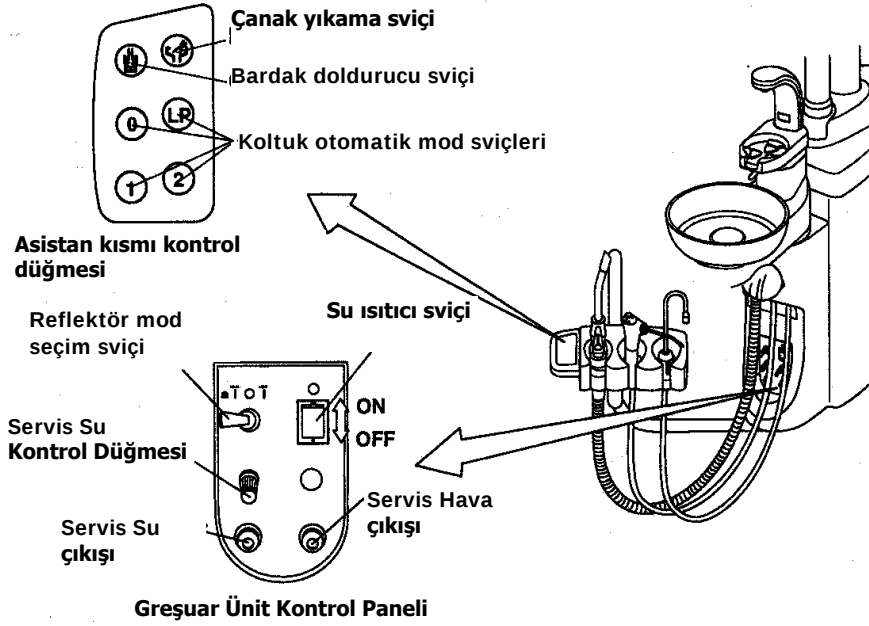


Fig. 3-17 Asistan Kısmı Kontrol Paneli ve Greşuar Ünit Kontrol Paneli

- (1) Asistan Kısmı Kontrol Paneli (Fig.3-17)
Bardak doldurucu sviçi, çanak yıkama sviçi ve koltuk otomatik mod sviçleri asistan kısmı kontrol panelindedir. bkz. 3-1. (2) A,B.
- (2) Greşuar Ünit Kontrol Paneli (Fig.3-17)
 - A. Reflektör
IO 5000 Reflektör
Reflektör reflektör kafasındaki dokunmasız sensörlü sviç ile açılıp kapatılabilir yada manuel olarak greşuar üniti kontrol panelinden çağılıp kapatılabilir.
Dokunmasız sensörlü sviç ile çalıştırmak içinSensör sviç kolunu sol tarafa (sensor tarafı) alın
Manuel olarak kontrol etmek içinSensör sviç kolunu sağ tarafa (manual tarafı) alın
Sensör sviç kolunu ortada OFF konumuna geçer.
 - B. Su Isıtıcı Sviç (Fig.3-17)
Su ısıtıcı sviç greşuar üniti kontrol panelindedir.
Su ısıtıcı sviçini açın, Su ısıtıcı göstergesi yeşil yanar ve bardak doldurucu suyu ısıtılır.
 - C. Servis Su Çıkışı (Fig. 3-17)
Servis su çıkışı kolay su bağlantısı sağlar.
 - D. Servis Su Çıkış Kontrol Düğmesi (Fig.3-18)
Servis su çıkışındaki su hacmi servis su çıkış kontrol düğmesi ile ayarlanır.
Düğmeyi saatin ters yönünde döndürmek su miktarını artırır ve saat yönünde döndürmek azaltır.
 - E. Servis Hava Çıkışı (Opsiyonel) (Fig. 3-18)
Servis hava çıkışı kolay hava bağlantısı sağlar.

(3) Greşuar Ünit Gövdesi

- A. Asistan Şırınga Akış Kontrol Düğmeleri (Fig.3-18)
Asistan şırınga akış kontrol düğmeleri greşuar ünit gövdesi içindedir.
- B. Bardak Doldurucu Akış Kontrol Düğmesi (Fig.3-18)
Bardak doldurucu akış hacmi bardak doldurucu akış kontrol düğmesi ile kontrol edilir. (Sıkıştırılmalı sübap sistemi)

Somunu gevşetin ve bardak doldurma akış hacmini düğmeyi döndürerek ayarlayın. (Sıkıştırılmalı sübap sistemi)
Ayar yaptıktan sonra somun kilidini tekrar sıkın.

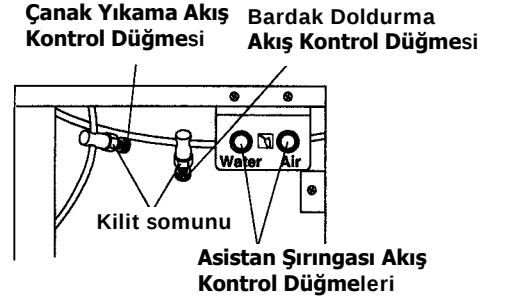


Fig. 3-18 Greşuar Ünit içindeki Akış Kontrol Düğmeleri

- C. Çanak Yıkama Kontrol Düğmesi (Fig. 3-18)
Çanak yıkama akış miktarı çanak yıkama akış kontrol düğmesi ile kontrol edilebilir. (Sıkıştırılmalı sübap sistemi) Somunu gevşetin ve çanak yıkama akış hacmini düğmeyi döndürerek ayarlayın.
Ayar yaptıktan sonra somun kilidini tekrar sıkın.

Not: Düğmeyi saatin ters yönünde döndürmek akış hacmini artırır ve saat yönünde döndürmek azaltır.

- (4) Asistan Enstrüman Tutucu (Fig.3-19)
Bir enstrümanı yerinden yuvasında kaldırıncı (Cerrahi Aspiratör ve Tükürük Emici) otomatik olarak çalışır, Yerine konunca da durur.
Tükürük emici başlık ve cerrahi aspiratör'de kapatmak ve sakşın Gücünü ayarlamak için durdurma valfi vardır.

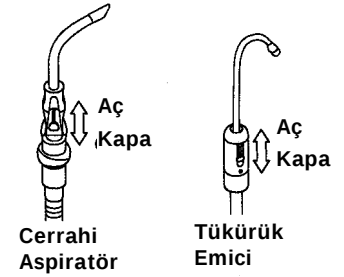


Fig. 3-19 Cerrahi Aspiratör ve Tükürük Emici

- (5) Sensörlü Bardak doldurucu (opsiyonel) (Fig.3-2 & Fig.3-20)
Bardağı (kağıt bardak) bardak doldurucunun altına yerleştirin, su otomatik olarak bardak doldurucu ağızdan gelecek, bardak dolunca da otomatik duracaktır. Bardak doldurucu çalışmaya başladığında, çanak yıkama da aynı anda yaklaşık 6 saniye kadar çalışmaya başlar ve durur. Bardak doldurulurken, bardak doldurma siviğine basılırsa Bardak doldurma işlemi iptal edilir. Çanak yıkama işlemi sırasında da aynı şekilde çanak yıkama siviğine basılırsa çanak yıkama işlemi iptal edilir.

Not: sadece dispozibil kağıt bardaklar kullanın.
Sadece boş bardak kullanın, bir miktar su olması durumunda Bardakta taşma olur.
Sensörlü bardak doldurucunun bardak doldurmalar arası 2 saniyeden biraz fazla zamana ihtiyacı vardır.

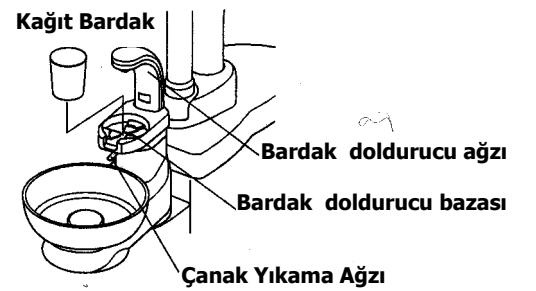


Fig. 3-20 Sensörlü bardak doldurucu

(6) Greşuar Çanağı (opsiyonel) (Fig.3-2 & Fig.3-21)

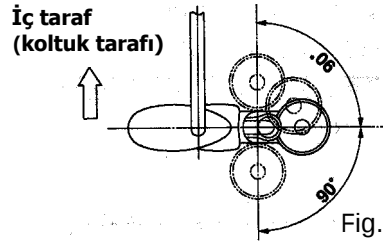


Fig. 3-21 Greşuar Çanağının Dönüşü

3-3. AYAK PEDAL BÖLÜMÜ

(1) Standart Tip Ayak Pedalı (Tip A2) (Fig. 3-22)

A. Havalı pedal

Yuvasından bir başlığı kaldırın ve hava pedalına basın başlık çalışmaya başlar.

B. Su Soğutma Sviçi

Su soğutma sviçi başlık soğutma suyunu açar, Kapatır.

C. Chip Blower Butonu

Chip blower pedalına basarak, frez döndürme İşlemi olmadan başlığa chip hava verilir.

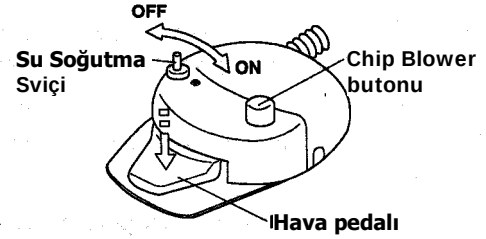


Fig. 3-22 Standart Tip Ayak Pedalı
Tip A2

(2) Elektrik Motorlu Ayak Pedalı (Tip ST) (opsiyonel) (Fig.3-23)

A. Havalı Pedal

Yuvasından bir başlığı kaldırın ve hava pedalına basın başlık çalışmaya başlar.

B. Su Soğutma Sviçi

Su soğutma sviçi başlık soğutma suyunu açar-kapatır.

C. Chip Blower Pedal

Chip blower pedalına basarak, frez döndürme İşlemi olmadan başlığa chip hava verilir.

D. Elektrik Motoru Dönme Kontrol (opsiyonel)

Mikromotoru yuvasından kaldırın, hava pedalına aşağı doğru bastırırken aynı zamanda yatayda sağa doğru kaydırın, bu durumda mikromotor çalışmaya başlayacaktır.

Dönme hızını artırmak için daha fazla sağa doğru kaydırmanız gerekir.

Ayak pedalı ile yapılan hız kontrolü mikromotorun ayarlanan hız limitleri dahilinde olacaktır.

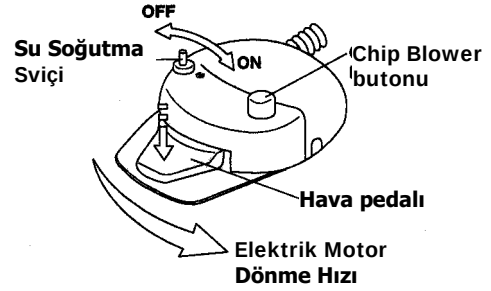


Fig. 3-22 Elektrik Motor Tip Ayak
Pedalı (Tip ST)

(3) Güvenlik Kilidi Aleti (Fig.3-2)

Başlık çalışırken, tüm koltuk hareketleri güvenlik için kilitlenir.

Bu durum ana kontrol panelindeki güvenlik kilidi göstergesinde belirtilir.

4. BAKIM VE KORUMA



DİKKAT

Günün sonunda ve uzun süreli kullanmama durumunda Master sviçi kapatınız.
Günün sonunda ve uzun süreli kullanmama durumunda ana su vanasını kapatınız.

Ünitenin Temizliği



DİKKAT

Tüm yüzeyler DURR FD312 temizleyici ile (yada muadili) temizlenebilir.
Koltuk ve ünite ıslatmayınız.
Temizleme sonrası tüm yüzeyleri kurulayınız

(1) Greşuar çanağı (Fig. 4-1)

Greşuar çanağının ortasındaki atık kapağını, süzgeç sepetini çıkartın ve temizleyin.

Bardak doldurucu zeminini çıkartın ve greşuar çanağını çekip çıkartın ve temizleyin.

Temizleme sonrası, greşuar çanağını sıkıca yerine tutturun.



DİKKAT

Greşuar çanağını çıkartmadan önce master sviçi kapatınız.

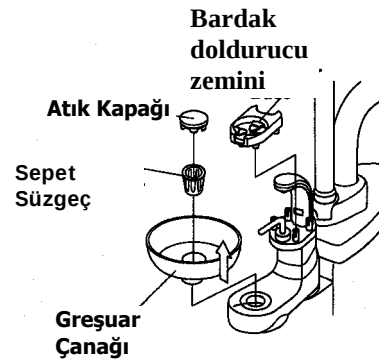


Fig. 4-1 Greşuar Çanağı, Atık Kapağı ve Süzgeç Sepeti

(2) Katı Toplayıcı (Fig.4-2)

Katı toplayıcı filtreyi çıkartıp temizleyin.

Temizleme sonrası, filtreyi tekrar aynı yere takın.

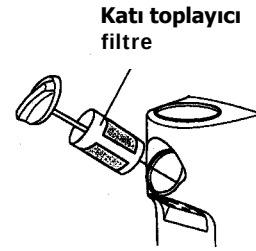


Fig. 4-2 Katı Toplayıcı Filtre

(3) Cerrahi Aspiratör ve Tükürük Emici (Fig.4-3 & Fig. 4-4)

A. Cerrahi aspiratörü aspiratör hortumundan çıkartın ve temizleyin.

Aspiratör (vakum) hortum somununu gevşetin, böylece aspiratör hortumu greşuar ünitinden çıkartılabilir.

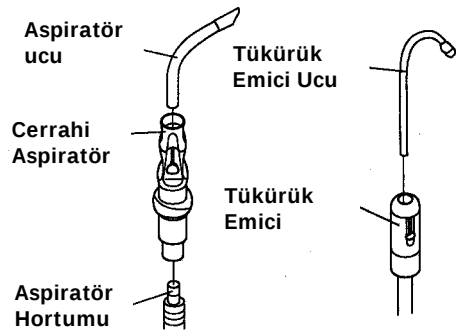


Fig. 4-3 Cerrahi Aspiratör ve Tükürük Emici

- B. Aspiratör hortumu ve tükürük emici hortumu greşuar ünitinden çıkartılabilir.
Hortum bağlantısını 90 derece saatin ters yönünde döndürün, böylece hortum greşuar ünitinden ayrılabilir.
Hortum bağlantısını tekrar sokun ve 90 Derece döndürüp tekrar bağlayın.

Not: başlıkları temizledikten sonra, lastik O-Ring'lere hafifçe beyaz vazelin sürün.

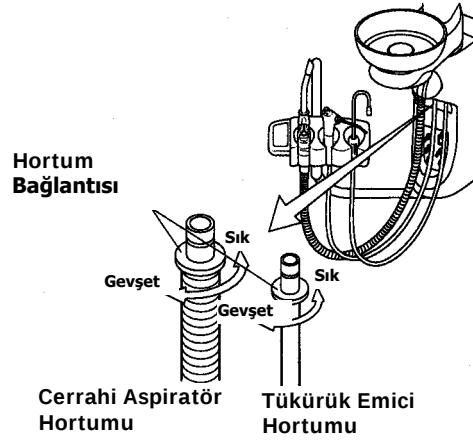


Fig. 4-4 Cerrahi Aspiratör ve Tükürük Emici Hortumu

(4) Dezenfeksiyon

- A. Aspiratör ucu, tükürük emici ucu ve şırınga ucu otoklavlanabilir.
B. Tüm boru ve hortumlar düşük oranlı etil alkol ile temizlenebilir.

(5) Hava Filtresi Atık Vanası (Fig. 4-5)

Hava filtresi atık vanası bakım kapağının altındadır.
Haftada bir kez atık vanasını açın ve sistemdeki suyu boşaltın.

(6) Ana Su Vanası (Fig.4-5)

Ana su vanası bakım kapağının altındadır.
Günün sonunda ve uzun süreli kullanmama durumunda ana su vanasını kapatınız.

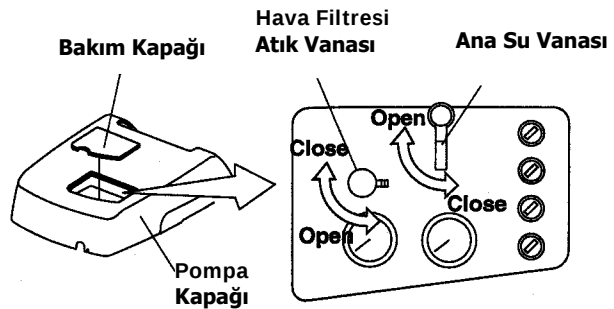


Fig. 4-5 Hava Filtresi Atık Vanası ve Ana Su Vanası