



ÖZELLİKLER


Model	FX15	FX15m	FX23	FX23m	FX25	FX25m	FX75	FX75m
Maksimum Hız (Motor)	40,000 dk ⁻¹		30,000 dk ⁻¹		40,000 dk ⁻¹		20,000 dk ⁻¹	
Maksimum Hız (Anguldurva)	10,000 dk ⁻¹		30,000 dk ⁻¹		40,000 dk ⁻¹		1,250 dk ⁻¹	
Dişli	4:1 düşürücü		1:1 direk		1:1 direk		16:1 düşürücü	
Frez Tipi	ISO 1797-1 Type1 ø2.35mm anguldurva frezi						ISO 1797-1 Type1 ø2.35mm kanal eğesi	
Tutucu Uzunluğu	11.5mm						9.4mm	
Max. Frez uzunluğu	22.5mm						21.0mm	
Max. Çalışma uzunluğu	ø4.0mm						ø1.45mm	
Eğme Hareketi	-						360° rotasyon	
Kullanım ortamı	derece	: 0-40°C				Atmosfer Basıncı	700-1,060hPa	
Nakliye ve Stok ortamı	derece	: -10-50°C,				Atmosfer Basıncı	: 500-1,060hPa	
Termodezenfeksiyon	-	○	-	○	-	○	-	○

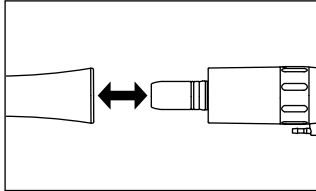


1

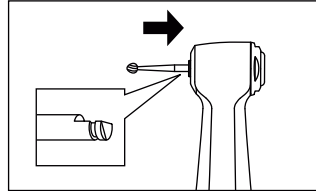


2

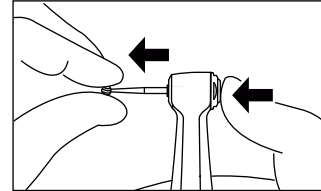


3

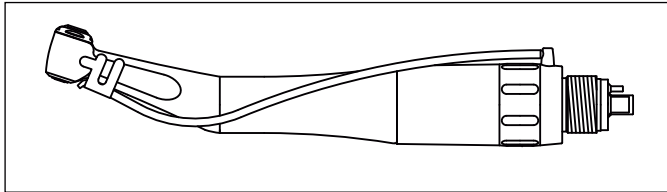


4

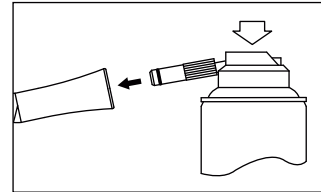


5

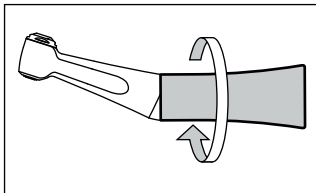


6

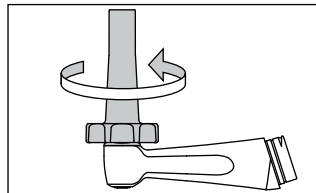

7

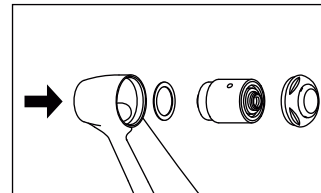

8

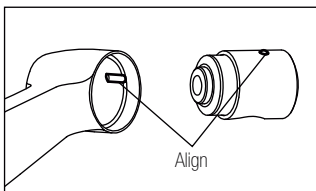

9

1. Kullanıcı ve Kullanım Alanı

Kullanıcı: Profesyonel Hekimler
Kullanım alanı: Dental Uygulamalar

(FX15/FX15m/FX23/FX23m/FX25/FX25m)

Dental Uygulamalar (Endodontik)

2. Kullanım Yöntemi

- Lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
- Riskleri ortadan kaldırmak için altta belirtilen uyarıları dikkate alınız.

3. Ürün Takma ve Çıkarma

3.1: Bağlantı

- Anguldurva ve motora direk takınız. (Fig 1)
- Motora takıldıgından emin olunuz.

3.2: Çıkarma

Motor ve Anguldurva'yı ayrı ayrı tutarak çekiniz.

⚠ UYARI

- Kullanım kılavuzunu tam anlayacak şekilde okuyarak ürün fonksiyonlarını detaylıca inceleyiniz.
- Kullanım esnasında hasta güvenliğini ön planda tutunuz.
- Kullanıcı sorumlulukları uygulama kontrolü bakımındır.
- Başlığı düşürmeyiniz.
- Kullanım esnasında maske kullanınız.
- Push buton özelliğini frezin iyi kilitlemesi için dikkatli kullanınız.
- Başlığın temizliği için yüksek asit içeren sterilizasyon solüsyonları kullanmayınız. Her kullanımdan sonra otoklav yapınız. Düzenli bakımını kontrol ediniz.

4. Yağlama Figür 4 de gösterildiği gibi yağlayın.

5. Kartuş Değiştirme Figür 6-7-8 de gösterildiği şekilde kartuşu değiştiriniz.

SEMBOL



135 derecede otoklavlanma



Termodezenfeksiyon da yıkama



Avrupa standartlarında üretim



Üretim Yeri

GARANTİ

NSK Ürünleri üretim süresinde oluşan arızalar karşılığı garanti kapsamındadır. Ancak kullanıcı kaynaklı sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

OPSİYONEL ÜRÜNLER

Model	Sipariş Kodu	Kullanılan Ürünler
FX Spray Nozzle	C1052702	FX23/FX23m/FX25/FX25m

YEDEK PARÇA

Model	Sipariş Kodu	Kullanılan Ürünler	Tanımlama
FX23-03	C1056700	FX23/FX23m	Kartuş
FX25-03	C1052700	FX25/FX25m	Kartuş
FX Anahtar	C1052701	FX23/FX23m/FX25/FX25m	

ÜRÜN İMHASI

Endüstri cihazlarının imhasında uzman firmalarla irtibata geçerek ürün imhasını sağlayınız.

NAKANISHI INC.

www.nsk-inc.com

700 Shimohinata Kanuma-shi
Tochigi 322-8666,
Japan

NSK Europe GmbH

www.nsk-europe.de

Elly-Beinhorn-Strasse 8
65760 Eschborn,
Germany

NSK France SAS

www.nsk.fr

32 rue de Lisbonne
75008 Paris,
France

NSK Dental Spain SA

www.nsk-spain.es

C/ Modena, 43 El Soho-Európolis
28232 Las Rozas, Madrid,
Spain

NSK United Kingdom Ltd

www.nsk-uk.com

Office 5, Gateway1000,
Arlington Business Park, Whittle Way,
Stevenage, SG1 2FP, UK

NSK America Corp

www.nskdental.com

1800 Global Parkway
Hoffman Estates, IL 60192,
USA

NSK Oceania Pty Ltd

www.nskoceania.com.au

Unit 22, 198-222 Young St.
Waterloo, Sydney,
NSW 2017, Australia

NSK Middle East

www.nsk-inc.com

Room 6EA-701, 7th Floor, East Wing No.6
Dubai Airport Free Zone,
PO Box 54316 Dubai, UAE

NSK Asia Pte Ltd

www.nsk-inc.com

1 Maritime Square,
#09-33 HarbourFront Centre,
Singapore 099253

