

KULLANMA
KILAVUZU

FX 65 / FX 65m

FX65/FX65M

CE 0197 MADE IN JAPAN

OM-C0438E 002

1. Kullanıcı ve Kullanım Alanı

Kullanıcı: Profesyonel Hekimler
Kullanım alanı: Dental Uygulamalar (FX 65)
Dental Uygulamalar (Kesme ve Polisaj)

2. Kullanım Yöntemi

- Lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
- Riskleri ortadan kaldırmak için altta belirtilen uyarıları dikkate alınız.

3. Ürün Takma ve Çıkarma

3.1: Bağlantı

- Piyasemen ve motora direk takınız. (Fig 1)
- Motora takıldığından emin olunuz.

3.2: Çıkarma

Motor ve Anguldurmayı ayrı ayrı tutarak çekiniz.

⚠ UYARI

- Kullanım kılavuzunu tam anlayacak şekilde okuyarak ürün fonksiyonlarını detaylıca inceleyiniz.
- Kullanım esnasında hasta güvenliğini ön planda tutunuz.
- Kullanıcı sorumlulukları uygulama kontrolü bakımındır.
- Başlığı düşürmeyiniz.
- Kullanım esnasında maske kullanınız.
- Push buton özelliğini frezin iyi kilitlenmesi için dikkatli kullanınız.
- Başlığın temizliği için yüksek asit içeren sterilizasyon solüsyonları kullanmayınız. Her kullanımdan sonra otoklav yapınız. Düzenli bakımını kontrol ediniz.

4. Yağlama Figür 4 de gösterildiği gibi yağlayın.

5. Kartuş Değiştirme Figür 6-7-8 de gösterildiği şekilde kartuşu değiştiriniz.

SEMBOL

- 135 derecede otoklavlanma
- Termodezenfeksiyon da yıkama
- Avrupa standartlarında üretim
- Üretim Yeri

GARANTİ

NSK Ürünleri üretim süresinde oluşan arızalar karşılığı garanti kapsamındadır. Ancak kullanıcı kaynaklı sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

OPSİYONEL ÜRÜNLER

Model	Sipariş Kodu	Kullanılan Ürünler
FX Spray Nozzle	H019711	FX 65

ÜRÜN İMHASI


Endüstri cihazlarının imhasında uzman firmalarla irtibata geçerek ürün imhasını sağlayınız.

ÖZELLİKLER

Model	FX 65	FX 65 M
Maksimum Hız (Motor)	40,000 dk ⁻¹	
Maksimum Hız (Piyasemen)	40,000 dk ⁻¹	
Dışlı	1:1 direk	
Frez Tipi	ISO 1797-1 Type1 ø2.35mm piyasemen frezi	
Tutucu Uzunluğu	30 mm	
Max. Frez uzunluğu	44.5 mm	
Max. Çalışma uzunluğu	ø4 mm	
Kullanım ortamı	derece : 0-40°C	Atmosfer Basıncı : 700-1,060hPa
Nakliye ve Stok ortamı	derece : -10-50°C,	Atmosfer Basıncı : 500-1,060hPa
Termodezenfeksiyon	—	○


FREZ TAKILMASI

figür 1

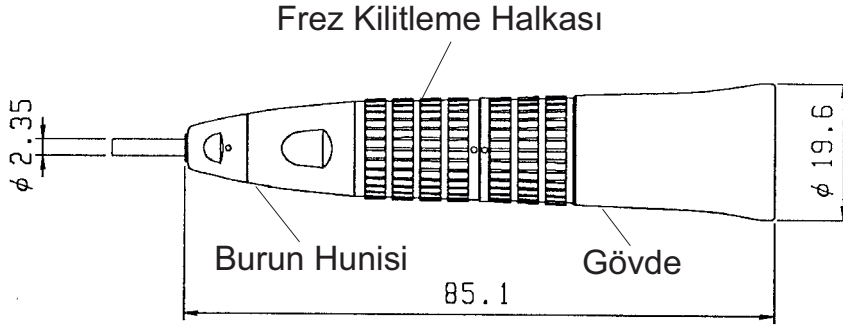


İzin verilen en yüksek hız ... 40,000dak-1(rpm)
Frez ... ø2.35 Başlık Frezi

- (1) Frezi çıkarmak için, frez kilitleme mandalını aşağıda siyah ok ile gösterilen yön istikametinde klik seni çıkana kadar çeviriniz. (Fig.2)
Frez takmak için, frez tutucusu yuvasının sonuna kadar itiniz ve aşağıdaki beyaz ok yönünde çeviriniz. Fig.2)
- (2)

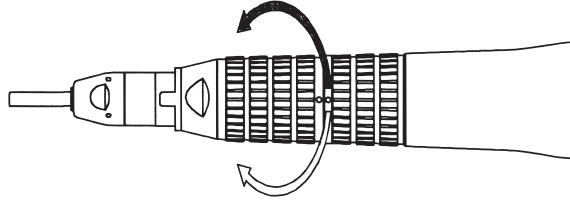

YAĞLAMA

Otoklav yapmadan/kullanmadan önce ve sonra mutlaka PANA SPRAY yağlayınız.
E-Tipi sprey ucunu PANA SPRAY burnuna oturana kadar itiniz.
Tenekeyi kullanım öncesi 3-4 sefer iyice çalkalayınız bunun sayesinde yağ ile alkol iyice karışacaktır.
E-Tipi sprey ucunu başlığın arka kısmından ortalama 2-3 saniye boyunca sıkınız ta ki başlık kafasından yağ çıkana kadar.

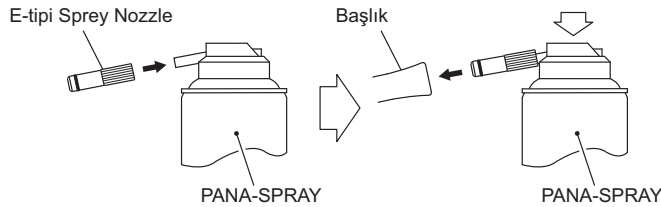

NAKANISHI INC.
www.nsk-inc.com
700 Shimo-Ogino-Kanuma-shi
Tochigi 322-8666,
Japan

NSK Europe GmbH
www.nsk-europe.de
Elly-Beinhorn-Strasse 8
65760 Eschborn,
Germany

NSK France SAS
www.nsk.fr
32 rue de Lisbonne
75008 Paris,
France

NSK Dental Spain SA
www.nsk-spain.es
C/ Modena, 43 El Soho-Európolis
28232 Las Rozas, Madrid,
Spain

NSK United Kingdom Ltd
www.nsk-uk.com
Office 5, Gateway 1000,
Arlington Business Park, Whittle Way,
Stevenage, SG1 2FP, UK

NSK America Corp
www.nskdental.com
1800 Global Parkway
Hoffman Estates, IL 60192,
USA

NSK Oceania Pty Ltd
www.nskoceania.com.au
Unit 22, 199-222 Young St.
Waterloo, Sydney,
NSW 2017, Australia

NSK Middle East
www.nsk-inc.com
Room 6E/A-701, 7th Floor, East Wing No.6
Dubai Airport Free Zone,
PO Box 54316 Dubai, UAE

NSK Asia Pte Ltd
www.nsk-inc.com
1 Maritime Square,
#09-33 HarbourFront Centre,
Singapore 099253

