



Bu medikal ürünün tasarımı ve üretiminde Avrupa Birliği 93/42/EEC yönetmelikleri uygulanmıştır

Lütfen kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve daha sonra başvurmak üzere saklayın

Uyarı


Genel Uyarılar

- ◆ Mikromotoru kullanırken hastanın güvenliği her zaman ön planda olmalıdır.
 - ◆ Mikromotor fonksiyonları anormalleşirse, işlemi hemen durdurun ve mikromotoru yetkili bayiye tamir için gönderin
 - ◆ Mikromotoru düşürmeyiniz yada sert bir objeye çarpmayınız.
 - ◆ Aksi söylenmedikçe mikromotoru sökmeyiniz ve değiştirmeyiniz.
- #### Çalıştırma ile ilgili Uyarılar
- ◆ Hasta ağzında kullanmadan önce daima vibrasyonu, ısınmayı, gürültüyü ve yavaş çalışma durumunu kontrol edin. Eğer bu tarz bir anormallik görülürse kullanmayı ve yetkili bayiye başvurun.
 - ◆ Mikromotor tamamen durmadıkça başlığı çıkartıp takmayınız.
 - ◆ Tırmız tutun ve hava ile kurutun. Hava içindeki nem ve pislik mikromotoru bozabilir.
- #### Yağlama ile ilgili Uyarılar
- ◆ Mikromotoru her kullanım sonrası yağlayın. Otoklava koymadan önce mutlaka yağlayın.
 - ◆ Sprey sıkarken mikromotoru sıkı tutun. Aksi takdirde sprej basıncı ile mikromotor sprej memesinden fırlayabilir.

1. Özellikler

- (1) Arka bağlantıdaki GERİ-DÖNÜŞSÜZ VALF ağız içi sıvıların emilerek sprej su çıkışı yolundan (PAT.) başlık su yollarına karışmasını engeller.
- (2) Çeşitli E-tipi içten soğutmalı ataçmanlar adapte edilebilir.
- (3) Mikromotor otoklavlanabilir.
- (4) Özel kaplama silindiri ile mükemmel sağlamlık sunar.
- (5) Ters/düz yön seçimi ve durdurma işlemi mikromotor üzerinden yapılır.

2. Teknik Özellikler

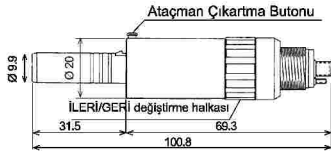

Ağırlık ...90 g

Hava Basıncı(MPa)	Hız(dk ⁻¹)	Hava Tüketimi(N l/dk.)
0.25	22,000	42
0.3	25,000	51
0.4	27,000	72

⚠ Hız değerleri, diğer konfigürasyona, hız yönüne ve hortum tipine göre küçük oranlarda farklılık gösterebilir.

3. Ataçmanın takılması

- (1) Ataçmanın takılması
E-tipi ataçmanı sonuna kadar (klik sesi gelinceye kadar) takın.

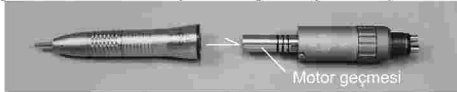


Fig. 2

- (2) Ataçmanın çıkartılması
Ataçman tahliye butonuna basın ve ataçmanı çekip çıkartın.



Fig. 3

4. İleri/Geri Rotasyon

- (1) İleri Rotasyon: FWD/REV değiştirme halkasını Fig. 4 te görüldüğü gibi "F" yönünde döndürün.
- (2) Geri Rotasyon: FWD/REV değiştirme halkasını Fig. 5 te görüldüğü gibi "R" yönünde döndürün
- (3) FWD/REV değiştirme halkası "F" ve "R" nin ortasında iken motor çalışmaz durur. (Fig. 6)

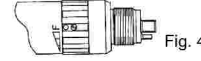


Fig. 4



Fig. 5

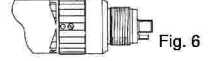


Fig. 6

5. Yağlama

Motoru başlık hortumundan ayırın ve birkaç damla Hava Türbin Yağı (Cat.No. Z016112) veya Fig. 7 de gösterildiği gibi motorun arkasındaki hava tüpünün içine birkaç saniye kadar PANA-SPRAYsıkın.

Hava Türbin Yağı:

Hava tüpünün içine 2-3 damla yağ koyun. Yağın mikromotorun içine gitmesi için yaklaşık 10 sn. kadar çalıştırın.

PANA-SPRAY:

Ok-başlı sprej meme ucunu sprej portuna takın. Meme ucunu sıkıca mikromotor hava tüpüne sokun. Sprej yağın yaklaşık 2 sn. kadar sıkın. Mikromotoru sıkıca sprej meme ucuna doğru, tüp dik konumda kalacak şekilde sıkıca bastırarak tutun. Aksi takdirde mikromotor, sprej memesinden basınç sonucu fırlayabilir.

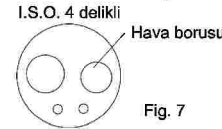


Fig. 7



Fig. 8

6. Sterilizasyon

IS-205 mikromotoru otoklavlanabilir.

Otoklavlama İşlemi:

- (1) Alkole batırılmış bir bezle kirlili kısımları silin.
- (2) Mikromotoru yağlayın. PANA-SPRAY yada Hava Türbin Yağı kullanın. Hava Türbin Yağı kullanıldığı zaman, otoklava koymadan önce mutlaka birkaç saniye çalıştırın
- (3) Sterilizasyon poşetine motoru koyun ve kapatın.
- (4) 121 °C de 20 dakika yada 132 °C de 15 dakika kadar otoklavlayın. 135 °C nin üzerine ayarlamayın.

NSK NAKANISHI INC.

HEAD OFFICE & FACTORY: 700 Shimohinata, Kanuma-shi, Tochigi-ken 322-8666, Japan Tel: 0289-64-3380 Fax: 0289-62-5636

TOKYO OFFICE : 6F MY Bldg., 1-13-3, Ueno-ku, Tokyo 110-0005, Japan TEL: 03-3835-2892 FAX: 03-3835-2856

http://www.nsk-nakanishi.co.jp e-mail: box@nsk-nakanishi.co.jp

JAS LİDER DİŞ A.Ş.

TÜRKİYE YETKİLİ SATICISI VE TEKNİK SERVİSİ : Fevzi Çakmak Solak 11/6 Kızılay/Ankara/Türkiye

TEL: +90 312 231 64 85 (pbx) FAX: +90 312 231 90 10

http://www.liderdis.com.tr, e-mail: lider@liderdis.com.tr, teknikservis@liderdis.com.tr