



Anguldurva Başlığı Anguldurva Frezleri için

NAC

OTOKLAVLANABİLİR

KULLANIM KILAVUZU

OM-C0054E Rev.4



Bu ürünün tasarımında ve üretiminde AB direktifi 93/42/EEC uygulanmıştır

Bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyup başka zaman kullanım için saklayınız.

Bu klavuz şu modeller içindir: NAC - U, NAC - SC, NAC - E, NAC - E4R, NAC - 10ER, NAC - E16R, NAC - E64R



Dikkat

- Başlığı kullanırken her zaman hastanın güvenliğini düşünün.
- Bu alet sadece dental amaçlı tasarlanmıştır.
- Başlık fonksiyonları anormalleşirse, işlemi hemen durdurun ve mikromotoru yetkili bayiye tamir için gönderiniz.
- Başlığı sökmeyiniz ve mekanizmayı çıkartmayınız.
- Başlığı düşürmeyiniz.
- Kafada 30.000 devir/dk. Hızını geçmeyiniz.
- Motor tamamen durmadan başlığı çıkarmayınız.
- Eksantrik, aşınmış ya da zarar görmüş frezleri kullanmayınız.
- Her kullanımdan önce frezin frez tutucuya güvenli şekilde takılıp kilitlendiğinden emin olun.

1. Frezin Takılması


Anahtar plakasını açın. Frez kafası ile frez borusundaki “D” deliğiyle birbirine geçirerek anahtar frezi yerleştirin. Anahtar plakasını orjinal yerine getirin. Anahtar plaka frez üzerindeki yiv ile birbirine geçer.

2. Yağlama

(1) PANA-SPRAY (NAC - E, NAC - E4R, NAC - E10R, NAC - E16R, NAC - E64R)

Otoklav yapmadan/kullanmadan önce ve sonra mutlaka PANA SPRAY ile yağlayınız.

- ① E-Tipi sprej ucunu PANA SPRAY burnuna oturana kadar itiniz.
- ② Tenekeyi kullanım öncesi 3-4 sefer iyice çalkalayınız bunun sayesinde yağ ile alkol iyice karışacaktır.
- ③ E-Tipi sprej ucunu başlığın arka kısmından ortalama 2-3 saniye boyunca sıkınız ta ki başlık kafasından yağ çıkana kadar. (Fig. 1)

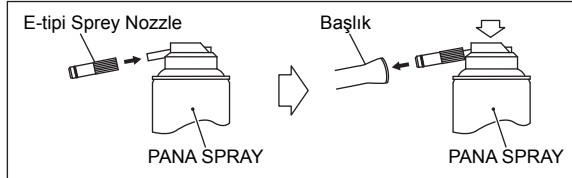

E-Tipi Sprej Nozzle : NAC - E, NAC - E4R, NAC - E10R
(2019 - 090) NAC - E16R, NAC - E64R

Fig. 1



Dikkat

- Sprej basıncının başlığı sprej memesinden fırlatma ihtimalini önlemek için başlığı ve memeyi sıkıca tutunuz.
- Başlık burnundan yağ çıkana kadar (yaklaşık 2 saniye) sprej sıkınız.
- PANA-SPRAY tenekesini dik tutun.

(2) Yağlama

Anahtar plakayı çevirerek açın. Birleşik somunu sökün. Kafayı dış kabından çıkartın. Şaftını kafadan çıkartın. Ok ile gösterilen yerleri yağlayın. (Fig. 2)

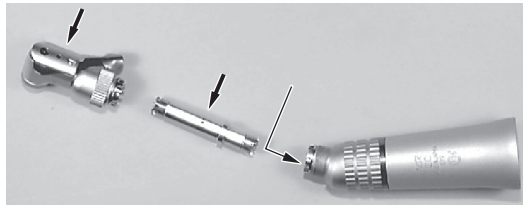


Fig. 2

3. Sterilizasyon

Buharlı otoklav kullanımı tavsiye edilir.

■Otoklav prosedürü :

- ① Başlıktan kir ve yüzeysel pıslığı temizledikten sonra alkollü bez ile siliniz. Telli fırça kullanmayınız.
- ② PANA SPRAY ile yağlayınız. (2. Yağlama bölümüne bakınız)
- ③ Otoklav poşetine yerleştiriniz ve poşet ağzını kapatınız.
- ④ En yüksek 135°C kadar Otoklavlayınız.
121°C (103Kpa) 20 dak. veya 132°C (186Kpa) 15 dak. sterilize ediniz.



Dikkat

- Kurutma işlemi sırasında sterilizer oda sıcaklığının 135°C geçmesi durumunda kurutma işlemi atlayın.
- Her zaman başlığı orta ya da üst tepsiye yerleştirin.Çünkü otoklavın alt kısmında ısı normal değerlerin üzerine çıkabilir.

4. Kartuş Değişimi

- ① Birleşik somunu sökün ve kafayı gövdeden ayırın.
- ② Dişli setini kafadan çıkartın.(Fig.3)

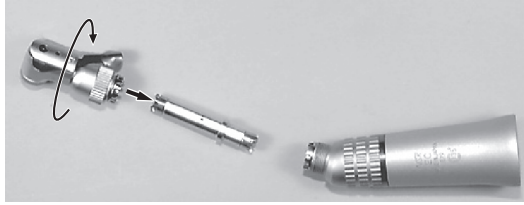


Fig. 3

- ③ Anahtarı kafaya takın ve saatin ters yönünde kafa çıkana kadar çevirin.(Fig.4)

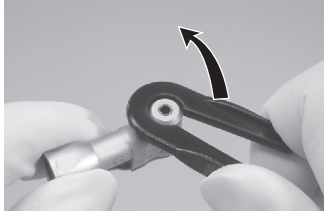


Fig. 4

- ④ Anahtar plakayı açın.Yapay frez ya da yuvarlak bir çubuğu deliğine takın ve kartuşu çıkartın.
- ⑤ Yeni kartuşu başlık slotundaki iğneler (pim) hizalı olacak şekilde kafaya takın.(Fig.5)

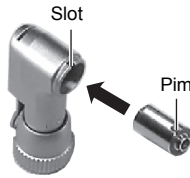


Fig. 5

- ⑥ Ters sıra ile tekrar monte edin.

※ Specifications may be changed without notice.

NSK

NAKANISHI INC.
700 Shimohinata, Kanuma, Tochigi
322-8666, Japan
www.nsk-inc.com

EC REP

NSK EUROPE GmbH
Westerbachstraße 58 60489 Frankfurt,
Germany
www.nsk-europe.de

