

Kullanım Alanı

Bu başlık profesyoneller tarafından dental klinik çalışmaları için tasarlanmıştır.

⚠ DİKKAT

- Başlığı kullanırken her zaman hastanın güvenliğini düşünerek hareket ediniz.
- Başlığı ve mekanizmasını kurcalayıp sökmeye çalışmayın.
- Başlığı hasta üzerinde kullanmadan önce başlığın vibrasyonunu, sesini ve ısını kontrol ediniz. Başlık anormal çalışırsa, kullanımı derhal durdurun ve satın aldığınız bayi ile irtibata geçiniz.
- Başlık normal çalışmaz ise kullanımı derhal durdurun ve NSK Yetkili Bayiisi ile irtibata geçiniz.
- Frez hala dönerken başlık kafasındaki Push butona basmak kafada AŞIRI ISINMA'ya yol açacaktır. Kullanım esnasında push buton sisteminin hastanın yumuşak damak dokularına temas etmemesi için dikkat gösteriniz. Yumuşak doku ile teması sırasında push buton sistemi basılıp yanma ve hastaya zarar verebilir.
- Başlığı darbeden ve yere düşürmelerden koruyunuz.
- Frezi ancak başlık tamamıyla durduruktan sonra söküp takınız.
- Uzun cerrahi frezler kullanmayınız. 26mm'den uzun frezler kullanmayınız.
- Eğer her hangi bir anormallik (karanlık, ışık yanmaz veya yanıp sönerse) yaşanırsa kullanımı derhal durdurun ve satın aldığınız bayi ile irtibata geçiniz.

Aksesuar Listesi

No.	Parça İsmi	Adet	Model
1	Kapak Anahtarı	1	PAX2-SU05

Hava ve Su Ayarı

Hortum bağlantı kısmına NSK multigauge takarak hava ve su ayarını kontrol ediniz. (Fig. 1).

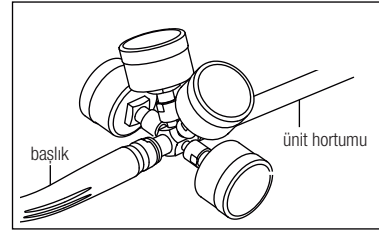


Fig. 1

Bağlantı Şekli

Başlığı monte etmeden önce lütfen kullanım kılavuzunu okuyun

PAF-SU M4/PAF-SU B2

Bağlantı

- 1) Figür 2'de belirtildiği gibi başlığı monte ediniz.
- 2) Bağlandığından emin olunuz.

Başlık Çıkarılması

Figür 3'de belirtildiği gibi başlığı hortumdan çevirerek ayırınız.

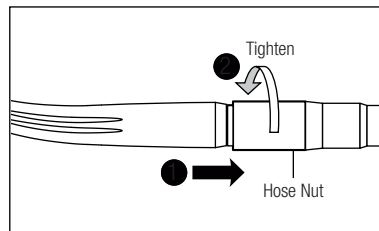


Fig. 2

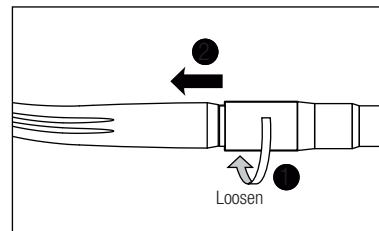


Fig. 3

Frezin Sökülüp Takılması

FREZİ TAKMAK İÇİN (Fig. 2)

Push Butona basarak frezi frez tutucusunun içerisine güvenli bir şekilde yerleştirin. Butona basmayı kesin.

FREZİ SÖKMEK İÇİN (Fig. 3)

Başlığı durdurun. Push Butona iyice basıp frezi çekerek yuvasından çıkarın.

⚠ DİKKAT

Frezin frez tutucusuna iyi yerleştikten emin olmak için Push butona basmadan frezi çekerek ve iterek kontrol edin.

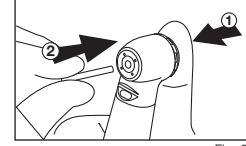


Fig. 2

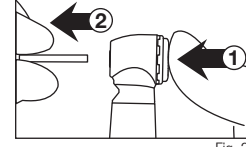


Fig. 3

Bakım

Aşağıda belirtildiği gibi her hastadan sonra bakım uygulamasını yapınız

Başlığı NSK temiz kafa sistemi ile temizleyiniz.

Her hastadan sonra temiz kafa işlemini yapınız.

- 1) Partikülleri ve debrisleri temiz kafa girişlerinden çıkartınız. (Fig. 7).
- 2) Su dolu yarım bardak temin ediniz.
- 3) Yarım bardak su içerisinden başlığı çalıştırınız. (Fig. 8).
- 4) 3 defa 2-3 saniye olacak şekilde bardak içinde rotasyon yaptırınız.
- 5) Eğer kir ayrılmadıysa fırça ile temizleyiniz.

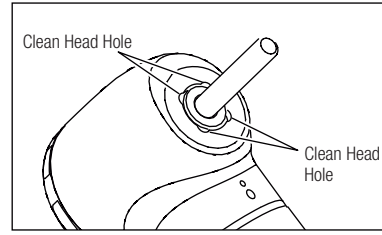


Fig. 7

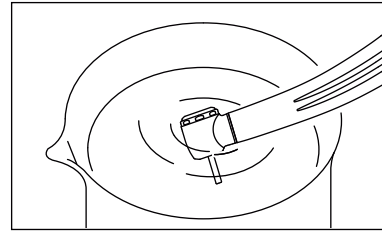


Fig. 8

⚠ Bu ikon başlığın Termo-Dezenfektörde kullanılabileceğini gösterir.

4. Yağlama

Her kullanım sonu ve otoklavlamadan önce PANA SPRAY Plus, PANA SPRAY ile yağlama işlemi yapınız.

■ PANA SPRAY Plus/PANA SPRAY

- 1) Ok uçlu sprej nozulu yağlama portuna takınız.
- 2) Ok uçlu sprej nozulu başlığın sürüş hava deliğine yerleştirip 2-3 saniye boyunca sprej sıkınız.

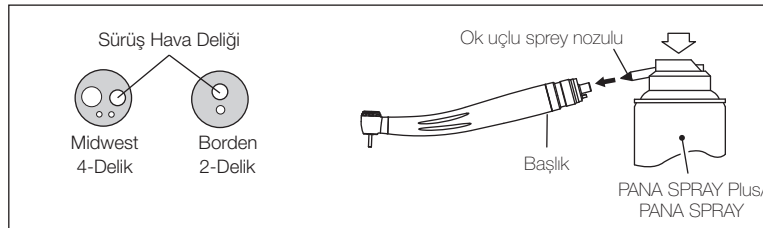


Fig. 4

- 1) Sprej Nozulu sprej portuna yerleştiriniz.
- 2) Sprej Nozulu başlığın arka tarafına yerleştirip yaklaşık 2-3 saniye boyunca sprej sıkınız.

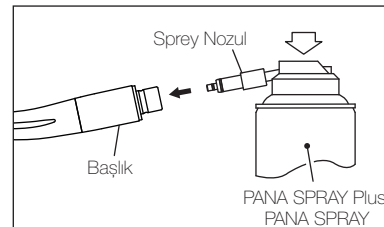


Fig. 5

5. Sterilizasyon

Otoklav sterilizasyonu tavsiye edilir.

İlk kullanımda ve her hastadan sonra aşağıda sıralıldığı şekilde sterilizasyon şarttır.

■ Otoklavlama Prosedürü :

- 1) Başlık yüzeyinde birikmiş kir ve kalıntıları temizleyip, Alkol'e batırılmış bez kullanarak siliniz.
- 2) 4. Yağlama bölümüne bakarak başlığı PANA SPRAY Plus/PANA SPRAY/Care3 Plus ile yağlayınız.
- 3) Otoklav poşetine yerleştirin ve poşetin ağzını kağatın.
- 4) Maksimum 135°C kadar otoklavlanabilir..
örn.) 20 dak. boyunca 121°C veya 15 dak. boyunca 132°C otoklavlayınız
- 5) Sterilizasyon sonrası başlığı poşet içerisinde muhafaza ederek kullanıncaya kadar sterilliğini koruyunuz.

* 121°C de 15 dakika boyunca sterilizasyon EN13060 or EN ISO17665-1 tarafından tavsiye

⚠ UYARI

- Başlığı diğer malzemeler ile birlikte ayrı poşet içerisinde olsalar dahi otoklavlamayınız. Diğer ürünlerin üzerindeki kimyasal atıklar başlığınızın renk değiştirmesine ve/ya kaplamasına zarar verebilir.
- Başlığı Oksidasyon potansiyeli olan solüsyonlar(kuvvetli asitler, süper asit solüsyonlar) ile birlikte sıkıyamayın, silmeyin ve içerisine batırmayın.

6. Kartuş Değişimi

- 1) frez tutucusuna sahte frez yerleştirin.
- 2) Kafa kapağı anahtarı kullanarak kafa kapağını sökünüz.
- 3) Sahte fezi ileri iterek kartuşu yuvasından çıkarınız.
- 4) Kafa içerisini temizleyiniz.
- 5) Kartuş üzerindeki pim ile kafa içerisindeki yuva ile hizalayıp kartuşu ileri iterek yerleştiriniz.
- 6) Kafa kapağını monte ediniz. (Fig. 7)

* Yedek Kartuş : SX-MU03 (Minyatür Kafa için) Sipariş No.P1001250
SX-SU03 (Standart Kafa için) Sipariş No.P1002250

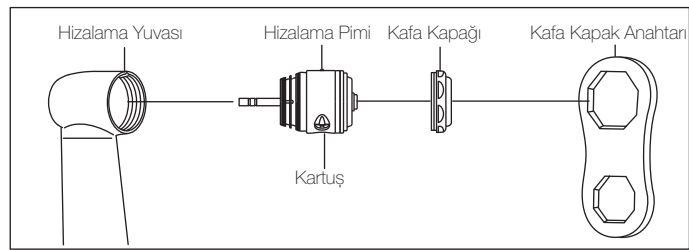


Fig. 7

⚠ UYARI

Kartuş üzerindeki iki O-ring yerlerinde olupundan emin olunuz (Fig. 8).

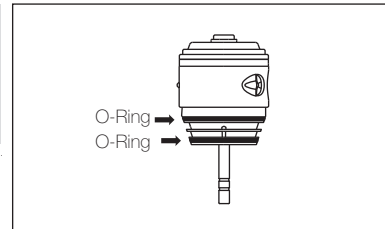


Fig. 8

Özellikler

Model	PAF-SU M4	PAF-SU B2	PAF-SU QD
Hortum Bağlantı Tipi	ISO 9168 Type 2 (Midwest 4 girişli)	ISO 9168 Type 1 (Borden 2 girişli)	QD Coupling
Hız	350,000 - 450,000 min ⁻¹		300,000 - 400,000 min ⁻¹
Frez Çeşidi	ISO 1797-1 Ø1.59 - 1.60mm Standard frez		
Frez Bağlantı Uzunluğu	10.2mm		
Max. Frez Uzunluğu	21mm		
Hava Basıncı	0.20 - 0.25MPa (2.0 - 2.5kgf/cm ²)		
Basınç Regülatörü	Monte edilmiş		-
Hava Tüketimi	≤55 NL/min (0.25MPa)		
Su Basıncı	0.05 - 0.20MPa (0.5 - 2.0kgf/cm ²)		
Çip Hava Basıncı	0.15 - 0.25MPa (1.5 - 2.5kgf/cm ²)	-	0.15 - 0.25MPa (1.5 - 2.5kgf/cm ²)
Sevkiyat ve Stoklama Koşulları	derece: -10 - 50 °C, Humidity: 10 - 85%, Atmosfer basıncı: 500 - 1,060hPa		

Semboller



Max. 135°C'de otoklavlanabilme



Termo Dezenfektörde yıkanamabilme



"Avrupa Medikal Direktif 93/42/EEC". CE Belgesine göre üretim Direktif



Fabrika

CE Bu medikal ürünün tasarımında ve üretiminde AB direktivi 93/42/EEC uygulanmıştır.

NAKANISHI INC.

www.nsk-inc.com

700 Shimohinata Kanuma-shi
Tochigi 322-8666,
Japan

NSK Europe GmbH

www.nsk-europe.de

Elly-Beinhorn-Strasse 8
65760 Eschborn,
Germany

NSK United Kingdom Ltd

www.nsk-uk.com

Office 5, Gateway1000,
Arlington Business Park, Whittle Way,
Stevenage, SG1 2FP, UK

NSK America Corp

www.nsk-inc.com

700 Cooper Court
Schaumburg, IL 60173,
USA

NSK France SAS

www.nsk.fr

19 avenue de Villiers
75017 Paris,
France

NSK Dental Spain SA

www.nsk-spain.es

C/ Modena, 43 El Soho-Európolis
28232 Las Rozas, Madrid,
Spain

NSK Oceania Pty Ltd

www.nsk-inc.com

Unit 22, 198-222 Young St.
Waterloo, Sydney,
NSW 2017, Australia

NSK Middle East

www.nsk-inc.com

Room 6EA-701, 7th Floor, East Wing No.6
Dubai Airport Free Zone,
PO Box 54316 Dubai, UAE

NSK Asia

www.nsk-inc.com

1 Maritime Square,
#09-33 HarbourFront Centre,
Singapore 099253

Specifications are subject to change without notice.

'10.08.00 (N)