

Kullanma Kılavuzu

Dynamic Flow invazif kavite hazırlamak için, düşük viskoziteli, ışıkla kürleşen, radyopak, akıcı, kompozit, minimal bir rezindir.

Endikasyonları:

İnvaziv kavite restorasyonu
Çukur ve fisür kapatma
Direkt restorasyon için taban ve layner
Akrilik geçici materyalin onarımı
Estetik dolaylı restorasyonların onarımı

Kontra Endikasyonları:

Metakrilat rezinlere alerjisi olduğu bilinen hastalarda Dynamic Flow kullanılmamalıdır. Yanal ve merkezi oklüzyonları kontrol edin ve gerekiyorsa ayarlayın.

Önlemler: Dynamic Flow 'yu cilde/mukoza zarına veya gözlere değdirmeyin. Polimerize olmamış Dynamic Flow hafif ve geri döndürülebilen tahrişe neden olabilir veya metakrilatlara karşı genel bir hassasiyete yol açabilir. Çocuklardan uzak tutun. Sadece dental kullanım içindir. Kullanım tarihi geçmiş ürünleri kullanmayın. Işığa maruz kalması halinde prematür polimerizasyon oluşabilir.

Kullanım Talimatı

Kullanmadan önce, istenen Dynamic Flow tonunu ve tipini seçin. Ponza bulamacı ile yıkayın ve kurutun. Mevcut mine ve dentine 15 saniye kadar % 37 PD dağıtma jeli uygulayın.

Jeli çıkarın ve 20 saniye çalkalayın. Dişe bağ uygulayın. Mikro fırça ile çift kat President Prebond uygulayın. Hava ile nazıkçe 5 saniye kurutun. Diğer ürünleri uyguluyorsanız, 10 saniye ışıktaki kurutun. Bunları üreticilerin talimatlarına göre kullanın.

Hazırlama: Dynamic Flow akıcı kompozit rezin doğrudan tek kullanımlık uçtan uygulanabilir.

Ürünü peyderpey artırarak yerleştirin ve ışıktaki sertleştirin.

Her ürün koyuşta, tüm yüzeyini 20 saniye ışıktaki sertleştirin.

Kompozitin biçimini oluşturduktan sonra perdahlayın ve cilalayın.

Proksimal alanları perdahlayın, yüzeyi cilalayın.

Depolama:

1-30°C sıcaklıkta muhafaza ediniz. Kullanımdan sonra şırınga kapağını kapatın. Direkt gün ışığından koruyun.

Raf ömrü: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır

Bileşenleri:

Kit içeriği

Dynamic Flow Kit 5x2g şırınga

Ton: A1, A2, A3, B2, B3

Dynamic Flow yedek 2x2g şırınga

Ton: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, OA2, OA3, C2, D2, WT, TL



PRESIDENT DENTAL GmbH

Kesselbodenstrasse 5, 85391 Allershausen, Germany
Tel: +49 8166 389 9 820 • Fax: +49 8166 389 9 821
www.presidentdental.com • info@presidentdental.com