

Cam İonomer Yapıştırma Simanı Toz / Sıvı Kullanma Kılavuzu

ÖZELLİKLER: Uzun süreli çalışma imkanına sahip radyoopak cam iyonomer ve hızlı donma reaksiyonu veren siman. Mükemmel kullanım, düşük film kalınlığı, yüksek mukavemet ve florür içerir. Porselen, seramik veya metalin dış yapısına mükemmel yapışmasını sağlar.

ÖNERİLEN ENDİKASYONLAR:

- Kuronların, köprülerin, iç kaplamaların veya ortodontik braketlerin sementasyonu.

KONTRAENDİKASYONLAR:

- Pulpa kapatma.

UYGULAMA:

Toz: Sıvı Oranı	1 Kaşık: 2 Damla 2.00gr : 1.00gr
Karıştırma Süresi	30 Saniye
Çalışma Süresi (23 ± 1 °C)	3 Dakika 30 Saniye Minimum
Donma Süresi (37 ± 1 °C)	4 Dakika 0 Saniye Maksimum

- 1- Preperasyonu, yağsız prophy pasta, su ve kuru hava ile temizleyin. Kalan dentin ince işe ve pulpa koruması gereklyse kalsiyum hidroksit kullanın.
- 2- Bir kaşık toz ve 2 kabarcık içermeyen sıvı damlasını cam blok veya karıştırma pedinin üzerine yerleştirin ve kremi kıvamda düz bıçaklı spatula ile iyice karıştırın.
- 3- Restorasyon alanının tüm iç yüzeylerine ince bir siman tabakası sürün ve preperasyona oturtun. Havayı gidermek ve simanın fazlasını almak için, hastanın bir pamuğu yeterince sert ısırmasını. Donan siman diş rengindedir (U).

SAKLAMA:

Serin ve kuru bir yerde (5-25°C) saklayın. Kullanımdan hemen sonra kapakları kapatın.

UYARI:

Sıvı ve tozun göz ile temasından kaçının. Temas halinde bolca durulayın ve tıbbi yardım isteyin.

PARTİ KODU:

LOT Parti kodu, ürünün partisini benzersiz şekilde tanımlamak için sayısal bir son ekle ay, yıl, gün biçiminde açık üretim tarihi ile oluşturulmuştur. Lütfen bu parti kodunu tüm yazışmalarda belirtin.

U Son kullanma tarihi yıl, ay biçiminde gösterilir. Bu tarihten sonra ürünü kullanmayın.

DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANIM İÇİN ÖZEL OLARAK FORMÜLE EDİLMİŞTİR.

REF PRD.100.EXC 35g 17ml

President Dental GmbH, ürünlerimizin sürekli izlenmesi ve iyileştirilmesi politikası izlemektedir. Bu ürün hakkında herhangi bir yorumunuz varsa, lütfen ambalaj üzerinde gösterilen parti numarasını belirterek aşağıdaki adresten bizimle iletişime geçin.

