

Dental Modelleme Mumu

Dental modelleme mumunun popüler özellikleri şöyle olmalıdır:

- Ağız sıcaklığında yüksek mukavemet ve sağlamlılık
- Ağız sıcaklığının üstündeki sıcaklıklarda geniş yumuşama aralığına sahip olmalıdır
- Yumuşatılmış halde, dökülmeden, çatlamadan veya yırtılmadan kolayca kalıplanabilir olmalıdır.
- Düşük termal büzülme oranına sahip olması gerekir.
- Oda sıcaklığında dökülmeden ve ufalanmadan kolayca kesilebilmelidir.
- Erime ve yeniden katılaşma özellikleri üzerinde az miktarda değişiklik olmalıdır.
- Kaynama esnasında kalıntı kalmamalıdır.

Kullanım Talimatı:

Bir balmumu tabakası alın ve ikiye bölün, balmumu tabakasını bir Bunsen alevi üzerinde yumuşatın ve alçı modeline bastırın. Balmumunun tüm eğrilere ve modeldeki çatlaklara girdiğinden emin olun ve ardından fazla balmumunu ısıtılmış bir bıçak kullanarak kesin. Bir balmumu tabakası alın ve bir Bunsen alevi üzerinde soten ve balmumu bir modele kalıplayın, bu ısırık ölçüsü için uygun olacaktır.

Not: Taban plakası mumları normal diş oyukları ve normal diş laboratuvarı tekniğini kullanarak oda sıcaklığında temiz ve keskin bir şekilde oyulacak şekilde olacaktır.

Yumuşama: Bal mumu, pul pul olmadan veya ufalanmadan ve parmaklara yapışmadan yumuşatılmalıdır.

Kesme / Oyma: balmumu, yırtılmadan veya ufalanmadan kolayca ve net bir şekilde kesilebilmelidir.

