

Kullanma Kılavuzu

Prebond dentine ve dađlanmıř diř minesine mükemmel yapıřma gücüne sahip bir adezyondur. Kompozit ile diř yüzeyi arasında yapıřma gücünü geliştirir.

Endikasyonları:

Prebond, diř minesi, dentin ve kompozit arasında adezyon geliřtirmek için kullanılır. Ayrıca, cam iyonomer altdolgu (astar) siman ile kompozit dolgu arasında (sandaviç tekniđi) adezyon geliştirilir.

Uygulama:

Kavite, adezyon dolgu tekniđi kurallarına göre hazırlanmalıdır. Duruma bađlı olarak derin kavitelere kalsiyum hidroksit macun veya altdolgu (astar) simanı uygulanır. Dađlama bađı tekniđine göre, diři minesi dađlanır, çalkalanır ve kurutulur. Cam iyonomer siman dolgu dađlanmamalı, sadece pürüzlendirilmelidir. Hazırlanan kavite kurutulduktan sonra, karıřtırma pedine 1-2 damla ıřıkla kuruyan prebond damlatın (řiřeyi hemen kapatın) ve bir fırça veya köpük paleti kullanarak diře ince bir tabaka uygulayın. Fazla

malzemeyi kuru bir fırça veya palet ile çıkarın. Sonra ıřık ile malzemeyi kurutun (15 saniye).

Yan Etkileri:

Ürün uygun řekilde hazırlanıp kullanılırsa, istenmeyen yan etkiler son derece nadirdir. Herhangi bir istenmeyen yan etkinin farkına varırsanız veya bundan řüphelenirseniz, lütfen mümkün olduđuunca katılanın durumunun ve semptomlarının bir tanımını ile birlikte bize bildirin.

Çalıřma Talimatı:

Satılan ürün bilgilerinde içerilen çalıřma talimatına ve önlemlere tamamen uyulmasını sađlayın. Bu talimatlara uyulmasına karřın hastanın istenmeyen reaksiyonlara maruz kalması veya bařka istenmeyen durumların ortaya çıkması halinde lütfen mümkün olduđuunca katılanın durumunun ve semptomlarının bir tanımını ile birlikte bize bildirin.

Kontra Endikasyonları:

Pulpa dokusu alanında Prebond kullanmayın.

Depolama / Raf Ömrü:

Raf ömrü 3 yıldır. Serin ve kuru bir yerde saklayın. Iřıktan koruyun.

Sunum:

REF PRD.100.02.02
1x5 ml. likit

