

Prebond SE®

Kullanma Kılavuzu

Kendinden dağılmalı Prebond SE, yapıştırılmalı restorasyon tekniğinde kullanılan ışınlı sertleşen tek aşamalı yapıştırıcıdır.

İçeriği

Prebond SE fonksiyonel MDP monomer, metakrilat, fotoinitiyator, etanol ve su içerir.

Kullanım alanı

- Direkt ve indirekt restorasyonlarda yapıştırılmalı restorasyon teknikleri için yapıştırma ajanı.
- mine ve dentin yüzeyinde kompozit materyalinin sabitlenmesi.
- mine ve dentin yüzeyinde seramik veya kompozit restorasyonlarının yapıştırılarak sabitlenmesi.
- Hibrit seramik, ışınlı sertleşen kompozit ve kompomer, metal veya amalgam yüzeylerine kompozitin tamirinde.
- Dentin örtücü olarakta kullanıma uygundur.

Diğer Kullanım Alanları

Aşağıdaki vakalar ile beraber kullanıma uygundur:

- Hassasiyet giderici
- Kök Yüzey hassasiyet tedavisinde
- Kavite ve dentin verniği ile beraber
- Pit ve fisür örtücüler ile beraber

Yan Etkileri

Bu medikal ürün uygun hazırlanıp uygulandığında yan etki oluşması ihtimali çok nadirdir. İstenmeyen her hangi bir yan etki ile karşılaşıldığında - şüphe dahi olsa - lütfen bizim ile irtibata geçerek vaka ve semptomlar hakkında detaylı bilgi veriniz. Hassas bünyelerde Prebond SE bazı içerikleri hassasiyet veya alerji oluşumuna yol açabilir

Kullanım Talimatları

Bu kılavuzda anlatılan önleyici tedbir maddelerine ürün bilgilerine her zaman uyunuz. Bu talimatlara uyulmasına rağmen hasta beklenmeyen tepki verir veya istenmeyen olaylar gelişirse durum hakkında detaylı bir şekilde biz bilgi aktışı sağlıyoruz.

Etkileşimler

Polimerizasyonu etkileyebilecek Fenoliks ve diğer maddeler (örn. ginko oksit ojenol) Prebond SE ile temas ettirilmemelidir.

1. Konvansiyonel dolgu teknikleri

a) Kavite Hazırlığı

Restorasyon teknikleri prensipleri doğrultusunda uygulamayı gerçekleştiriniz. Gerekğinde pulpanın kalsiyum hidroksit içerikli siman ile kapatınız. Mineyi bitirim frezi kullanarak bölgeyi hazırlayınız. Cıalanmamış mine yüzeyi asit ile dağlanmalı veya pumic ile yüzey temizlenmeli. Ardından mineyi yıkayıp kurulayınız. Hijyenik değerler gereği rubberdam kullanımı tavsiye edilir.

b) Uygulama

Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız ve karıştırma godesine bir damla damlatınız. Dentin ve mine bölgesine Prebond SE 20 san. boyunca uygulayınız. Yağsız hava yardımı il Prebond SE nazik bir şekilde kurutunuz. >800 mW/cm³ Işın yoğunluğunda LED Polimerizasyonu cihazı yardımı ile sertleştiriniz. Işın yoğunluğu düşük ise sertleşme süresi ona bağlı olarak uzar.

c) Kompozit ve Kompomer dolgu

Restorasyon materyali üreticisinin talimatları doğrultusunda kullanınız.

2. İnlay/Onlay, Veneers ve kronların sabitlenmesi

Prebond SE kullanırken yeterli ışıgın (üreticinin talimatları doğrultusunda) restorasyona ulaştığından emin olunuz.

a) Restorasyon öncesi hazırlık

İlgili maddenin kullanım talimatları doğrultusunda restorasyonu hazırlayınız.

b) Kavite hazırlığı

1.1 maddede izah edildiği gibi

c) Uygulama

1.2 maddede izah edildiği gibi

d) Simantasyon

Üreticinin talimatları doğrultusunda

3. Diğer yüzeylerin yapıştırılması

a) Hazırlık

b) Sermalikler

In traor a l application:

Seramik yüzeyler elmas frez, kumlama veya %37 fosforik asit yardımı ile pürüzlendirilme, yıkanmalı ve yağsız hava ile kurulanmalıdır.

Ağız dışı uygulamalar:

Seramik yüzeyler %5 HF asit ile dağlanıp yıkayıp ve ardından yağsız hava ile kurutulabilir.

Opsiyonel:

Seramik yüzeylerin silanasyonu (üretici talimatları doğrultusunda)

c) Metal ve Amalgam

Yüzeyi elmas frez yardımı ve kumlama cihazı ile pürüleştirir.

Ardından basınçlı buhar makinası veya aseton yardımı ile temizleyin ve yağsız hava ile kurutunuz.

d) Kompozit

Kompozit yüzeyleri elmas frez yardımı ile veya kumlama cihazı ile pürüzlendirilmeli, yıkayıp fosforik asit ile temizlenmeli, yıkayıp yağsız hava ile kurutulmalı.

e) Uygulama

Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız ve karıştırma godesine bir damla damlatınız. Kullanım sonrası şişenin kapağını derhal kapatınız. Yüzeye tek kullanımlık fırça yardımıyla Prebond SE 20 san. boyunca uygulayınız. Yağsız hava yardımı il yapıştırma ajanını 5 san. boyunca kurutunuz. Ardından 10 san. bıyunca ışınlı sertleştiriniz (>800 mW/cm³ ışın yoğunluğunda Halojen veya LED Polimerizasyonu cihazı yardımı ile). Işın yoğunluğu düşük ise sertleşme süresi ona bağlı olarak uzar.

f) Restorasyon

Restorasyon materyalini üreticisinin talimatları doğrultusunda kullanın.

4. Dentinin kapatılması

1.1 ve 1.2 maddelerdeki talimatlara uyunuz.

Acil Müdahaleler

Küçük parçacıkların (tek kullanımlık fırça uygulaması) yanlışlıkla hasta tarafından yutulma sebebinde oluşabilecek akut tehlikelerin oluşabileceğini unutmayın. Ağız içi mukoz tabakası ile direkt temas halinde bölgeyi bol çeşme suyu ile yıkayın. Göz ile teması sonucunda derhal bol çeşme suyu ile yıkayın. Tedavi sonrasında ophthalmoloji uzmanına müraçat ediniz.

Toksikolojik etkiler

Prebond SE nin vital dentin bölgesine direkt teması ardından dentin kanal nüfuz etmesinden doğan toksisite Cam ionomer siman veya polikarboksilat siman uygulamasıyla aynıdır.

Not

Bu ürün Diş hekimi veya diş teknisyenleri kullanımı için tasarlanmıştır. Çocuklardan uzak tutunuz. Şişe komple bittğinde imha ediniz.

Muhafazası ve işaretleme

Raf ömrü ve LOT bilgisi için ambalaj üzerine bakınız.

Muhafazası

4-22°C/39-72°F

Gün ışığında ve ısı oluşumlarından uzak tutunuz.

Hijyenik Tavsiyeler

Prebond SE kullanımı esnasında aşağıdaki tavsiyeler uyulduğu takdirde daha hijyenik ve kuvvetli yapışma gücü elde edilecektir.

- Tek kullanımlık fırçalar sadece tek hastada kullanılmalıdır.
- Kullanım sonunda şişeyi derhal kapatınız ve şişeyi dezenfekte ederek muhafaza ediniz.

Paketleme

Pre bond SE, 5ml



PRESIDENT DENTAL GmbH

Kesselbodenstrasse 5, 85391 Allershausen, Germany
Tel: +49 8166 389 9 820 • Fax: +49 8166 389 9 821
www.presidentdental.com • info@presidentdental.com