

Kullanma Kılavuzu

Açıklama

Proshield Varnish %5 sodyum florür içeren boşluk verniğidir. Dentin hipersensitivitesinin tedavisi amacıyla dişlere uygulanır. Proshield Varnish, sakız, çilek, kavun ve nane gibi dört çeşide sahiptir. Kolay karıştırma ve uygulama için tek dozda paketlenmiştir.

Bileşenler

- Rosin
- Sodyum florür
- Etanol
- Ksilitol
- TCP

Endikasyonlar

Açığa çıkan dentin ve kök yüzeyine sekonder dentin aşırı duyarlılığının tedavisi için.

Kontrendikasyonları

1. Üseratif diş eti iltihabı veya stomatiti hastalarda kullanmayın.
2. Hastaların florür, reçine veya benzeri maddeler gibi bileşenlere alerjisi olduğu biliniyorsa, Proshield Varnish kullanılmamalıdır.
3. Proshield Varnish uygulandıktan sonra, hastalar sert yiyecekleri çiğnemekten, alkol içeren sıvılar içmekten ve 4-6 saat fırçalamaktan kaçınmalıdır.

Önerilen Prosedür

1. Dişleri iyice temizleyin ve pamuk ruloları ve hava ile fazla nemi alın.
2. Proshield Varnish içeren hazne açığa çıkıncaya kadar folyo kapağını geriye doğru soyun.
3. Bir fırça kullanarak Proshield Varnish'i iyice karıştırın.
4. Proshield Varnish'i bir fırça ile ince bir şekilde uygulayın.
5. Proshield Varnish'in diş yüzeyinde mümkün olduğunca uzun, en az 4 saat kalması önerilir.

Depolama

Yüksek sıcaklıkta veya yoğun ışıktaki saklamayın.

Önlemler

1. Bir diş hekimi ve dental uzman tarafından kullanılmalıdır. Prosedürü ve önlemleri dikkate alın

2. Paket hasarlıysa kullanmayın.

3. Aynı gün başka florür tedavisi almayın. Ayrıca tedaviden birkaç gün sonra florür takviyeleri ve durulumaları kullanmaktan kaçının.

4. Son kullanma tarihinden sonra kullanmayın.

5. Proshield Varnish kullandıktan sonra kalan malzemeleri atın. Çünkü paket tek kullanımlıktır.

6. Sadece tek kullanımlıktır.

Dozaj

Proshield Varnish'in kullanım amacı hem çocuklar (6 aydan 16 yaşına kadar) hem de yetişkinler içindir.

Sağlanan tüm verniği kullanmak gerekir.

Hastanın ağırlığı ve tedavi edilen diş sayısı dikkate alınarak, sadece istenen tedavi alanında ince bir film oluşturmaya yetecek kadar vernik kullanın. (Tek kullanımda maksimum kapasite 0,4 ml'dir)

Proshield Varnish uygulaması genellikle 6 ayda bir tekrarlanır. Ancak daha fazla tedaviye ihtiyaç duyulursa 3 ayda bir uygulama yapılabilir. Hasta tedaviden sonra 4 saat dişlerini fırçalamamalı veya yiyecek çiğnememelidir.

Belirli hastalar için kullanılacak florür miktarı konusunda rehberlik için lütfen yerel yetkililerinizin tavsiyelerine başvurun.

Uyarı

1. Ödemli şişme veya mide bulantısı, özellikle geniş yüzeylere uygulandıktan sonra bazı florür vernik ürünlerinde yalnızca nadir durumlarda bildirilmiştir. Dispne, son derece nadir olmasına rağmen, astımlı kişilerde ortaya çıkmıştır. Gerekirse, yoğun uygulanan vernik bir fırçalama ile temizlenebilir.
2. Hamile kadınlarda ve emzirme döneminde kullanımından kaçınılması önerilir.

Gerekirse, yoğun uygulanan vernik bir fırçalama ile temizlenebilir.

2. Hamile kadınlarda ve emzirme döneminde kullanımından kaçınılması önerilir.

Paket

PRD.01.30100: 32 Tek Ünite Doz uygulama çubukları

PRD.01.30001: 200 Tek Ünite Doz uygulama çubukları

Ünite Birim: 0.4MI

