

606.20.110

AH Plus Kanal Dolgu Patı

606.20.110 Standard patek

1 Tüp A patı (pastası), 4 ml.

1 Tüp B patı (pastası), 4 ml.

AH Plus , çift komponentli (bileşenli), epoksitamin reçine bazlı bir kanal dolgu patıdır. Bu kolay karışım elde edilebilir pat, kök kanal duvarlarına mükemmel adaptasyon ve uzun dönemli boyutsal stabilite sağlar ve sertleşme esnasında minimum büzüşme özelliğine sahiptir.

AH Plus ISO 6876: 1986 (E) gerekliliklerine uygun bir kök kanalı doldurma patıdır.

KOMPOZİSYON

AH Plus A patı

Epoksi reçine

Kalsiyum tungstat

Zirkonyum oksit

Aerosil

Demir oksit

AH Plus B patı

Adamantan amin

N,N-Dibenzil-5-oksonan-diamin-1,9

TCD diamin

Kalsiyum tungstat

Zirkonyum oksit

Aerosil

Silikon yağı

ENDİKASYONLARI

AH Plus güta-perka gibi kanal doldurucuları ile kombine olarak veya tek başına sekonder dentistiyondaki dişlere ait kök kanallarının daimi olarak doldurulması için kullanılır.

KONTRA-ENDİKASYONLARI / UYARILAR ve ÖNLEMLER

AH Plus epoksi reçinelere ve formülasyonunda bulunan diğer maddelere karşı aşırı hassasiyeti olan hastalarda kontra-endikedir. Bilinen bir yan etkisi ve diğer dental ürünlere bir geçimsizliği mevcut değildir. A patında epoksi reçine ve B patında amin türevleri bulunduğu için deri ile temasta iritasyona ve hassasiyete, göz ile temas halinde iritasyona neden olabilir. Bu dokularla temas halinde hemen sabunlu suyla yıkanmalıdır. Kullanım esnasında eldiven giyilmesi önerilir.

KULLANIMI

Kök Kanalının hazırlanması

AH Plus uygulamasından önce kök kanalı hazırlanmış, temizlenmiş ve kurutulmuş olmalıdır.

Dozaj ve karıştırma

1 hacim A patı ile 1 hacim B patı ambalajındaki karıştırma pedi üzerinde veya cam tablet üzerinde homojen karışım elde edilecek şekilde hazırlanır.

Uygulama

AH Plus standart bir teknik olarak güta-perka, gümüş veya titanyum kanal doldurucuları ile kullanılır. Hazırlanan dolgu patı lentulonun spiral kısmına uygulanır. Hava kabarcıklarını ve kanalın fazla doldurulmasını önlemek amacı ile lentulo çok düşük hızda apeks kadar ilerletilmeli ve kanaldan çıkış esnasında da çok düşük hızda çalışılmalıdır.

Alternatif olarak AH Plus kanal eğesi kullanarak da uygulanabilir. Bu amaçla apikal kök kanalı hazırlama işlemleri sırasında kullanılan son boyda kanal eğesi seçilir. Rotasyonda olan kanal eğesine AH Plus dolgu patı yüklenir. Daha sonra ilk güta perka dolgu patına bulanıp kanala itilir. İstenirse müteakiben başka güte perkalar ve leteral veya vertikal kondensasyon yöntemleri takip edilebilir. Bu durumda, ince bir kat AH Plus uygulanmalıdır.

Kanal dolg patının kanaldan sökülmesi

Eğer AH Plus güta-perka ile kullanılmışsa, güta perka sökmek için kullanılan konvansiyonel yöntemlere başvurulabilir.

Uygulama enstrümanlarının temizlenmesi

Spatulalar, uygulama pedleri ve kullanılan diğer aletler kullanımdan hemen sonra alkol veya aseton ile temizlenmelidir.

Çalışma süresi

Çalışma süresi 23 derece sıcaklıkta minimum 4 saattir.

Sertleşme süresi

Sertleşme süresi 37 derece sıcaklıkta minimum 8 saattir.

SAKLAMA ŞARTLARI / RAF ÖMRÜ

Oda sıcaklığında muhafaza ediniz.

Reçine tüplerini sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz.