

DENTSPLY**Dycal®****Radyopak kalsiyum hidroksit bileşimi**

Dycal® sert, kendiliğinden sertleşen, radyopak kalsiyum hidroksit bileşimidir. Akrilik ve kompozit restorasyonların polimerizasyonunu engellemez. Dycal® tüpler halinde ve CFC içermeyen basınçlı paketlerde sunulmaktadır.

BİLEŞİMİ**Baz pasta**

1,3-Bütillen glikol disalisilat

Çinko oksit

Kalsiyum fosfat

Kalsiyum tungstat

Demir oksit pigmentleri

Katalizör pasta

Kalsiyum hidroksit

N-etil-o/p-tolüen sülfonamid

Çinko oksit

Titanyum dioksit

Çinko stearat

Demir oksit pigmentleri (sadece dentin rengi)

ENDİKASYONLAR

Direkt ve indirekt pulpa örtülenmesi.

Dental dolgu materyalleri, simanlar ve diğer kaide materyalleri altında koruyucu örtücü.

KONTRENDİKASYONLAR

Sülfonamidler veya ürünün diğer bileşenlerine karşı aşırı hassasiyet.

YAN ETKİLER

Sülfonamidlere hassas bireylerde alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

DİĞER DENTAL ÜRÜNLER İLE OLUMSUZ ETKİLEŞİMLER

Aseton içeren ürünler kalsiyum hidroksit materyaller için zararlıdır. Bu ürünlerin kalsiyum hidroksit esaslı kaide materyalleri ile temasını en az düzeyde tutunuz.

UYGULAMA**Dozaj**

Ürün ile verilen karıştırma kağıdı üzerine eşit miktarlarda baz ve katalizör pasta (1.17g : 1.00g) tatbik ediniz. Bunun için, basınçlı paketlerde kabın ağız kısmının ucuna karıştırma kağıdı üzerinde yana doğru hafif basınç uygulanmalıdır. Ağız kısmı ilk kullanım öncesinde boştur, dolayısıyla materyalin çıkması için birkaç saniye gerekebilir.

Katalizör miktarını arttırıp azaltmak suretiyle sertleşme süresini kontrol altına almaya çalışmayınız. Ürün bu tür varyasyonlara karşılık sabit bir çalışma süresi sağlayacak biçimde ayarlanmıştır.

Karıştırma

Dycal uygulama ucu ile tekdüzen bir renk elde edilinceye kadar hemen karıştırınız. Aşırı uzun süre karıştırmayınız. Azami çalışma süresi elde etmek için, iki pastanın karıştırılması işlemini 10 saniye içerisinde tamamlayınız.

Uygulama

Dycal uygulama ucu gibi bir top uçlu enstrüman, karışımın kaviteye yerleştirilmesi ve istenilen derinliğe kadar zemin üzerine yayılması için etkili bir enstrümandır.

Sertleşme başlamadan önce verimli bir yerleştirme için kütlelin akıcılığından yararlanmak amacıyla, karışımı kavite içerisine hemen tatbik ediniz. Kavite preparasyonu kuru olmalıdır.

Kavite kenarlarına temas etmeyiniz.

Aşırı miktarda materyal uygulamayınız.

Sertleşme

Karışım karıştırma kağıdı üzerinde 2½ ila 3½ dakika içerisinde sertleşecektir (23°C ve %50 nisbi nem). Nem ve sıcaklık nedeniyle ağız içerisindeki sertleşme süresi daha kısadır. Artan rutubet ve yüksek sıcaklık, mevcut çalışma ve sertleşme sürelerini kısaltacaktır. Diğer taraftan, azalan rutubet ve düşük sıcaklık mevcut çalışma ve sertleşme sürelerini uzatacaktır.

Retansiyon bölgeleri veya kenarlardaki sertleşmiş materyal fazlalıklarını keskin bir kaşık ekskavatör veya frez ile uzaklaştırınız.

SAKLAMA

Tüpleri veya dağıtıcıların kapaklarını sıkıca kapalı tutunuz.

Oda sıcaklığında veya daha düşük sıcaklıkta muhafaza ediniz. Boş olsa bile basınçlı paketleri delmeyiniz veya ateşe atmayınız.

Baz pastanın katı ve sıvı fazlarının ayrılması yüksek sıcaklıklarda artmaktadır. Düşük sıcaklıklarda muhafaza edilmesi durumunda, kullanmadan önce materyalin oda sıcaklığına dönmesine izin veriniz.

SERİ NO VE SON KULLANIM TARİHİ

Seri numarası, ürünün tanımlanmasını gerektiren her türlü iletişimde belirtilmelidir.

Son kullanım tarihi geçtikten sonra kullanmayınız.

ÖZEL NOTLAR

1. Dişhekimliğinde kullanım içindir.
2. Dycal® katalizör pasta kalsiyum hidroksit içerir. Gözler ve cilt ile temasından kaçınınız. Kaza ile temas oluşması durumunda bölgeyi bol su ile durulayınız. Gözler ile teması halinde bol su ile derhal durulayınız ve hekime başvurunuz.
3. Dycal® baz pasta, gözler ve cilt için tahriş edici 1,3-bütülen glikol disalisilat içerir. Gözler ile teması halinde bol su ile derhal durulayınız ve hekime başvurunuz. Cilt ile teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız.

SUNUM ŞEKLİ

Dycal® CFC İçermeyen Basınçlı Paketler

611.07.002 Standart Paket, fildişi rengi
1 x 29 g baz
1 x 26 g katalizör
karıştırma kağıtları

Dycal® Tüpleri

611.05.501 Standart Paket, fildişi rengi
13 g baz + 11 g katalizör
karıştırma kağıtları

611.06.501 Standart Paket, dentin rengi
13 g baz + 11 g katalizör
karıştırma kağıtları

611.05.606 6'lı paket, fildişi rengi
6 x 13 g baz + 6 x 11 g katalizör
karıştırma kağıtları

611.06.606 6'lı paket, dentin rengi
6 x 13 g baz + 6 x 11 g katalizör
karıştırma kağıtları

Sorularınız için lütfen irtibata geçiniz:

AB-Yetkili Temsilcisi:

DENTSPLY DeTrey GmbH

De-Trey-Str. 1

D-78467 Konstanz

Telefon (0 75 31) 5 83-0

Distribütör:

DENTSPLY Limited

Hamm Moor Lane

Addlestone, Weybridge

Surrey KT15 2SE, Birleşik Krallık

Telefon (0 19 32) 85 34 22

...



Üretici:

DENTSPLY Caulk

Lakeview & Clark Avenues

Milford, DE 19963-0359, ABD

Telefon 1-800-532-2855

523006 (4/10/02)

AB-Yetkili Temsilcisi:

DENTSPLY DeTrey GmbH

De-Trey-Str. 1

D-78467 Konstanz

Tel. (0 75 31) 5 83-0