

Kullanım kılavuzu

Enhance®

Composite Finishing & Polishing System *Kompozit Bitim ve Cila Sistemi*

ENDİKASYONLARI

Enhance® Composite Finishing & Polishing System anterior ve posterior kompozitlerin veya tesviye gerektiren diğer alanların bitimlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tarif edilen şekilde kullanıldığında, bu sistem TPH® Spectrum™, Prisma® TPH®, ve Prisma® APH® Kompozitler ve SureFil™ Yüksek Yoğunluklu Restorasyon Maddeleri gibi hibrid kompozitlerde olduğu kadar mikrofil kompozit restorasyon maddelerinde de yüksek düzeyde cilalı bir yüzey oluşturacaktır. Enhance® bitim ve Cila Sistemi Dyract® AP gibi kompomerlerin bitimi ve cilanmasında da yararlıdır.

Dikkat: A.B.D. federal kanunları bu ürünün satışını yalnızca diş hekimleri ile sınırlandırmıştır.

BİLEŞİMİ

Enhance Finishing & Polishing Sistemi, Enhance® Finishing Diski, Konik Finishing Frezi, Sivri Uçlu Finishing Frezi, Enhance® Konik Cila Fırçası, Enhance® Konik Frez veya Fırça Mandreli, Prisma®-Gloss™ ve Prisma®-Gloss™ Extrafine Cila Patlarından oluşmaktadır.

KONTRENDİKASYONLARI

1. Enhance Finishing & Polishing Sistemi Diskleri, Konik Frez, tek kullanımlık Fırçaları ve Sivri Uçlu Frez veya Fırçaları dispozal olarak tavsiye edilir. Bu ürünlerin sterilize edilmesi performanslarını olumsuz yönde etkileyebilir.
2. ENHANCE® bitim DİSKLERİ, SİVRİ UÇLU FREZLERİ VE KONİK FREZLERİ YÜKSEK DEVİRLİ SİSTEMLERLE KULLANILMAMALIDIR.

ÖNLEMLER

1. Bir mikrofilli kompozit restorasyon cilalıyorsanız, cilalama işlemi sadece Prisma®-Gloss™ uyguladıktan sonra tamamlanacaktır. Prisma®-Gloss™ Extrafine kullanmanız gerekli değildir.
2. Döner aletlerin tümünde olduğu gibi, Enhance® finishing aletleri de uzun süreli temasta ısı oluşacaktır. Dolayısıyla bu aletleri aralıklı basınç uygulayarak kullanın.
3. Enhance® Polishing Cup konik cila fırçasının düz yüzü ve köşe kenarı kullanılır. Fazla yanal basınç uygulanırsa, fırça mandrelden çıkabilir
4. Hastaların yaralanmasını önlemek için döner aletlerin iyi kontrol altında tutulmasına dikkat edilmelidir.

İŞLEM SIRALAMASI

1. AŞAMA: Restorasyonu veya kompozit veniri standart tekniklere göre yerleştirin. Prisma® Finishing Frezlerini veya elmas tesviye aletleri kullanarak restorasyonun kaba tesviyesini tamamlayın ve genel kontürlerini belirleyin.

2. AŞAMA: Klasik devirli bir angıldruvaya bir Enhanced® Tesviye Aleti (Disk, Sivri Uçlu veya Konik Frez) takın ve bitim işlemine devam den. NOT: ENHANCE® DİSKLER, SİVRİ UÇLU VE KONİK FREZLER YÜKSEK DEVİRLİ PİYESAMENLERDE KULLANILMAMALIDIR. Enhance® Tesviye Aletlerinin aşındırma gücü kompozit yüzeyine uygulanan basınçla kontrol edilir. Basınç ne kadar yüksek olursa, o kadar fazla madde kaldırılır; basınç hafif olursa, madde kaldırmadan yüzey düzlenecektir.

3. AŞAMA: Mandrelin süngü ucunu konik fırçanın dar ucundaki delikten sokarak ürünle birlikte verilen mandrelle bir Enhanced® Konik Cila Fırçası takın. Mandrelin ¼ tur döndürülmesi konik fırçanın takılmasını kolaylaştırır. Mandrelin fırçaya tam olarak girmesine dikkat edin. Mandrelle klasik devirli bir angıldruvaya takın.

4. AŞAMA: Enhance® Konik Cila Fırçasının yüzeyine küçük bir miktar Prisma®-Glos™ Pat koyun. Restorasyonunun yüzeyinde başlangıçta kuru olarak, orta devirde ve basınçta çalışın.

5. AŞAMA: Yüzey parlaklığını arttırmak için, patı sulandırmak amacıyla hafif dairesel parlatma hareketiyle KÜÇÜK MİKTARLARDA (yani, damla damla) SU EKLEYİN. Düzgün bir yüzey oluşturmak için bu işlemi gerektiği kadar tekrarlayın.

6. AŞAMA: Prisma®-Gloss™ Patı dış yüzeyinden ve Enhance® Konik Cila Fırçasından yıkayarak temizleyin. MİKROFİLLİ KOMPOZİT RESTORASYONLAR İÇİN BU SON AŞAMADIR. TPH® Spectrum™, Prisma® TPH®, ve Prisma®-AP.H® Composite ve Dyract® AP Compomer gibi melez kompozit malzemelerde işleme devam edin.

7. AŞAMA: Enhance® Konik Cila Fırçasına, 4. aşamada tarif edilen şekilde Prisma®-Gloss™ Extrafine Paste uygulayın ve nihai parlaklık için yüzeyi hafif hareketlerle parlattın. Cilalamaya devam etmek için su ekleyin. 20-30 saniye süreli cilalama sonrasında yüksek düzeyli bir parlaklık hızla elde edilmelidir. Tüm yüzeyleri yıkayın ve kullandıktan sonra Enhance® Konik Cila Fırçasını atın.

TEKNİK İPUÇLARI:

1. Enhance® Diskin aşındırma gücü kompozit yüzeyine uygulanan basınçla kontrol edilir. Basınç ne kadar yüksek olursa, o kadar fazla madde kaldırılır; basınç hafif olursa, madde kaldırmadan yüzey düzlenecektir.
2. Enhance® Sivri Uçlu Bitim Frezleri posterior oklüzal ve konkav lingual yüzeyler için idealdir. Enhance® Konik Bitim Frezleri servikal ve proksimal hattaki köşeli alanlar için çok uygundur.
3. kullanılmadan önce, Enhance® Konik Cila Fırçası yüzeyine pat sürülmesi cilalama etkinliğini büyük ölçüde artırır ve sıçramayı büyük ölçüde azaltır. Bu işlem konik fırça yüzeyinde ince ve yapışkan bir pat filmi oluşturur. Pat emdirilmiş konik fırçayı düşük devirde kuru olarak kullanın; 30-60 saniye sonra, dişe ve konik fırçaya az miktarda su uygulayın. Daha iyi bir yüzey parlaklığı elde etmek için, 30-60 saniye daha düşük devirde cilalayın.



1a. nhance® Disk ile bitim



1b. Enhance® Disk ile bitim



1c. Enhance® Disk ile bitim



2. Mandreli konik fırçanın dar kenarındaki deliğe sokun.



3. Konik fırçaya Prisma®-Gloss uygulayın.



4. Orta basınçta kuru cilalayın.



5. Su ekleyin ve basıncı hafifletin.




6. Dişi ve konik fırçayı yıkayın.



7. Konik fırçada Prisma®-Gloss™ Extrafine uygulayın ve cilalayın



8. Su ekleyin ve basıncı hafifletin.

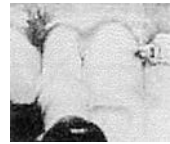

9. Patı yıkayarak çıkarın, konik fırçayı atın.



10. Disk, Konik ve Sivri Uçlu olmak üzere 3 şekilde bulunur.

İmalatçı
DENTSPLY Caulk
DENTSPLY
International Inc.
Milford, DE 19963-0359
U.S.A.

Yetkili AB Temsilcisi
DENTSPLY DeTrey
GmbH
D-78467 Konstanz
Almanya

İsviçre Temsilcisi
DENTSPLY DeTrey
GmbH,
Konstanz
Zweigniederlassung
Baar Oberdorfstrasse 11
CH 6342 Baar