

NRC

0123

606.15.400 DeTrey NRC Yıkama gerektirmeyen kondisyoner.

606.15.400 NRC Refill

1 şişe NRC, 4,5 ml.

NRC kondisyoner likit, Dyract® kompomer restorasyonlarında mineye artırılmış adezyonun arzu edildiği durumlarda Prime&Bond® NT adeziv ile kullanılmaktadır.

NRC mine ve dentinin yıkama gerektirmeyen tek bir uygulama ile kimyasal olarak hazırlanmasını sağlamaktadır.

KOMPOZİSYON

Solüsyon içerisinde organik asit ve monomerler

ENDİKASYONLARI

NRC, Prime&Blond® NT adeziv ve Dyract® kompomer uygulamalarından önce listelenmiş, durumlarda kullanılır.

- Strese maruz Klas I ve II kalıcı Dyract® AP restorasyonlarında,
- Klas IV Dyract® AP restorasyonlarında,
- Estetik nedenlerle eğimli mine marjlerinin tercih edildiği kalitelere NRC tüm diğer Dyract® uygulamaları ile istenirse kullanılabilir.

KONTRA – ENDİKASYONLARI

- Dentinin pulpaya olan uzaklığının 1mm.'den az olduğu durumlarda,
- Prime&Bond Nt dışındaki adezivlere kullanımı kont-endikedir.

UYARILAR

NRC yanıklara neden olabilecek organik asitler içermektedir. Gözle, ciltle, oral dokularla temas ettirilmemelidir. Kontakt gerçekleşirse bol su ile yıkanmalıdır, göz ile kontakt durumunda ise bol su ile yıkanmalıdır ve hekime başvurulmalıdır.

Diğer Diş Hekimliği Ürünleri ile Etkileşim

Bazı kaide maddeleri ve bazlar NRC ile yüzeysel olarak asitlenebilir ancak bu ürünün bariyer fonksiyonunun engellemektedir.

KULLANIM

1. Temizlik

Güçlü adezyon elde etmenin temel şartı doğru kavite temizliğidir. Kavite hazırlığını gerektirmeyen durumlarda diş yüzeyini Nupro®Prophy pasta ile temizleyin. Frezle yaratılan yeni diş yüzeyi mineye bonding gücünü önemli ölçüde arttırmaktadır. Diş yüzeyini hava-su şırıngası ile yıkayın. Hava şırıngası ile uygulanan suyu uzaklaştırın ve dentin yapısını kurutmamaya özen gösterin.

2. Pulpanın korunması

Direkt/indirekt pulpanın korunması için dentinin pulpaya 1 mm'den yakın olduđu durumlarda kalsiyum hidroksit liner (Dycal®) uygulayın ve geri kalan kavite yüzeyini Prime&Bond NT ile bondin uygulaması için bırakın.

3. NRC'nin uygulanması

1. NRC materyalini Dentsply uygulama kabına koyun.
2. Yeterli miktarda NRC materyalini uygulama çubukları ile mine ve dentine uygulayın. 20 sn. bekleyin, yıkamayın.
3. Fazla NRC materyalini hava şırıngası ile veya rulo pamuk ile uzaklaştırın. Dentini fazla kurutmayın. Tükürük ile kontaminasyonun gerçekleşmemesine dikkat edin eğer gerçekleşirse su spreyi ile temizleyin ve NRC'yi tekrar uygulayın.

4. Prime&Bond® NT uygulaması

Tek bir kat uygulanır.

1. Prime&Bond NT adesivi Dentsply uygulama kabına veya uygulama fırçasına koyun.
2. Yeterli miktarda Prime&Bond NT'yi tamamen uygulama yüzeylerini ıslak bir şekilde kaplayacak şekilde diş yüzeyine uygulayın.
3. 20 sn. bekleyin
4. hava şırıngası ile 5sn. süre ile solventi uzaklaştırın. Diş yüzeyi parlak görünüm almalıdır. Eğer istenilen görünümü almazsa 2-4. uygulama adımlarını tekrar edin.
5. Minimum 10 sn. süre ile ışıkla polimerize edin.
6. Dyract® AP kompozit restoratif ışıkla polimerize edilmiş olan Prime&Bond® NT adesivin üzerine hemen uygulayın.

SAKLAMA ŞARTLARI/RAF ÖMRÜ

24 derecenin üstünde oda sıcaklığında muhafaza edilmemelidir.