

Buharlı Temizleyici

Kullanım Kılavuzu

DİKKAT:

BU CİHAZI UYGUN BİR YERE YERLEŐTİRİN

Carlo De Giorgi Srl

Via Tonale 1 - 20021 Baranzate di Bollate (MI) İtalya

Tel: +39 02 3561543 Faks: +39 02 3561808 İnternet www.degiorgi.it

ÇİZİM	KOD	AÇIKLAMA
1	3104001	TAM TABANCA + HORTUM + NOZÜL SETİ
1T	3104001/T	BUHAR HORTUMU 1.8 MT
1N	3104001/N	BUHAR NOZÜLÜ KOMPLE SET 4 ADET
2	3104002	TELLİ ELEKTRİKLİ PEDAL
3	3104003	PLASTİK SAP
4	3104004	SAP SABİTLEME VİDALARI 2 ADET
5	3104005	DAHİLİ HORTUM
6	3104006	AZALTMA 3/4 M – 1/2 F
7	3104007	HUNİ
8	3104008	EMNİYET VALFLİ TİKAÇ
9	3104009	REGÜLATÖRLÜ ELEKTRİKLİ VALF
11	3104011	SİLİKON DİSK CONTASI
12	3104012	VALF SOMUNU
13	3104013	ELEKTRİKLİ VALFİN ALTINDA SİLİKON CONTA
14	3104014	BOYALI DOĞRAMA KAPLAMA
14A	3104014/A	PASLANMAZ ÇELİK DOĞRAMA KAPLAMA
15	3104015	FİTING AÇISI BAĞLANTISI
16	3104016	AZALTMA FİTING BAĞLANTISI
17	3104017	ISITMA ELEMANI ÇELİK VİDA 4 ADET
18	3104018	KOMPLE SEVİYE TUTUCU
19	3104019	SEVİYE CONTALARI 2 ADET
20	3104020	SEVİYE SABİTLEME SOMUNU
21	3104021	CAM PIREKS SEVİYE
21	3104021/G	CONTALI CAM PIREKS SEVİYE
22	3104022	İÇ AYDINLATMA ASKISI
23	3104023	İÇ AYDINLATMA 15W
24	3104024	ALT SEVİYE SOMUNU 3/8
25	3104025	KAYNAK BAĞLANTILI BORU
26	3104026	METAL HORTUM ASKISI
27	3104027	BASINÇ GÖSTERGESİ
28	3104028	KABLOLU VALF KONEKTÖRÜ
29	3104029	ÖN PANEL
30	3104030	KOMPLE ELEKTRİK TESİSİ
31	3104031	ELEKTRİK AÇMA ANAHTARI 1 ADET
32	3104032	KAZAN SABİTLEME VİDALARI 3 ADET
33	3104033	ISITMA IŞIĞI
35	3104035	6 KONUMLU KONEKTÖR
36	3104036	ÖN PANEL SABİTLEME VİDASI 4 ADET
37	3104037	ELEKTRİKLİ PEDAL ASKISI
38	3104038	GİRİŞ KABLOSU ASKISI
39	3104039	ELEKTRİK KABLOSU 3 X 1.5
40	3104040	BUHAR TABANCASI ASKISI
41	3104041	BAĞLANTILI KOMPLE KAZAN
42	3104042	KAZAN TERMO YALITIMI
43	3104043	BOYALI DOĞRAMA KAİDE
43A	3104043/A	PASLANMAZ ÇELİK DOĞRAMA KAİDE
44	3104044	KAZAN ALT BOŞALTMA SOMUNU
45	3104045	KAUÇUK AYAK 4 ADET
46	3104046	KAUÇUK AYAK SABİTLEME VİDASI 4 ADET
47	3104047	SEVİYE TUTUCU METAL HALKA 2 ADET
49	3104049	ÖN SABİTLEMELİ BASINÇ REGÜLATÖRÜ MAKSİMUM 5 BAR
50	3104050	ELEKTRİKLİ VALF KABLO ASKISI
51	3104051	TABANCA ASKISI İÇİN SOMUN
53	3104053	RÖLELİ ELEKTRONİK KARTI
54	3104054	BASINÇ GÖSTERGESİ SABİTLEME METAL HALKASI
57	3104057	ISITMA ELEMANI CONTASI
58	3104058	ISITMA ELEMANI 1500 WATT
59	3104059	TERMOSTATİK KONTROL CİHAZI
60	3104060	ELEKTRONİK KONDANSATÖR STARTERİ
61	3104061	SİGORTA 10 AMP
62	3104062	SİGORTA TUTUCUSU

Görsel Talimatlar

Bu cihazı kurup çalıştırmadan önce talimat broşürünü dikkatlice okuyunuz

Resim 1: Buhar tabancası hortumunu takın

Resim 2: Tabanca tutucusunu takın

Resim 3: Pedal konektörünü takın

Resim 4: Fişi takın (voltajı kontrol edin)

Resim 5: Basınç OLMADIĞINI kontrol edin.

Resim 6: Kapağı aşağı bastırın

Resim 7: Yavaşça kapağı sökün

Resim 8: Son düğmeyi açın

Resim 9: Havanın dışarı çıkması için pedala basın

Resim 10 ve 11: Huniyi takın ve demineralize suyu MAX seviyesine kadar doldurun

Resim 12: Sol düğmeyi kapatın

Resim 13: Sağ düğmeyi açın

Çalıştırmadan önce talimat broşürüne bakın.

SEÇİMİNİZ İÇİN TEBRİK EDERİZ!!

Bu cihazı seçerek çalışmanızı kolaylaştıracak özellikle güvenilir bir ürün satın almış bulunuyorsunuz.

Bu ünite, TUV kalite markasıyla verilmektedir ve 89/392/CE direktiflerine uygundur, bu nedenle CE işaretine kabul edilmiştir:

CE

ÖNEMLİ!

Cihazı kurmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve daha sonra bakmak için saklayın.

UYARI

Bu kılavuzda belirtilen bütün gösterimleri dikkatlice takip edin. Bütün bakım işlemleri sırasında güç kablosunu elektrik prizinden çekin ve/veya sıkıştırılmış hava ve/veya su sıçramasını ve/veya dış parçaların cihaza sıçramasını önleyin. Bakım işlemleri sırasında üniteye yabancı cisimleri sokmayın. Yalnızca doldurma işlemleri ve/veya bakım için ekipmandaki aksesuarları çıkarın. Kılavuzda belirtilenler dışında farklı bakım işlemleri yapmayın. Bu kılavuzdaki işlemler yapılmazsa risk içerebilir. Bu tipte işlemler için teknik servisle görüşün. Üniteyi açıp güç kablosunu elektrik prize takmadan önce cihazın arka bölümüne yerleştirilen üretim plakasında gösterilen voltaja uygun olup olmadığını kontrol edin.

DİKKAT:

- **Güç kablosu takılıyken herhangi bir bakım işlemi yapmayın: ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİ!!!**
- **Yalnızca orijinal yedek parçaları kullanın. Orijinal yedek parçaların kullanılmaması garanti kapsamı dışına çıkmasına neden olabilir, ayrıca cihazın normlara olan uygunluğunu bozabilir ve kullanıldığında tehlikeli olabilir.**
- **Ünitenin kurulumu, bakımı ve kullanımıyla ilgili temel bilgiler için müşteri servisiyle görüşün.**
- **Elektrikli valf gövdesine dokunmayın – UYARI: SICAK YÜZEY**

Buharlı Temizleyici

AMBALAJIN AÇILMASI

Cihazın alınması sırasında ambalajın sağlam olup olmadığını kontrol edin. Arka tarafta KALİTE KONTROLDEN GEÇMİŞTİR yazan sarı yapışkan plakanın bulunup bulunmadığına bakın, kontrol kodu üzerindedir. Ambalajda bütün parçaların ve bir dizi aksesuarın cihazla birlikte bulunup bulunmadığını kontrol edin: 4 hortum setli buhar tabancası, su doldurma hunisi, tabanca takma çubuğu, elektrikli pedal, kullanıcı dokümanları ve garanti.

KURULUM

Üniteyi ambalajından çıkarın ve (suyla birlikte 14 kg) ağırlığını taşımaya yetecek güçlü düzgün bir yüzeye yerleştirin. Elektrik pedalını (ref. 2) ünitenin üst tarafına yerleştirilmiş uygun çıkışa takın. Tabanca tutma çubuğunu takın ve uygun yere vidalayın (ref. 40). Buhar tüpünü (ref. 1) elektrikli valfin uygun manşonuna (ref. 9) bağlayın ve verilen bantla uygun şekilde sabitleyin. Ana fişi elektrik prizine takın.

DİKKAT: cihazın arka bölümüne yerleştirilen üretim plakasında gösterilen voltaja uygun olup olmadığını kontrol edin. Üniteyi ve iç su seviyesi ışığını açmak için sol taraftaki güç anahtarını pozisyon 1'e getirin (ref. 31 SX). Işık basıncını aşağı doğru getirerek doldurma tıkaçını çıkarın (ref. 8); sonra ünitenin ön panelinde gösterilen maksimum seviyeye ulaşınca kadar kazanı demineralize suyla doldurun. Kapatmak için tıkaçı (ref. 8) yivli yükleme deliğine takın. Şimdi sol anahtarı açın ve ısıtmayı başlatmak için sağ anahtarı (ref. 31 DX) açın; ısıtma elemanının ateşleyicisi her iki anahtarın sol tarafına yerleştirilen kırmızı ışıkla (ref. 33) işaretlenmiştir. 3.5 bar basınca ulaşıldığında kırmızı ışık otomatik olarak söner, şimdi ünite çalışmaya hazırdır. Çalıştırma sırasında buhar dökülme pedalına bastırılarak içindeki hava kabarcıklarının çıkmasına izin verilerek olası kaynama sesi duyulabilir. Tabancanın buhar çıkışını (ref. 1) elde etmek için (su seviye ışını açmak için yapılan işlemle aynı şekilde) soldaki anahtarı açın, sonra önceden bağlanan elektrikli pedala (ref. 2) basın. Elektrikli valfin (ref. 9) tabanına yerleştirilen regülatör tutucu sapı döndürerek buhar akışını düzenleyin. Başlangıç buhar kapasitesi çok kısa olabilir, tekrar basınç elde edilinceye kadar birkaç dakika bekleyin, sonra sürekli buhar çıkacaktır. Buharlamayı bitirdiğinizde pedalı ve elektrikli valfi çıkarmak için soldaki anahtarı kapatın. Gün sonunda basıncı boşaltmadan sağdaki ana düğmeyi kapatın.

BAKIM

Su seviyesini kontrol edin: ünitenin su seviyesinin ön panelde gösterilen minimum seviyenin altında olmayacağı şekilde açılıp açılmadığını her zaman kontrol edin. Su seviyesi çok düşükse aşağıdaki su doldurma işlemlerini uygulayarak kazanı doldurun (bakınız madde 6-7-8).

- **Kazanda kalsiyum tortusunun temizlenmesi:** Her 6 aylık çalışmadan sonra kazandaki kalsiyum tortusunun temizliği şu işlemlerle yapılmalıdır: cihazın soğuk olup olmadığını ve iç basıncın olmadığını kontrol edin. Güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın (ref. 39). Cihazı sol taraftaki tezgaha yerleştirin. Cihazın içinde suya batmaması için tamamen çıkartmadan kazanın tabanının (ref. 54) altına yerleştirilen somunu çıkarın. Cihazın altına bir leğen ya da en az 5 litre kapasiteli bir kap yerleştirin. Somunu kazandan tamamen sökün ve bunu orta kısımdan tamamen çıkarın. Şimdi tıkaçı çıkarın (ref. 8) ve kalan suyun tamamen

boşalmasını sağlayın. Kazanı yıkamak için 3/1 litre suyu huniden içine dökün. Sonra fazla sıkmadan somunu kazanın altına tekrar takın, (yaklaşık 8/9 tam dönüşle) yive teflon bandı yerleştirin. Şimdi güç kablosunu cihaza tekrar takın ve kazanı her zamanki yine demineralize suyla doldurun.

GENEL SORULAR REHBERİ

Cihaz açılmıyor:

1. Güç kablosunun elektrik prizine uygun şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
2. Elektrik prizinde elektrik olup olmadığını kontrol edin.

Göstergede gösterilen basınçla ilişkili olarak buhar akışı az

Elektrikli valfe (ref. 9) yerleştirilen buhar regülatörü tutma sapının tamamen açık olup olmadığını kontrol edin.

Isınma başladığında kazandan güçlü bir su kaynama sesi geliyor (nadir çalışma)

Hava kabarcıklarının dışarı çıkması için doldurma kapağını yavaşça açın.

Basınç elde edildikten sonra buhar sınırlı bir süre çıkıyor:

Makine bileşenleri soğuk, bütün iç parçaların ısınması için gereken süre boyunca bekleyin (buhar çıkışı olmaksızın 3.5 barda 15-20 dakika)

Bu kontrolleri yapın, cihazın hala arıza göstermesi durumunda müşteri teknik servisiyle görüşün.

ÖZELLİKLER

W/Hz 230/50 – 60 veya 110/50

Emilim 1500 Watt

Ağırlık 10 Kg

Dahili sigorta 10A (110 V için 20 A) – sigortanın değiştirilmesi durumunda teknik yardım isteyin.

EBATLAR

Yükseklik 50 cm En 22 cm Derinlik 30 cm

NOTLAR

Cihazın harici temizliği için suyla ıslatılmış pamuklu bir havlu kullanın.

Cihaz, 0° ila 35°C laboratuvar sıcaklığında çalışabilir.

Gürültü seviyesi (1 m): standby 26.6 db, ısınma 37.5 db, buharla temizlik 68.7 db

Bar/Hpa cinsinden Maksimum Basınç (Kilopaskal): 3.5/350