

CERAMFİL MOLAR KULLANIM KLAVUZU

Küçük Posterior Kaviteleler için Yoğunlaşan Cam İyonomer Restoratif

Sunum

Toz ve likitten oluşan 2 parçalı ve hızlı kıvam bulan materyal. Bu materyal küçük kaviteleler için önerilir ve tek başına ya da düşük stresli posterior dişlerin kalıcı restorasyonlarında diğer kompozitlerle birlikte kullanılabilir. Görev süresi boyunca istikrarlı bir yapıda kalır. Son haini aldığında sert, yüksek kompresif güç üreten bir dolgudur.

Özellikleri ve Faydaları

- İlk başta sabun kıvamındadır. Daha sonra yüksek bir kompresif dayanıklı güç üretecek kıvama gelir.
- Kolay kullanım için macun kıvamını alır.
- Kimyasal olarak hem mineye hem de dentine yapışır.
- Dişe yerleştirilmesinin ardından hızlıca doğal PH seviyesine erişir.
- Çürümeyi önlemek amacıyla florid (florür) iyonları yayar.
- Diş yapısı ile bio-uyumludur.
- Toz/likit karışımıdır. Toz likitle kolayca karışması için özel işlenmiştir.
- Özellikle küçük posterior kaviteleleri doldurmak için kullanışlıdır.
- ISO 9917:1991 Restorative standardı ile uyumludur.

İçerik

25 gm Toz
15 ml Likit
Toz ölçeği
Karıştırma pedi
Kullanım kılavuzu

Karıştırma ve Koyulaşma (Setting) Süreleri

Karıştırma Süresi	30 saniye
Çalışma süresi	3 dakika
Başlangıç Koyulaşma(Setting) Süresi	6 dakika
Ortam Isısı	23°C: Bağlı Nem %50

Daha yüksek ısılar ve daha düşük bağlı nem oranları çalışma süresini ve yoğunlaşma süresini azaltmaktadır.

Karıştırma Oranı

Toz / Likit Oranı: 0.3/1 1 gr tozu 0,3 gr likitle karıştırın. Önerilen karıştırma oranları; 4 kaşık toza 3 damla likit veya 0.4 gr toza 0,12 gr likit ve aynı orana sadık kalan karışımlar.

Karıştırma Metodu

Her kullanımdan önce toz kutusunu iyice sallayınız. Kutunun kapağını açmadan önce biraz bekleyiniz. Ölçeği kullanarak bir miktar tozu şişeden, silme ölçek miktarı çıkarın ve karışım pedinin üzerine yerleştirin. Gerekli toz miktarına ulaşana kadar işlemi tekrar edin. Likit şişesinin kapağını açın. Şişeyi ters çevirerek gerektiği kadar damlayı ped üstüne damlatın. Kullanımın hemen ardından kapağı kapatarak şişe içerisindeki likitin buharlaşmasının ve şişenin ağzının tıkanmasının önüne geçin. Plastik veya metal bir spatula yardımı ile toz ve likiti karıştırın. Ped üstündeki tozu yavaş yavaş karışıma yedinir ta ki karışım bir macun kıvamını alsın. Karıştırılan materyal parlak bir yüzeye sahip olmalıdır. Bu durumdaki karışım hemen kullanmaya hazırdır. Kurulanmış kaviteyi bir fulvar yardımı ile tam olarak doldurun. Bu işlemi karışımın çalışma süresi içerisinde tamamlamanız çok önemlidir. Başlangıç koyulaşma süresinin sonuna gelinmeden karışıma dokunmayın. Fazlalık kısmını atın ve PSP Vernik ile tamamen üzerini kaplayın. İnce polisaj taşı ile oklüzal yüzeyi düzeltebilirsiniz.

Notlar

Bitim esnasında iyonomeri kazımamaya, deşelememeye veya oymamaya azami dikkat gösterin. Dolumu gerçekleştirmeden önce açıkta bulunan pulpayı Kalsiyum Hidroksit (PSP Recal) ile kapatın. PSP Cam İyonomerin açıkta kalmış dentin/mine yüzeylerine pamuk ile 10 saniye uygulayın. Su ile durulamak ve kurutmak açıkta kalmış diş yapısı ile moleküler yapışmanın etkisini artırır. Bir rubber dam veya retraksiyon ipi oral sıvı/nem ile kirlenmesini engeller. Kirlenmiş alanı pomza veya yağsız Profi Pasta (PSP Prophyl Paste) kullanarak temizlemek gerekebilir. Fakat en önemlisi karışımın ağız içerisine çalışma süresi içinde yerleştirilmelidir.

Uyarılar

Karıştırma spatulası kullanımın hemen ardından su ile yıkayın ve kurulaşın. Böylece materyalin yüzeye yapışıp kalmasını engellemiş olursunuz. Ceramfil Molar, poliakrilik asit tozu ve likiti içerir. Göz ve deri ile temasından kaçının. Bol su ile yıkayın, kazara olmuş olan temaslarda, gerekirse medikal yardıma başvurun. Tozu solumaktan kaçının çünkü teneffüs yollarına zarar verebilir. Toz şişesi kurutucu bir kapsül içerir. Bu kapsülü şişe içerisinde çıkarmayın veya kırarak açmayın.

Saklama

Toz higroskopiktir. Şişeyi her zaman kapalı tutunuz. Kurutucu kapsülü çıkarmayın. Likitin buharlaşması şişe ağzında kalıntı bırakır. Kullanımın ardından kapağı sıkıca kapatın. Materyali serin ve kuru yerde muhafaza edin. Dökülmüş likiti emici bir bez ile silin. Yüzeyi yıkayıp kurulaşın. Dökülmüş tozları bir eldiven giyerek dikkatlice temizleyin.

CERAMFIL MOLAR

Yenilikçi Mikro cam İonomer Restoratif

Yoğunlaştırılabilir Toz ve Likit Formül

Yüksek Kuvvetli mikro cam İonomerli Toz & Likit

Posterior dişlerin restorasyonunda ve Brisk Snap Seti. Travma görmüş dişlerin restorasyonunda kullanımı idealdir. Yüksek Estetik görünüm sunar.

1028 – Paket içeriği

25 gr Universal Tonlu toz, 15ml Likit, Toz ölçeri ve karıştırma pedi.