

PSP ENDODENT P

Endodontik tedavi boyunca radyopak kök dolgu malzemesi olarak kullanılan malzeme.

Kullanımı:

Karıştırma oranı

2 ölçü kaşığı toz + 2 damla likit.

Toz ve likidi karıştırma pedinin üzerine koyun. Küçük miktarlarda tozu likidin içine yavaş yavaş ve tozun tamamı likitle karışana kadar ve düzgün bir kıvama gelene kadar karıştırın. Malzeme kullanıma hazırdır.

Kök Dolgusu:

Uygun bir lentulo ile karışımından birazını alın ve kuru, hazırlanmış kök kanalına normal bir endodontik tedavide olduğu gibi sürün. Kökün apeks bölgesinin dışında bu pastayı periapikal bölgeye sürmemeye özen gösterin. Endodont P radyopak ve radyaografilerde çok iyi görünen bir malzemedir.

Sunum:

20 gr toz

20 ml likit

karıştırma ped ve kaşığı

Formül:

Toz:

Ac. Hidro kortizon	: 0.5 gr.
Para formaldehid	: 1 gr.
Kloro heksidin HCL	: 10 gr.
Thymol Iodide	: 10 gr.
Titanyum di oksit	: 10 gr.
Barium Sülfat	: 13 gr.
Çinko oksit q.s.p.	: 100 gr.

Likit:

Asetik asit	: 0.5 gr.
Ojenol q.s.p.	: 100 gr.

Endikasyonlar:

Sadece profesyonel dental kullanım – antiseptik kök kanal dolgu ve yalıtıcı malzemesi olarak kullanılmak üzere.