

TEMPLIN

Hızlı donan, geçici çinko oksit/eugenol restoratif ve temel malzeme

Giriş

Kaliteli ham maddelerden formüle edilmiştir. Templin bir çinko oksit/eugenol sement olarak pek çok faydalı özelliğe sahiptir. Çok ince çinko oksit partiküllerinin yüzey işlemi, tozun topaklanmamasına olanak sağlar. Bu nedenle açık sarı sement güvenilir bir işleme süresi ile kolayca bir homojen karışım sağlar. Manipülasyonu takiben sement sertleşir ve geçici giydirme, taç sementi, boşluk astarı ve dolaylı macun kapağı olarak yüksek kompresif mukavemet gösterir. Templin'in ağız sıvılarında düşük erime özelliği, geçici dolgular için dayanıklı bir sement anlamına gelir.

Kontur Endikasyonları

Doğrudan macun kapağı olarak kullanılmaz.

Kullanım Talimatı

Templin sement depolama veya taşıma esnasında sertleşme eğilimi gösteren ince bir tozdur. Bu nedenle kullanım öncesi kaba birkaç defa tersine çevirerek tozun gevşemesi sağlanmalıdır.

İlave Bilgiler

Yüksek sıcaklık dereceleri ve nem (yani malzeme ağza konulduğu zaman) sertleşmeyi hızlandırır. Karıştırılmış malzemenin sürekli manipüle edilmesi sertleşme süresini uzatır ve kesin sertleşme mukavemetini zayıflatır.

Karışım Oranı

Laboratuar değerlendirmesi için sementin optimal miktarları 0.3 g Templin tozunu 0.08 ml Templin sıvısı (yaklaşık 3 dispanser damlası) ile karıştırarak elde edilir. Ancak genel kullanım durumunda en iyi karışım oranı kullanıcının tercihine göredir.

Karıştırma

Karıştırma işleme 23 °C altında bir cam levha veya bir kağıt pad üzerinde yapılmalıdır. Toz giderek küçülen dört bölüme ayrılmalı ve sonra en küçük kısımdan başlayarak sıvının içine karıştırılmalı ve böylece karışım 45 saniyede tamamlanmalıdır. Optimal karışım yapışkan olmayan düzgün bir özellik göstermelidir.

Uygulama

Karıştırmayı takiben çalışma süresi için 2 dakikalık bir zaman vardır (yani sement hala parlak görünürken işlem yapılmalıdır). Sonra bir dakika içerisinde sertleşmeye başlayacaktır.

Dikkat

Reçineli (kompozit) dolgular ile kullanılmamalıdır.

Özel Not

Sadece dişçilikte kullanılmak içindir. Cilde ve gözlere temas ettirmeyin. Temas halinde bol su ile derhal yıkayın. Tahriş veya acıma görülüyorsa tıbbi yardım isteyin.

Depolama

Kullanımdan sonra kapağı sıkıca kapatın. Serin ve kuru bir yerde doğrudan güneş ışığından uzakta depolayın. Buzdolabı gerekli değildir.

Muhteviyatı

Paket ölçüsü ve muhteviyatı ile ilgili bilgiler için dış ambalaja bakın.

UYGUNLUK STANDARDI

ISO 3107:1998, Tip III, Sınıf I

Geçici restoratif ve temel malzemeler için

Üretici Firma

P S P DEntal Company Ltd.

3-5 Dylan Road, Belvedere

Kent, Da17 SQS, UK

Tel: +44 (0) 20 8311 7337

Fax: +44 (0) 20 8310 0920