

TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

ELİTE HARD RELINING

SERT BESLEME

KULLANIM PROSPEKTÜSÜ

- RENK

T4-PEMPE

- İÇERİK

SELF-CURE AKRİLİK REZİN MADDE İÇERİĞİ

TOZ: POLYMETHYL METHACRYLATE

LİKİT : 1,6 HDDMA, N,NDMPT (%0,5)

- KULLANIM ALANI

TOTAL VE PARSİYEL PROTEZLER

- UYARILAR

İÇERİĞİNDE METHACRYLATE REZİN BULUNMAKTADIR, BU MATERYALE ALERJİK REAKSİYON GÖSTEREN KİŞİLERDE KULLANILMAMALIDIR.

- HAZIRLAMA

PROTEZ HASTA AĞZINDAN ÇIKARILARAK KONTAK NOKTALARI BELİRLENMELİDİR. ELİTE HARD RELINING CONDİTIONER İLE BU NOKTALARA 2-3 DK UYGULAMA YAPILMALIDIR. UYGULAMA ÖNCESİ TÜKÜRÜK VE SIVI UZAKLAŞTIRILMALIDIR. UYGULANACAK BÖLGEYE LİKİT VAZELİN KULLANILABİLİR.

- DOZAJ VE KARIŞTIRMA

DOĞRU KARIŞIM ORANI 1,4 ML LİKİT (1,22 GR) / 1 KAŞIK TOZ (2,2 GR) . TOZ İLE LİKİT SPATULA YARDIMI İLE 10 SANİYE KARIŞTIRILMALIDIR.

- APLİKASOYON

FİRMADAN TEMİN EDEBİLEĞİNİZ SPATUL YARDIMI İLE KONTAK NOKTALARINA HAZIRLANMIŞ OLAN AKRİLİĞİ UYGULAYIN. YAKLAŞIK 1 DK BEKLEDİKTEN SONRA TAŞAN VEYA FAZLA KISIMLARI FREZ YARDIMI İLE DÜZELTİN. HASTA AĞZINA UYGULAYIP 48 SAAT SONRASINA KONTROL RANDEVUSU VERİN.

- BİTİRME

CİLALAMA VE PARLATMA İŞLEMİ YAPIP RENK UYUMUNU KONTROL EDİNİZ.

- PAKET İÇERİĞİ

1 PAKET TOZ 60 GR + 1 ŞİŞE LİKİT 40 ML + 1 ŞİŞE CONDİTIONER 10 ML