


BESLEME MATERYALI

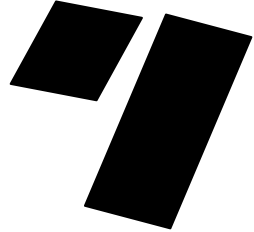

Elite Soft Relining

Kullanma Kılavuzu

Zhermack SpA

Via Bovazecchino, 100

45021 Badia Polesine (Rovigo) Italy

Tel. +39 0425 597611- fax-+39 0425 53596

www.zhermack.com- info@zhermack.com

ELITE SOFT RELINING / ELITE SUPER SOFT RELINING ürünleri hareketli, parsiyel ya da tam protezlerin **polymethylmethacrylate** bazlı yumuşak beslemesi için tasarlanmıştır.

Kullanımı kolay, hem direkt hem de indirekt teknikli restorasyonlarda kullanılır.

İÇERİK

ELITE SOFT RELINING / ELITE SUPER SOFT RELINING çift komponentli, kendiliğinden polimerize olan kartuş içinde ilave silikon (polyvinylsiloxane).

ENDİKASYON

Tüm hareketli protezlerle kullanılır.

ELITE SOFT RELINING: Hareketli protezler için daimi besleme maddesi. Protezlerin alveolar ve mukosal kenarlarına çiğneme esnekliği sağlamada kullanılır.

ELITE SUPER SOFT RELINING: Hareketli protezlerde doku uyumlaması için geçici besleme maddesi.

Cerrahi işlem ya da çekim sonrası dokuların iyileşmesine yardımcı.

KONTRENDİKASYON

Ürün polyvinylsiloxane ve platinum katalist içermektedir. Ürünün bazı ya da tüm bileşenlerine karşı hiper hassasiyeti kanıtlanmış vakalarda kullanmayınız.

AVANTAJLARI

Su uzaklaştırıcı.

Kullanışlı ve hızlı, önemli ölçüde zaman tasarrufu.

Proteze mükemmel tutunma.

KARTUŞ DİSPENSER HAZIRLANMASI

Tabancayı, piston tutacağıın alt tarafındaki siyah butona basılı tutarak çekiniz.

Kartuşun kapağını çıkarın. Kartuşu tabancaya yerleştirin, “V” yönünü, doğru pozisyonlama için kullanabilirsiniz. Kartuşun uygun olarak yerleştirildiğini, tam olarak kapatılıp kapatılmaması ile kontrol edebilirsiniz.

En uygun ölçü akışı için her iki materyalin de kartuş ucundan akmasını sağlayın. Artık malzemeyi temizleyin.

Işırtma ucunu yerleştirin, uygun pozisyonlama için “V” işaretli bölüme kartuşu yerleştirin.

Cihaz şimdi kullanıma hazırdır.

KULLANIM METHODU

ÖN AŞAMASI

Tüm silikon beslemeyi tamamen uzaklaştırın.

Frez yardımıyla, protezi ortalama 1-2 mm aşındırın.

Vestibular, lingualve dorsallar marjinleri 2-3 mm aşındırın ve shut-off marjin kesitlerini derinlik için en 1mm ve yükseklik için en az 1,5 mm belirleyin.

Dikkatlice temizleyin ve protez dengrezi etil alkol kullanarak uzaklaştırın. İyice kurumasına izin verin.

DİREKT METOD

Daha önce inceltip, temizlediğiniz proteze eşit şekilde PRİMER maddesini uygulayın.

En az 1 dakika kurumasını bekleyin.

PRİMER aplikasyonunun ardından hemen kapağı kapatın.

ELITE SOFT RELINING/ELITE SUPER SOFT RELINING ürünlerinin iyi şekilde adaptasyonu için tükürük, nem, kalıntı grez, monomer ve latex eldiven kontaminasyonundan sakının

ELITE SOFT RELINING/ELITE SUPER SOFT RELINING ürünlerini dispenser yardımıyla keskin kenarları da bazalarak, vestibüler, lingual alanlara ortalama 2-3 mm olacak şekilde iyice yayın.

Protezi ağıza yerleştiriniz ve silikonun mukozaya adapte olması için birkaç saniye bekleyiniz.

Sonrasında ise geleneksel yöntemleri kullanarak 1 dakika boyunca ağız fonksiyonlarını yapınız.

5 dakika sürecek olan polimerizasyon süresini bekleyiniz. Sonrasında protezi çıkarınız ve aşağıda belirtilen "Bitim / Cilalama " işlemlerini uygulayınız.

İNDİREKT METOD

Master model hazırlandıktan sonra ya da muflaya koyulduktan sonra yukarıda anlatılan " tedavi öncesi aşamalar ve direkt metod" uygulamalarını yapınız. Sonrasında geleneksel master model ya da mufla tekniğini kullanınız.

Oda sıcaklığındaki polimerizasyon süresi ortalama 30 saniyedir, aksi takdirde protezi 40-45°C (104 – 113°F) sıcaklığındaki suda yaklaşık 10 dk. boyunca bekletiniz.

Protezi modelden ya da mufladan çıkarın, temizleyin ve aşağıda belirtilenlere uyun.

*Tahmini zamanlar oda sıcaklığı baz alınarak hesaplanmıştır 23°C (73°F), düşük sıcaklıklarda süre artarken yüksek değerle süre kısalır.

FİNAL BİTİM / CİLA

Fazla, artık parçaları trimle yapın.

ELITE SUPER SOFT RELINING ürünü için **VARNISH**(vernik), kullanın ve **A/B**komponentleri 1:1 oranda kullanınız.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ - (Teknik Veri)

Malzeme özellikleri tablo 1 de belirtilmiştir:

Bölüm 1: Boyutsal Stabilite (Dimensionalstability)

Bölüm 2: Elastik geri dönüşüm (Elasticrecovery)

Bölüm 3: Sertlik Shore A (Hardness “Shore A”)

Klinik kullanım için süre* - (TIMES FOR CLINICAL USE*)

Bölüm 4: Karıştırma süresi (Mixing Time)

Bölüm 5: çalışma süresi (Working Time)

Bölüm 6: Ağız fonksiyonları süresi (Direct method)

Bölüm 7: Ağız içi süre (Time in Mouth)

Bölüm 8: İndirektmetodta süre (Setting Time forindirectmethod)

NOT: Düzeltme ve ekleme durumlarında tekrar aynı uygulamaları yapınız

HASTA UYGULAMALARI

Besleme yapılmış protezi sıvı sabunla bereber akan suda iyice siliniz ve yıkayınız. Protezi suya daldırıp, bırakmaya gerek yoktur. Çok uzun süre temizleme yapmadan, ve kullanılması gerekiyorsa çok yumuşak bir fırçadan yardım alabilirsiniz.

UYARI

PRIMER ve VARNISH malzemeleri deri ve göz temasından sakınınız. Herhangi bir kazara durumda, iyice yıkayınız.

Latex eldivenler kontaminasyona sebep olabilir. Ayrıca Primer kullanmadan önce de protezdekontaminasyona izin vermeyin.

ELITE SOFT RELINING

ELITE SUPER SOFT RELINING

1 kartuş of Elite SoftRelining 50 ml.

1 kartuş of Elite SuperSoftRelining 50 ml.

6 karıştırma ucu

6 karıştırma ucu

1 Primer 4 ml.

1 Primer 4 ml.

1 Vernik 5 ml. A + 1 Varnish 5 ml. B

1 bitim frezi

1 bitim frezi

12 küçük fırça

1 fırça kabı

1 karıştırma plakası

SADECE DENTAL KULLANIM İÇİNDİR.