

Калпб харизмалар ичн тоз олмаан еластик ве тиксотропик алгинат.

Харекети протез ве антагонист ичн чалшма моделиер олуштурмак амачыла генел критик практике кулланылр. Нане аромали.

Zetalgin, her ikisi de hızlı veya normal sürelerde hazırlanabilen tek renkli ya da kromatik versiyonlarda temin edilebilir.

Renkler (yalnızca renkli versiyon için) aşamalara göre değişir: karıştırma sırasında pembe, çalışma ve ölçü kaşığına yerleştirme sırasında gri, sertleşene kadar ağır boşluğunda kaldığı süre boyunca yeşil.

DOZAJ VE KARIŞTIRMA

Paketi açın (şekil 1) ve aljinatı hava geçirmez kapaklı bir kaba (şekil 2) boşaltın. Poşetten ilgili verileri keserek ürünün lot numarası ve son kullanma tarihini saklamanızı tavsiye ederiz.

Tozu dağılmasını kolaylaştırmak için 2 ya da 3 kez çalkalayın (şekil 3) ve dozaja geçin: dozaj kaşığının yardımıyla bastırmadan tozu alın, spatulanın düz kısmı ile kaşığın üzerinden fazlalıkları alın ve düzeltin (şekil 4) ve tozu kauçuk bir kaba boşaltın. İstenen miktara ulaşana kadar bu işlemi tekrarlayın.

Her bir kaşık toz (9 g) için 1/3 su ölçüsü ekleyin (18 ml). (sipariş kodu: C300910).

Örn. iki ölçü toz için (18 g), bir üst orta kaşık için yeterlidir, 2/3 su ölçüsü ekleyin (36 ml). (şekil 5)

Kabı kapatın ve 5-27°C/41-80°F 'de saklayın. (şekil 12).

Tabloda (şekil 6) önerilen sürelerle göre karıştırmaya başlamak için toza suyu ekleyin, maddeyi ölçü kaşığına yerleştirin (şekil 7) ve çalışma süresi bitmeden önce ağır boşluğuna yerleştirin (şekil 8). Önerilen ağır boşluğunda kalış süresine uyarak maddenin sertleşmesini bekleyin. Renkli aljinatlarda, daha önce tanımlandığı gibi, çalışma süreleri renk değişiminden kolayca anlaşılabilir. En iyi karışım için (homojen ve hava kabarcıksız) AGHAMIX II kullanılması tavsiye edilir. (şekil 9)

KLINİK KULLANIM SÜRELERİ*	zetalgin normal set	zetalgin fast set
Karıştırma süresi	45"	30"
Çalışma süresi	1'35"	1'10"
Ağızda kalış süresi	1'00"	1'00"
Yapışma süresi	2'35"	2'10"
Toplam çalışma süresi (ISO 1563)	2'25"	2'00"

*Klinik kullanım süreleri 23°C/73°F ıyonu giderilmiş su ile karıştırma başladıktan sonra geçerlidir. Soğuk su sertleşmesini geciktirir, sıcak su ise çabuklaştırır. Su sertliğindeki değişiklikler yukarıda sözü geçen süreleri de değiştirir. ADA 18-ISO 1563 niteliklerine uygundur.

UYARI

Vinil polisiloksanlar hassas kişilerde irritasyon veya diğer alerjik reaksiyonlara sebep olabilirler.

KALIBIN YIKANMASI VE DEZENFEKSİYONU

Kalibin yapışmasından sonra, olası tükürük kalıntılarını gidermek dikkatle durulayın (şekil 10), su fazlalığını giderin ve hemen dezenfekte edin. İdeal dezenfeksiyon ölçü Zeta 7 solution'a daldırılarak ya da direk Zeta 7 spray (Zhermack) (şekil 11) püskürtülerek sağlanır. Diğer dezenfeksiyon maddelerinin kullanılması halinde üretici bilgilerini izleyin.

KALIBIN DÖKÜMÜ - ÖNERİLEN ALÇILAR

Modelin hemen tip 3 (Elite Model/Model Fast - Zhermack) ya da tip 4 (Elite Rock - Zhermack) alçı ile dökümü tavsiye edilir. (şekil 13)

KALIBIN SAKLANMASI

Eğer modelin hemen dökülmesi mümkün değilse, fazla suyu alın ve kalıbı hava geçirimecek şekilde kapatılmış bir poşet (Long Life Bag Zhermack) içinde ortam ıssında (23°C/73°F) saklayın. Bu şartlarda alçı dökümü kalibin yapışmasından 48 saate kadar ertelenebilir. (şekil 14)

ÖNEMLİ GÖRÜŞLER: Ürünlerimizin kullanımına ilişkin olarak sözlü, yazılı veya görsel yollardan yapılan danışmalar, güncümüzdeki tıbbi ortam ve bizim "know-how"ımız temellerine dayanmaktadır. Bunları, üçüncü kişilerin olası hak ve iddiaları söz konusu olduğunda, bağlayıcı olmayan bilgiler olarak düşünmek gerekir. Profesyonel kullanıcı, ürünün yapılacak uygulamaya uygunluğunu şahsen kontrol etmekte yükümlüdür. Ürünün profesyonel kullanıcı tarafından kullanılmasını ve uygulanmasını Firma'nın kontrol etmesi mümkün olmadığından, bu işlemler profesyonel kullanıcının sorumluluğundadır. Olası bir hasar durumunda sorumluluk, Firma tarafından sağlanan profesyonel kullanıcı tarafından kullanılan malzemenin değeri ile sınırlıdır. Ürün kullanılabilir toz olusunu azaltmak için iletici bir madde ile işlenmiş diatomit içerir.

YALNIZCA PROFESYONEL AMAÇLA KULLANILIR

Безпрашен, еластичен и тиксотропен алгинат за снемане на отпечатъци.

Подходящ в общата стоматологична практика за изработка на лабораторни модели и модели на антагонисти при подвижно протезиране. Аромат на мента. Zetalgin се предлага в хроматичен и нехроматичен вариант, и двата с кратко или нормално време за втвърдяване.

Промяна на цвета (само за хроматичния вариант) характеризира различните етапи на обработка: розов по време на смесването, сив по време на работа и поставяне в лъжичата, зелен по време на престоя в устната кухина до втвърдяването.

ДОЗИРОВКА И СМЕСВАНЕ

Отворете плика (сх. 1) и изсипете алгинатът в контейнер с херметично затваряне (сх. 2).

Препоръчва се да се запази номерът на партидата и срокът на годност на продукта, отразявайки данните от плика.

Разбъркайте 2 или 3 пъти за да подпомогнете разнасянето на прахчето (сх. 3) и продължете с дозирането: с помощта на лъжичка пренесете алгинатът без да притискате прахчето, балансирайте или отнемете прекаленото количество алгинат като минете с плоската част на шпатулата през лъжичката (сх. 4) и го изсипете в гумена чаша. Повторете операцията до достигане на желаното количество.

За всяка лъжичка прахче (9 г), сипете 1/3 мярка вода (18 мл) (код за поръчка: C300910).

Напр. за 2 мерки прахче (18 г) достатъчни за средно голяма лъжичка, изсипете 2/3 мярка вода (36 мл). (сх. 5)

Затворете контейнера и го съхранявайте при 5-27°C/41-80°F (Сх. 12).

Добавете вода към прахчето за да започне смесването съгласно времето, посочено в таблицата (сх. 6), поставете материалът върху отпечатъчната лъжича (сх. 7) и го поставете в устната кухина преди края на времето за обработка (сх. 8).

Изчакайте втвърдяването на материала, като следите препоръчаното време за престой в устната кухина. При хромните алгинати, времето за обработка се забелява лесно при промяна на цвета, описание понататък. За оптимално смесване (хомогенно и без въздушни мехури) се препоръчва използването на ALGHAMIX II (сх. 9).

ВРЕМЕНА ЗА КЛИНИЧНО ИЗПОЛЗВАНЕ*	zetalgin normal set	zetalgin fast set
Време за смесване	45"	30"
Време за работа	1'35"	1'10"
Време за престой в устата	1'00"	1'00"
Време за стягане	2'35"	2'10"
Общо време за обработка (ISO 1563)	2'25"	2'00"

*Време за клинично използване са имат предвид в начало на смесването с дейонизирана вода при 23°C/73°F. Студената вода забавя втвърдяването, топлата вода го ускорява. Промените в твърдостта на водата могат да са причина за промяна на времето за стягане. В съответствие с спецификации ADA 18-ISO 1563.

ВНИМАНИЕ!

При чувствителни хора винилполисилоксанът може да предизвика дразнене или други алергични реакции.

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ОТПЕЧАТЪКА

След стягане на отпечатъка, изплакнете внимателно за да премахнете евентуални остатъци, и следи от слюнка (сх. 10), премахнете прекалената вода и веднага дезинфектирайте. Идеалната дезинфекция се постига с потапяне на отпечатъка в Zeta 7 solution или с директно въпръскване на Zeta 7 spray (Zhermack) (сх. 11). При ползването на дезинфектантите, се придържайте към инструкциите на производителя.

ЗАЛЕПВАНЕ НА ОТПЕЧАТЪКА - ПРЕПОРЪЧАНИ ГИПСОВЕ

Препоръчваме бързо залепване на модела с гипс от вида 3 (Elite Model/Model Fast - Zhermack) или вида 4 (Elite Rock - Zhermack) (сх. 13).

СЪХРАНЕНИЕ НА ОТПЕЧАТЪКА

Когато не е възможно бързо залепване на модела, премахнете излишната вода запазете я в плик с херметично затваряне (Zhermack Long Life Bag) при стайна температура (23°C/73°F). При тези условия залепването на гипса може да се отложи 48 часа от стягането на отпечатъка (сх. 14).

ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ: Консултирайте за употреба на нашите продукти, независимо дали са устни, писмени или под формата на демонстрации, са базирани на настоящото ниво на денталната технология и нашето собствено ноща. Такива консултации са необвързващи дори при предаване на пренести от трета страна и не освобождават специалист от задължението да провери лично дали продуктът е подходящ за съответната употреба. Zhermack не може да гарантира приложението на Zhermack продукти от специалист, а затова той е изцяло отговорен за всяка употреба и приложение. Отговорността на Zhermack е ограничена до качеството на продуктите, доставени на специалист и използвани от него. Продуктът съдържа калций бранно с овлажняващ агент за намаляване на адхезията при преход.

САМО ЗА ДЕНТАЛНА УПОТРЕБА

DUST FREE ALGINATE IMPRESSION MATERIAL



Zhermack
CLINICAL

Zhermack SpA
Via Bovazecchino, 100
45021 Badia Polesine (Rovigo) - Italy
tel. +39 0425 597611 - fax +39 0425 53596
www.zhermack.com - info@zhermack.com

U113590A - Last Update 04/2013

