




Easy/Vac Vakum Cihazı Kullanım Kılavuzu

Model No. : EV2

"Doğru kullanım ve güvenlik için, lütfen,
bu kılavuzu dikkatlice inceleyiniz."

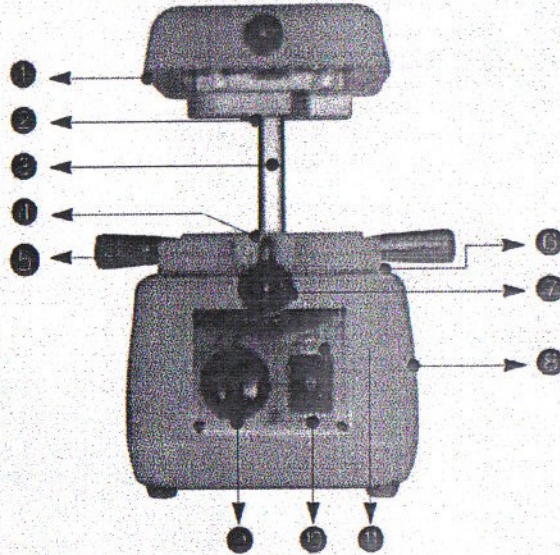

Parçalar

- | No. | İsim |
|-----|-------------------------|
| 1 | Üst İskelet |
| 2 | Durdurma Deliği |
| 3 | Altıgen Direk |
| 4 | Delik Levha |
| 5 | Sürgülü Levha Kolu |
| 6 | Sürgülü Levha (mengene) |
| 7 | Tahliye Kolu |
| 8 | Ana İskelet |
| 9 | Zamanlayıcı |
| 10 | Şalter |
| 11 | Gösterge Işığı |

Teknik Özellikler

- | | |
|---------------|-------------------------------|
| 1) Model No. | : EV2 |
| 2) Giriş Gücü | : AC 220-240V, 50-60 Hz |
| 3) Çıkış Gücü | : Isıtıcı 550 W, Motor 1250 W |

Kurulum

- | | |
|-----------------------|---|
| 1) Sürgülü Levha Kolu | : levhanın her iki yanında konumlandırılmış olan deliklere kolları vidalayınız. |
| 2) Güç: | elektrik prizine fişi takınız. |



- 1) Sürgülü Levhayı(mengene) Tahliye Kolu yardımı ile açınız.
- 2) Lastik şerit Mengene içine yerleştiriniz. (Type veya Type.comta kullanınız.)
- 3) Tahliye Kolu yardımı ile kapatınız.
- 4) Sürgülü Levha'yı Altıgen Direk üzerindeki Durdurma Deliği'ne kadar kaldırınız.
- 5) Delik Levha'ya dış modelini yerleştiriniz.
- 6) Zamanlayıcıyı ayarlayın ve ısıtıcı'yı çalıştırın.(I). (Gösterge ışığı yanacaktır.)
- 7) 2 veya 2.5 dakika ısıtıcı yeterli ısıya ulaşana kadar bekleyin.
- 8) Üst iskeleti İleriye(180°) itin ve lastik şerit veya model yüksekliği 1/2 " çökünceye kadar bekleyin.(20 saniye - 1 dakika. Lastik şeridin sertlik ve kalınlığına göre değişir.)
- 9) Isıtıcıyı kapatın(II) ve Vakum'u çalıştırın (II)
- 10) Sürgülü Levha'yı Ana İskelet'e doğru çekiniz.
- 11) Lastik şerit içine çekinceye kadar bekleyiniz. (10-60 saniye veya daha fazla)
- 12) Vakum'u kapatınız(0) ve Zamanlayıcı da kapatınız.
- 13) Üst İskelet'i(180°) geri çekin.
- 14) Sürgülü Levha'yı Tahliye kolu yardımı ile açınız.
- 15) Şekil almış olan Lastik Şerit'i çıkarınız.
- 16) Elektrik Bağlantısı'nı prizden çıkarınız.



Dikkat

- 1) Kullanım esnasında ve sonrasında Üst İskelet çok sıcak bir hal alır. Üst İskelete ve direğe kesinlikle dokunmayınız ve kullanımdan sonra soğuması için bekleyiniz. Isıtıcı cihazın altındadır. Özellikle ısıtıcıya dokunmaya çalışmayınız çünkü bu yanığa yol açar.
- 2) Bu vakum cihazına ıslak ellerinizle kesinlikle dokunmayınız ve içine cihazın alt tarafından bir şeyler sokmaya kesinlikle çalışmayınız.
- 3) Kullanımınız sona erdikten sonra cihazın ısıtıcısını kapattığınızdan ve elektrik bağlantısını çektiğinizden emin olunuz.



Bakım ve Muhafaza

- 1) Bu cihazı çocuklardan uzak tutunuz ve su ve ısı kaynaklarının yakınlıklarına yerleştirmeyiniz.
- 2) Muhafaza: Isı : -10~70, Nem : 10~100%, Basınç : 50~106k Pa
- 3) Teknik bir arıza durumunda derhal yetkiliye başvurunuz.



Garanti

- 1) Üretici bu cihazın materyal ve işçilik olarak kusur taşımadığını satın alma tarihinden itibaren bir (1) yıl boyunca garanti eder ve bu süre boyunca ücretsiz servis sağlayacağını garanti eder.
- 2) Bu garanti servis gerektiren aşağıdaki halleri kapsamaz: ihmal, yanlış kullanım, talimatlarda belirtilen hususlara riayet edilmemesi ve/veya yetkisiz kişilerce tamir, orijinal olmayan/yetkisiz parça kullanımı veya cihazın müşteri tarafından istemli olarak müdahalesine maruz kalması/telef edilmesi.



Müşteri Desteği

Teknik bir ihtiyaç veya destek/tamir gereken hallerde lütfen yetkili satıcı ile temasa geçiniz.

www.3amedes.co.kr



MERKEZ: Fevzi Çakmak Sk. No:11/5-6
Kızılay / ANKARA TEL: (0.312) 231 6485
ANKARA ŞUBE: Fevzi Çakmak Sk. No: 37/A
Kızılay / ANKARA TEL: (0.312) 231 8840
İSTANBUL ŞUBE: Millet Cad. Lütuf Paşa Sk.No: 52/2
Fındıklı / İSTANBUL TEL: (0.212) 631 7888

