

DAĞLAYICILARI

(% 37 Fosforik Asit)

TAVSİYE EDİLEN ENDİKASYONLAR

Master-Dent® Dağlayıcıları, diğer dental işlemler için hazırlık bakımından diş yüzeylerini uygun hale getirmek için kullanılan asitle dağlama tekniğinde kullanılmak amacıyla tasarlanmıştır.

KONTRENDİKASYONLARI

Dağlayıcıları aşağıdakilere temas ettirmeyiniz:

- Yumuşak dokular
- Diş etleri
- Canlı, hassas dişler

KİT İÇERİKLERİ

Jel, likit veya viskoz dağlayıcı (10x3 ml şırınga)

KULLANIM TALİMATI

1. Düz ponza veya yağsız ve florürsüz profili macunu kullanarak dişi hazırlayın.
2. Dişi durulayın ve yağsız hava ile iyice kurutun.
3. Diş yüzeyine dağlayıcı uygulayın.
4. Minenin durumuna göre, dağlama için 20-45 saniye süre verin.
5. Su ile iyice durulayın.
6. Dağlanmış olan beyazı gibi görünmelidir. Böyle görünmüyorsa, 20 saniye daha dağlayın.
7. Tekrar durulayın ve kurulayın.
8. Derhal yapıştırma veya restoratif prosedürle devam edin.

KULLANIM VE DEPOLAMA

Tavsiye edilen depolama koşulları -10°C (15°F) ile 30°C (83°F) arasındadır.

Direkt gün ışığından koruyun. Bu koşullarda depolaması halinde raf ömrü minimum 2 yıldır.

ACİL DURUM ÖNLEMLERİ

Soluma : Herhangi bir zarar beklenmez.

Göze temas: Derhal bol su ile yıkayın ve en kısa sürede doktora gidin.

Yutma : Ağız ve boğayı tahriş edebilir. Kusmaya çalışmayın. Varsa süt veya sodyum bikarbonat (kabartma tozu) solüsyonu verin.

Cilde temas: Su ile yıkayın. Uzun süreli temas dokuları harap edebilir. Ciddi tahriş veya yanık halinde doktora gidin.

UYARI

Dağlayıcı % 37 Fosforik Asit içermekte olup, cilde ve gözlere zarar verir. Cilde temas halinde su ile yıkayın. Göze temas halinde derhal doktora gidin.

Dentonics, Inc
2833 Tophill Rd.
Monroe, NC 28110, ABD
Tel: (704) 238-0245 Faks: (704) 238-0456 www.dentonics.com

CE 0510