

CAM İYONOMER KAPLAMA RADYOPAK

TAVSİYE EDİLEN ENDİKASYONLAR

Master-Dent® Cam İyonomer Kaplama florür salar ve ince bir kaplamanın gerekli olduğu yerlerde kompozit, amalgam veya porselen restorasyonları altında kaplama olarak kullanılmak için idealdir.

KONTRENDİKASYONLARI

Pulpa kaplama

KOMPOZİSYONU

Alümino-silikat cam poliakrilik asit

ÜRÜN SUNUMU

Kit (35 gr toz /20 ml sıvı)

KULLANIM TALİMATI

- 1) Toz ve Sıvı ayarı
 - a) Dökmeden önce, içeriklerin yeknesak yığın yoğunluğunda olmasını sağlamak için tozu karıştırın.
 - b) Ölçüm kaşığına tozla iyice doldurun ve spatula ile düzleyin.
(Bir taban için daha yoğun bir kıvam gerekir. Bu nedenle düzlemeden önce, ölçüm kaşığındaki tozu sıkıştırın)
 - c) Bir ölçü kaşığı tozu bir karıştırma tablası veya cam levha üzerine dökün. Tozu spatula ile iki eşit parçaya bölün.
 - d) Damlalıklı şişeyi dik olarak tutarken, karıştırma tablasına veya cam levhaya 2 damla sıvı damlatın.
 - e) Şişeleri kullanır kullanmaz hemen kapatın.
- 2) Karıştırma
 - a) Tozun yarısını sıvının tamamı ile 5-10 saniye kadar karıştırın.
 - b) Geri kalan tozu ilave edin ve tüm malzemeyi 10-15 saniye karıştırın.
- 3) Restoratif Teknik
 - a) Standart teknikleri kullanarak dişi hazırlayın. Aşırı mekanik tutma gerekli değildir. Pulpa kaplama için kalsiyum hidroksit kullanın.
 - b) Yıkayın ve kurutun, ancak desikatör kullanmayın.
 - c) İhtiyaç duyulan siman miktarını karıştırın.
 - d) Yüzeydeki nemi giderin, ancak desikatör kullanmayın.
 - e) Şırınga veya uygun yerleştirme aleti kullanarak, simanı hazırlanan dişe taşıyın ve dentini, dentin-mine birleşme yerine kadar kapatın.
 - f) Simanı sertleşmeye bırakın (4 dakika kadar)
 - g) Standart kompozit veya amalgam restoratif tekniği ile devam edin.

UYARI

Tozu vay sıvıyı başka bir cam iyonomer bileşeni ile karıştırmayın.
Medikal ürünleri çocuklardan uzak tutun.

KULLANIM VE DEPOLAMA

Güneş ışığından uzakta depolayın

Depolama sıcaklık derecelerine uyun

Nemden koruyun

Raf ömrü: 3 yıl

ACİL DURUM ÖNLEMLERİ

Ağız dokusuna veya cilde temas etmesi durumunda, alkole batırılmış bir sünger veya pamuk ile silin. Su ile yıkayın. Göze temas etmesi halinde derhal bol su ile yıkayın ve doktora gidin.

CE 0470

Dentonics, Inc
2833 Tophill Rd.
Monroe, NC 28110
www.dentonics.com