

MASTER-DENT IŞINLI KAVİTE KAİDE MADDESİ

GENEL BİLGİ

Işınla sertleşen hafif pasta kıvamında kavite kaide maddesidir. Bu malzeme hidroxyapatite, baryum sülfat ve flüorür tuzları içeren biyouyumlu reçineden meydana gelir.

Piyasada bulunan tüm ticari restoratif malzemelerle ve simanlarla uyumludur. Ancak, su bazlı simanların altında kullanıldığı zaman ışınlanmış kaide maddesinin yüzeyi sertleşmemiş küçük reçinelerin temizlenmesi için alkolle nemlendirilmiş pamuk tamponla silinmelidir. Kaide maddesi pulpa ışınlandırılması durumunda klasik kendiliğinden sertleşen astarların üzerine uygulanabilir.

KULLANIM TALİMATNAMESİ

1. Kaviteyi klasik yöntemlerle hazırlayın
2. Kaviteyi yıkayın ve kurutun.
3. Kaviteyi bir pad üzerine yerleştirin. Hazırladıktan sonra ters akış için plunger'ı hafifçe geri çekin

UYARI: Hazırlanan malzemeyi kullanmadan önce parlak ışıktan koruyun.

4. Malzemeyi yuvarlak uçlu bir aletle uygulayın ve 03-05 mm den kalın olmayacak şekilde birinci katı oluşturun. Mine marjinlerine bulaşan malzemeti temizleyin.
5. Işın kaynağı ucunu yüzeye mümkün olduğunca yakın tutacak şekilde 20 saniye kadar ışınlayın. (eğer ışık yoğunluğu az ise 30 saniye)
6. İkinci bir katmanı gerekirse uygulayın. İkinci katman 1.5 mm kalınlığa kadar olabilir. 30 saniye kadar ışınlayın.

DEPOLAMA

82° F (28° C) den daha aşağıda saklayın. *DONMASINA İZİN VERMEYİN.*

UYARI

Sertleşmemiş kaide maddesinin cilt veya gingiva ile temasından kaçının.

Muhtemel bir temas halinde iyice yıkayın.