

OYUK VE FİSÜR DOLGU MACUNU IŞIKLA SERTLEŞTİRME

KULLANIM TALİMATI

TAVSİYE EDİLEN ENDİKASYONLAR

Master-Dent® Işıklı sertleşen Oyuk ve Fisür Dolgu Macunu, özellikle esas ve kalıcı molar ve premolarların ısıрма yüzeylerinde çürük oluşumunu azaltmak için mine oyuklarını ve diş fisürlerini yalıtım üzerine koruyucu bir malzeme olarak tasarlanmıştır.

KONTRENDİKASYONLAR

Herhangi bir bileşene karşı, bilinen alerjiler.
Çürük olması halinde kullanılmamalıdır.

KOMPOZİSYONU

Bu ürün aşağıdakileri içerir:
Metakrilat rezinler
Amorf silis
Işık başlatıcıları

ÜRÜN SUNUMU

Starter kiti : 2x7 ml şişe
Şırınga kiti : 4x1.2 gr; 9 gr dağlayıcı
Şırınga kiti : 2x2 gr, 1x3 ml dağlama jeli şırınga, 20 tip

KULLANIM TALİMATI

DİŞİN HAZIRLANMASI

1. Flüorürsüz ve yağsız bir macun ile profilaksi yapın.
2. Yağsız hava ile tecrit edilecek her diş soyutlayın ve kurutun.
3. Altmış saniye süreyle Master-Dent® Dağlama Jeli (%37) uygulayın.
4. İyice çalkalayın ve kurutun. Eğer bilinen “tebeşir gibi” görüntüsü yoksa, dağlama işlemini tekrarlayın.
5. Şişe formatında Opaque gölge kullanıyorsanız, ürünün iyice karışmasını sağlamak için 10-20 saniye kadar şişeyi iyice çalkalayın.

UYGULAMA

1. Kuru ve dağlanmış mineye ince bir tabaka çukur ve Fisür Dolgu macunu uygulayın.
2. Bir dental sertleştirme ışığı kullanarak ve ışığı yüzeyden 1-2 mm uzakta tutarak, tüm kaplanmış yüzeylere 30 saniye tutun.

UYARI

Medikal ürünleri çocuklardan uzak tutun.

Master-Dent® Polikarboksilat Siman kullanırken, sertleştirme ışığına doğrudan bakmayın.
Koruyucu gözlük takın.

KULLANIM VE DEPOLAMA

Güneş ışığından uzakta
depolayın

Depolama sıcaklık
derecelerine uyun

Nemden koruyun

Raf ömrü: 3 yıl

ACİL DURUM ÖNLEMLERİ

Gözlere temas etmesi halinde bol su ile yıkayın. Tahriş devam ederse doktora gidin.

Yutma halinde, büyük miktarda malzeme yutulmuşsa kusmaya çalışın.

Cilde temas halinde, sabun ve su ile yıkayın.

CE 0470

Dentonics, Inc
2833 Tophill Rd.
Monroe, NC 28110
www.dentonics.com