

ULTIMATE™ BOND

IŞILA SERTLEŞEN, TEK BİLEŞENLİ YAPIŞTIRICI

KULLANIM TALİMATI

TAVSİYE EDİLEN ENDİKASYONLAR

ULTIMATE™ Bond, tek bileşenli, karıştırma gerektirmeyen bir yapıştırıcı loup, aşağıdaki hususlar için endikedir.

- Işıkla serleşen kompozit onarım
- Kök yüzeyi hassasiyetinin giderilmesi
- Direkt ışıkla sertleşen kompozit /kompemer restorasyonları
- Sınıf I, Sınıf III, Sınıf IV ve Sınıf V restorasyonlar

KONTRENDİKASYONLARI

ULTIMATE™ Bond, hastaların metakrilat monomerlere karşı aşırı hassasiyete sahip olduğu durumlarda kullanılmamalıdır. Çok hassas dişlere veya dişetine çok yakın yerlerde kullanmayın.

KOMPOZİSYONU

Bu ürün aşağıdakileri içerir:

- Di ve trimetakrilat rezenler
- Işık başlatıcıları
- Stabilizörler

ÜRÜN SUNUMU

Tek bileşenli 5 gr şişe.

KULLANIM TALİMATI

1. Dişin Hazırlanması

Not: Bir dağlayıcının hem minede hem de dentin yüzeylerinde kullanılması kritik bir durumdur.

a) Bir dentin koşullandırıcısı uygulayın. Örneğin Master-Dent® Dentin Etch ile dentini fırçalayın. Uygulamayı mine kenarlarına kadar uzatın. 15-20 saniye bekleyin.

Not: nispeten geniş bir mine alanını restore ederken ve iyi tutuş sağlamak için mineye maksimum yapışma gücü sağlamanın hayati olduğu klinik durumlarında, mine, Master-Dent ® Liquid Etch gibi bir mine koşullandırıcısı ile 20 saniye kadar işleme tabi tutulmalıdır. Bu durumlarda dentin koşullandırıcısı sadece dentin üzerinde kullanılmalıdır.

b) İyice durulayın ve tüm dađlayıcı malzemenin giderilmesini sađlayın. Hava ile kurutun. Dentini tamamen kurutmayın.

2. Ürünün uygulanması

a) Dentin koşullandırıcısına benzer şekilde, dentine/mineye Master-Dent® Ultimate Bond uygulayın. Dentinin halen iyice ıslak olmasına dikkat edin. Bu malzeme yüzeyde sertleşmemiş çok ince bir sıvı tabaka bırakarak sertleşir. Bu ince tabakanın durulanmaması veya silinmemesi gerekir. Bu tabaka, daha sonra uygulanan restoratif / simana daha iyi yapışma sađlar.

b) Işıkla sertleşen restoratif malzemeyi veya simanı yerleştirin ve sonra bir dental sertleştirme ışığı ile sertleştirin.

3. Yararlı Tavsiyeler

a) Sınıf V servikal lezyonları restore ederken, bitişik mine kenarları şevlenmeli uygun duruma getirilmelidir.

b) Uygun duruma getirmeden önce, bitişik dentin ve mine yağsız ponza/ sulu çamur ile temizlenmeli, iyice durulanmalı ve sonra hafifçe kurutulmalıdır.

UYARI

1. Medikal ürünleri çocuklardan uzak tutun.

KULLANIM VE DEPOLAMA

Güneş ışığından uzakta
depolayın
Raf ömrü: 3 yıl

Depolama sıcaklık
derecelerine uygun

Nemden koruyun

ACİL DURUM ÖNLEMLERİ

Gözlere temas etmesi halinde ılık suyla yıkayın.

Yutma halinde, büyük miktarda yutulmaz ise acil tehlike yoktur. Büyük miktarda yutulursa, doktora gidin.

Cilde temas halinde sabun ve su ile yıkayın.

Soluma: listede yoktur.

CE 0470

Dentonics, Inc
2833 Tophill Rd.
Monroe, NC 28110
www.dentonics.com