

ULTIMATE™ SE BOND

İŞINLA SERTLEŞEN KENDİNDEN DAĞLAMALI TEK AŞAMALI BOND/YAPIŞTIRICI

KULLANIM KILAVUZU:

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ŞEKLİ:

ULTIMATE™ SE BOND kendinden asit, prime ve yapıştırma özellikleri tek şişe altında barındıran 7.

Jenerasyon bond/yapıştırıcıdır. Aşağıdaki alanlarda kullanılır:

- ☐ Direkt Işınla Sertleşen Kompozit/Kompomer restorasyonlarında
- ☐ Endirekt restorasyon ön tedavisi olarak kavite dolgusu
- ☐ Kök yüzeyinde ve/ya hassasiyet tedavisi
- ☐ Porselen, hibrit seramik veya kompozit reçinede kron yüzünden yüzeydeki çatlakların tamiri
- ☐ Porselen, hibrit seramik ve sertleştirilmiş kompozit reçineden mamul protezlerin yüzey tedavisi

KONTRAENDİKASYONLAR:

ULTIMATE™ SE BOND aşağıdaki koşullarda kullanılmamalıdır:

- ☐ Kimyasal kompozit reçineler ile beraber
- ☐ Ojenol içerikli materyaller ile beraber, ojenol yapışma veya donmayı olumsuz etkiler
- ☐ Metakrilat monomere hassasiyeti olan hastalarda

İÇERİK:

Bu ürün aşağıdakileri içerir:

Bis-GMA

Hidroksietilmetakrilat

Asit monomer

Alkol solvent

ÜRÜN PIYASAYA SUNUMU:

Tek aşamalı, 7gm şişe

KULLANIM ŞEKLİ:


1. Her kullanım öncesi şişeyi iyice çalkalayınız
2. Karıştırma kabına bir miktar dökünüz
3. Kullanım sonunda şişeyi derhal kapatınız
4. Aplikatörü yapıştırma sıvısına batırın
5. İlk uygulamayı kazıma şeklinde 20 saniye boyunca yüzeye uygulayın
6. Aplikatörü yapıştırma sıvısına ikinci kez batırın
7. İkinci kez uygulamayı kazıma şeklinde 20 saniye boyunca yüzeye uygulayın
8. Nazik bir şekilde hava yardımıyla 5 saniye boyunca kurutunuz
9. 20 saniye boyunca ışın tutunuz ve restorasyonu derhal yerleştiriniz.

UYARI:

Medikal cihazları çocukların erişemeyeceği yerde tutunuz.
Profesyonel dental kullanım için tasarlanmıştır.

KULLANIM VE MUHAFAZASI:

Güneşten
uzak yerde
muhafaza
ediniz

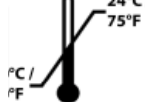

Muhafaza
ısısını
gözetim
altında
tutunuz



Nemden
uzak tutunuz

Raf Ömrü 2
Yıl

Uzun süre kullanılmadığında buzdolabında veya normal oda ısısında muhafaza ediniz. Uygulama öncesinde yapıştırıcının oda ısısında olmasına dikkat gösterin.

GÜVENLİK UYARILARI :

Göz ile temas – derhal bol su ile gözü yıkayın ve derhal doktora başvurun.

Ağız içi doku veya cilt ile temas - sünger veya pamuk palet yardımı ile derhal sıvıyı emdirin. Restorasyon tedavisi bittikten sonra bol su ile bölgeyi yıkayın.

Materyalin teneffüs veya yenilmesini önleyin.



Dentonics, Inc.
2833 Tophill Road
Monroe, NC 28110,
USA
www.dentonics.com