

Ölçünün Dezenfeksiyonu

% 0,5 - 1 konsantrisinde sodyum hipoklorid içerisinde bekletilir veya yıkınırsa geçerli bir arındırma işlemi gerçekleşmiş olur. Alçı safhasına geçmeden önce ölçüyü iyice su ile yıkayın, kullanılan solüsyon alçı donma sürecini etkileyebilir.

Ölçünün kalıplaşması

Maksimum hassasiyet elde etmek için ölçü alındıktan 15 dakika sonra dökün.

Galvanize işlemi

Silikon materyali dental sectorde kullanılan bakır veya gümüş, acid veya alkalin uygulamaları ile galvanize etmeye müsait yapıdadır

Uyarılar

Silikon elastomerler toksik değildir.

Buradaki tek risk olasılığı yanlışlıkla püskürtülen likid kristallerdir ki bunlar ciltde ve gözde tahriş olasılığı vardır. Bu durumda bölgeyi bol taze su ile yıkayıp hekim müracatında bulununuz.

Likit ve Jel katalizörü ağzı kapaklı kutu içerisinde muhafaza edip nemden ve ısıdan uzak tutunuz.. Latex eldiveni ile karştırmaktan kaçınınız.

Fiziksel Özellikleri

Ormamax Light

Tip: 3 yüksek akışkan kıvamında.

Ağızda bekleme süresi: 4 dakika civarında.

Toplam Çalışma Süresi: 2 dakika.

Donma Süresi: 5 Dakika civarında.

Baskı altında gerilme: % 6-10.

Şekil bozukluğundan doğrulma: > %98

24 Saat sonra Linear boyutsal değışiklik: - %0,5

Depolama

Store product at a temperature lower than 25 °C (77 °C) altında ortamlarda muhafaza ediniz.

Dayanıklılık

Üretim tarihinden 2 yıl sonra. Son kullanım tarihi için paket yüzeyine bakınız.

Nu ürünün kullanımı tamamı ile kontrolümüz dışında olduğundan, ürünün hazırlanışı, kullanılışı ve uygulaması tamamı ile kullanıcıya aittir.

MAJOR PRODOTTI DENTARI S.p.A.

I - 10024 MONCALIERI (TO) - VIA LUIGI EINAUDI, 23

TEL + 39 011 6400211 - FAX + 39 011 6402325

www.majordental.com - info@majordental.com