

EL BAKIMI

Virüsleri Kıvrandırın!

Diş hekimliğindeki en değerli alet diş hekiminin elleridir. Hastalarla, aletlerle ve yüzeylerle sürekli temas halin delerdir dolayısıyla mikroplardan etkilenme riskleri artar. Eller, canlı organizmalar ve patojenlerin barınarak yüzeyden yüzeye nakledilmelerine büyük kolaylık ve olasılık sağlar, bu şekilde hastadan hastaya enfeksiyonların ve çapraz enfeksiyonların dağılmasındaki payı %80'dir.

El hijyenini, enfeksiyondan koruma yöntemi, 3 aşamadan meydana gelir:

- ▶ Ellerin yıkanması
- ▶ Ellerin dezenfekte edilmesi
- ▶ El/Cilt bakımı

Ellerin Yıkanması – Sizin en iyi dostunuz; Su musluğu

Ellerin sık ve etkin bir şekilde yıkanması cilt yüzeyindeki taşınabilir mikropların sayısını azaltır. Dezenfeksiyon ile kıyaslandığında ise ellerin yıkanması eldeki patojenleri yok edilmesinde etkisiz kalır.

Ellerinizi ne zaman yıkamalısınız?

- ▶ Çalışma gününün başında ve sonunda.
- ▶ Gözle görülebilir bir enfeksiyon var ise.
- ▶ Tüm molalardan önce ve sonra.

Yukarıda bahsedildiğinden fazla su ve sabun kullanılmamalı, aksi takdirde ciltteki su kaybı dehidrasyon tehlikesi doğuracaktır. Bu şekilde haricen etkenlere daha duyarlı olup alerjik durumlar ortaya çıkabilir.

Eller yıkanırken 3 altın kural

1. **Yumuşak sıvı sabun kullanarak ellerinizi yaklaşık bir dakika boyunca yıkayınız.** Sert/kalıp sabun kullanımı uygun değildir, kalıp sabunun yumuşak yüzeyi mikropların barınıp üreyebilmesi için ideal ortam oluşturur. Enfeksiyonu önlemek için sıvı sabun dispenseri kullanılmalı ve bu dirsek ile kullanılmalı veya kızıl ötesi sensor yardımı ile otomatik kullanım sağlamalıdır. Bu şekilde çapraz enfeksiyon riskini en aza indirilir. Eller yıkanırken, bilek kısmının yıkanmasına özen gösteriniz. Ellerin 1 dakikadan fazla yıkanması etkisini artırmaz, sadece cildinizin daha fazla strese maruz kalmasına sebep olur.
2. **Ellerinizi sadece soğuk su kullanarak yıkayınız ve durulayınız.** Sıcak su eliniz yüzeyindeki doğal cilt yağ tabakasını eriterek gözeneklerin açılmasına ve dolayısıyla bakterilerin bu gözeneklere girmesini sağlar. Sıvı sabun uygulanmadan önce cildi su ile ıslatın. (Bu şekilde ellerin kuruması engellenmiş olur.) Cilt yüzeyindeki sabun soğuk su ile iyice durulanmalı, aksi takdirde sabun kalıntıları cildin alerji olasılığını artırır.
3. **Ellerinizi tek kullanımlık havlu/peçete ile kurulayınız.** Ellerin kurulanması yüzeyindeki bakterilerin ve enfeksiyonların silinerek alınmasını sağlar. Parmak aralıkları dahil elinizin tüm yüzeyi kurulanmalı. Kumaş havlu, bez havlu, rulo bez havlu veya sıcak hava kurutucuları kullanımı uygun değildir ve bakterilerin dağılmasını ve elleri tekrar enfekte edecektir.

☀ El yıkama ile ilgili OROCLEAN'den İpuçları ve Hileler

- ▶ Soğuk su kullanınız. Sıcak su gözenekleri açarak bakterilerin kolaylıkla cilde nüfus etmesini sağlar. Bunun yanı sıra sıcak su doğal cilt yağını eritir.
- ▶ Yumuşak sıvı sabun kullanın. Kalıp sabun mikro organizmaların üremesi için ideal ortamdır.
- ▶ Eller sabun ile yıkandıktan sonra iyice durulayarak sabun kalıntı kalmamasını sağlayın aksi takdirde alerjik durum meydana gelebilir.
- ▶ Eldeki mikroplar ancak ovularak yok edilebilir. Yıkama sonunda tek kullanımlık havlu yardımı ile elleri iyice kurulayınız. Tekrar kullanılabilir havlular, rulo havlular ve sıcak hava kurutucuların kullanımı uygun değildir. Araştırmalar bu yöntemlerin bakterileri ve mikropların dağılmasında yardımcı olduğunu göstermektedir.

OROLIN® Losyon

Anti bakteriyel, dermatoloji onaylı sıvı yıkama losyonu

OROLIN® Losyon dermatoloji onaylı ve alkali içermeyen anti bakteriyel ajan içerikli sıvı el yıkama losyonudur. İçerdiği besleyici maddeler ile cildin dengeli ve sağlıklı kalmasını sağlayarak ciltte kuruluk ve tahriş önler. OROLIN® Losyon özellikle hassas ciltler için uygundur ve hoş orman esintisi kokuludur.

- **Tahriş etmeden temizler**
- **Nemlendirici etkisi verir.**
- **Anti Bakteriyel etkisi**

Kullanımı

Elleri ıslatın ve bir dozaj OROLIN® Losyon uygulayınız. Parmakları ve elinizi ovarak sabunlayınız ve bol soğuk su altında elleri iyice durulayınız.

Kapsam Alanı ve Uygulama

- Ellerin yıkanmasında kullanılır.
- OROLIN® Losyon özellikle hassas ciltler için idealdir.

Sıkça Sorulan Sorular

► **Ellerimi ne zaman yıkamalıyım?**

Genelde çalışma gününe başlamadan önce, tedavi sürecinde iken göz ile görülebilir bir enfeksiyon var ise, arada mola verildiğinde öncesinde ve sonrasında ve çalışma günü sona erdiğinde.

► **OROLIN® Losyonu güç içerisinde birkaç sefer kullanabilir miyim?**

Evet. OROLIN® Losyonun içerdiği özel seçilmiş cilt koruyucu ajanları cildin nem dengesini korur ve sık yıkamadan ve kurulamadan medya gelen tahrişlere karşı koruyucu vazifesi görür.

► **OROLIN® Losyonu kullandıktan sonra ellerimi nasıl kurulayabilirim?**

Ellerinizi tek kullanımlık havlu yardımı ile kurulayınız.

► **Kalıp sabunların kullanılmamasını duydum. Bu doğrumu?**

Evet. Eller her zaman sıvı sabun ile yıkanmalıdır, kalıp sabun ile değil. Kalıp sabunundaki nem mikro organizmaların üremesi için ideal ortam yaratır. Bunun yanı sıra sabun artıkları alerjiye sebebiyet verebilir.

Paket biçimi ve Aksesuarları

50ml, 1 litre, 5 litre

Dirsek duvar dispenseri (500 ml), Dirsek duvar dispenseri (1 litre)

İçerik (INCI doğrultusunda Komisyon direktifi 2006/257/EEC anlamında)

Aynen yazılacak.

Fiziki Özellikleri

Renk:	Beyaz Sıvı
Koku:	Limon Kokusu
Raf Ömrü:	18 Ay
pH-Değeri:	Nötr

El Dezenfeksiyonu

30 Saniye içerisinde bakterilerden arının!

Diş hekimliğinde basit bir şekilde elinizi temizlemeniz yeterli değildir. Bakterilerden arınmak için el dezenfeksiyonu kaçınılmaz bir uygulamadır.

Ellerinizi ne zaman dezenfekte etmelisiniz?

- Tedavi öncesi ve sonrası
- Tedaviye ara verildiğinde
- Gözle görülür bir enfeksiyon veya kan, irin veya diğer bulaşıcı materyaller ile temas edildiğinde
- Enfekte edici objeler, enstrümanlar veya yüzeylere temas edildiğinde

El dezenfeksiyonunda 3 altın kural

1. **Dispanserden doğru miktarı uygulayınız.** Gerekli olan uygulanacak miktar üretici talimatlarında belirtilir. Normalde 3 ml, yaklaşık 1 şeker kaşığı miktarı, yeterlidir. Eğer bundan az bir miktar uygulanırsa dezenfekte işlemi yeterli gelmeyebilir – eğer fazlası kullanılırsa cilde gereksiz yere fazla stres yüklenebilir.
2. **Sadece kuru ellere dezenfektan uygulayınız, kullanımdan derhal önce veya sonrasında ellerinizi yıkamayınız ve krem sürmeyiniz.** Ellerinizi nemli veya ıslak ise, kullanılan dezenfektan sıvısı sulanır ve istenilen etki elde edilemeyebilir. El kremi kullanılan dezenfektanın yapısını olumsuz etkileyerek etkinliğini bozarak ciddi sağlık tehdidi oluşturabilir.
3. **El dezenfeksiyonunda 6 aşamalı uygulama prosedüründen dışarı çıkmayın ve mecburi olan uygulama hareket şekli (EN 1500 standartları doğrultusunda) dışı çıkmayın ve dezenfektanın 30 saniye boyunca uygulayın.** Dezenfeksiyon işlemi süresince eldeki tüm yüzeye dezenfektan temas etmeli.

Ama bakteriler sadece ciltte bulunmazlar: araştırmalarda steril olmayan eldivenlerde patojenlerin üremesini kolaylaştıran aerosol bulutlar içererek enfeksiyona neden olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra eldivenlerin %10–20 sinde cerrahi işlem sonucunda eldiven yüzeyinde ufak delikler meydana geldiği kanıtlanmıştır. Eldivenlerin dezenfeksiyonunda, el dezenfeksiyon prosedürleri ve ürünleri kullanılabilir. Kullanılacak dezenfektanın eldiven ile uyumluluğu kesinlikle sağlanmalı. Önemli: Tekrar kullanılan tek kullanımlık eldivenler için dezenfeksiyon uygun olmaz.

El Dezenfektanları – Doğru seçim için kriterler

- İçeriği: El dezenfektanları genelde alkol bazlıdır. Yüksek etkinlik için ürün birçok değişik aktif ajanlar içermelidir.
- Geniş etkin alan: Ürün bakteri, TB, fungi, HBV, HCV ve HIV gibi hastalıklara karşı etkili olmalıdır. Ürün aynı zamanda daha agresif olan ve kolaylıkla ve hızlı bir şekilde damla transmisyonu ile veya direkt temas ile geçen adenovirüs, norovirus ve enflüanza virüslerini etkin bir şekilde öldürme gücü sağlamalıdır.
- DGHM/VAH – Alman Hijyen ve Mikrobiyoloji Derneği kayıtlı: Ancak bu şekilde üreticinin ürününde beyan ettiği etkinlik bilgileri doğrulanabilir ve kanıtlanabilir.
- Lisans Numarası: El dezenfektanları biosidal ürünler olduğundan CE işaretleri olmaz. Bununla birlikte üretilen ülkeden lisans numarası almak zorunluluğu vardır.
- Uygulama Süresi: Avrupa standartları hijyenik el dezenfektanlarının uygulama/ovma süresini 30 saniye olarak uygun görmüştür. Bu süre zarfında etkinlik sağlamalıdır.
- Cilt uyumluluğu: Cilt koruyucu maddeler cildin su kaybetmesine karşı koruma sağlayarak alerji oluşumunu engeller. Buda kullanıcının uzun yıllar cildinde sorun yaşamadan uygulama yapılmasını sağlar.
- Koku: Kokulu dezenfektan klinik içerisinde tipik bir “diş hekim kokusu” oluşumunu minimiz eder.
- Mücevher kullanmayınız. Kol saati ve yüzükler bakteri saklamak için idealdir. Uzun tırnaklar ve tırnak ojesi de bakterilerini saklamak için ideal ortamdır. Uzun tırnaklar uygulama esnasında genelde kırılır ve enfeksiyon kapmak için yüksek risk oluşturur. Bununla birlikte tırnak ojesindeki kimyasal maddeler dezenfektanın etkinliğini etkileyebilir.
- Dezenfektanı sadece kuru cilde uygulayınız. Nemli veya ıslak elden dolayı dezenfektan sulanır ve etkinliğini ciddi derecede etkiler.

- Dezenfektan sıkarken dirseklerinizi kullanın. İdeal koşullarda klinikte temassız otomatik dezenfektan dispanserleri bulunmalıdır.
- Doğru ovma yöntemi EN 1500 standartları uyumlu olan kanunen 6 aşamalı uygulama tekniğidir. Bekleme ve sürme teknikleri kesinlikle uygulanmalı ve uyulmalı. Dikkat: Dezenfeksiyon işlemi süresince eldeki tüm yüzeye dezenfektan temas etmeli.
- Üretici talimatları doğrultusunda doğru miktarı kullanın.
- Ellerinizi dezenfekte ettikten veya etmeden hemen önce yıkamayın veya krem sürmeyin, dezenfektanın etkinliğini etkileyebilir.

OROSEPT® Solüsyon

Geniş kapsamlı, doğal cilt nemlendiricili el dezenfektanı

OROSEPT® Solüsyon kullanıma hazır, alkol bazlı el ve dirseklerin cerrahi ve hijyenik dezenfeksiyonu içindir. Sık kullanımda dahi doğal cilt nemlendirici içeriği cildin nem dengesini korumasında yardımcı olarak kuruluk ve tahriş olasılığını önler. OROSEPT® Solüsyon her hangi bir boya içermez ve en hassas ciltlere dahi nazik ve uygundur. Taze, limon kokusu OROSEPT® Solüsyonu kullanımı çok hoştur. OROSEPT® Solüsyon steril olmayan lateks, vinil ve nitril eldivenlerin dezenfeksiyonu için idealdir. Çevreye zarar vermeden toprakta çözünebilir.

- **Nemlendirici içerir**
- **Kısa uygulama zamanı**
- **Hoş Limon kokulu**

Kullanımı

Ürünü kuru ellere sürünüz ve 6-aşamalı teknik (EN 1500) kullanarak ellerinizi iyice sürünüz.

Hijyenik el dezenfeksiyonu için:

1 x 3ml kullanarak 30 saniye boyunca ovun.

Cerrahi el ve kol dezenfeksiyonu için:

2 x 5ml kullanarak 3 dakika.

Uygulama süresi boyunca elleri ürün ile nemli/ıslak tutun. Mukoza dokusunda kullanımı uygun değildir.

Kapsam Alanı ve Uygulama

El ile kolların dezenfeksiyonunda kullanılır.

OROSEPT® Solüsyon steril olmayan, tek kullanımlık lateks, vinil ve nitril eldivenlerin dezenfeksiyonunda kullanılır.

Cilt ve Materyal Uyumluluğu

► İnsan cildi	Uyumlu
► Polietilen	Uyumlu
► PTFE	Uyumlu
► Polipropilen	Uyumlu
► Lateks Eldiven	Uyumlu
(Steril olmayan tek kullanımlık muayene eldiveni)	Uyumlu
► Dökme demir	Uyumlu
► Alüminyum	Uyumlu

Sıkça Sorulan Sorular

► Ellerimi ne zaman yıkamalıyım?

Genelde çalışma gününe başlamadan önce, arada mola verildiğinde öncesinde ve sonrasında ve çalışma günü sona erdiğinde. Tedavi sürecinde iken kan veya irin veya diğer enfeksiyon sebebiyet verebilecek göz ile görülebilir bir enfeksiyon var ise veya enfeksiyonlu enstrüman, cihaz veya yüzeyler ile temas edildiğinde.

► Tam olarak OROSEPT® Solüsyon ne zaman uygulamalıyım?

Eldiven giymeden öncesi ve sonrasında

► **OROSEPT® Solüsyon kullanarak eldivenlerimi dezenfekte edebilir miyim?**

Evet. OROSEPT® Solüsyon steril olmayan, lateks, vinil, nitril mamul tek kullanımlık eldivenlerin dezenfeksiyonu için uygundur.

► **OROSEPT® Solüsyon gün içerisinde kaç defa kullanabilirim?**

İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz. İçerdiği doğal nemlendirici ile OROSEPT® Solüsyon cildinizin sağlıklı cilt dengesini koruyarak kuruluk veya tahrişten korur.

Güvenlik Önlemleri

R10 Yanıcı. R41 gözlerde kalıcı ve ciddi zarar tehlikesi. S2 Çocukların erişebileceği yerden uzak tutunuz. S16 Tutuşturucu özelliği olan bölgelerden uzak yerde muhafaza ediniz – Sigara içmeyiniz. S25 Göz ile teması engelleyiniz. S26 Göz ile temas ederse, bol su ile gözü yıkayınız ve medikal yardıma başvurunuz. Dezenfektanları güvenli bir şekilde kullanınız. Kullanım öncesi ürün etiketini ve prospektüslerini dikkatlice okuyunuz.

Paket biçimi ve Aksesuarları

100ml, 500ml, 1 litre, 2 litre, 5 litre, 10 litre

Dirsek duvar dispanserli (500 ml), Dirsek duvar dispanserli (1 litre)

Etki Alanı / Kullanım Süresi

Bakterisit	30 saniye
Fungusid	30 saniye
Tüberkülosid	30 saniye
MRSA (1)	30 saniye
Hepatit B / HIV (2)	30 saniye
Hepatit C (3)	30 saniye
Koronavirüs (4)	30 saniye
Enflüanza	30 saniye
Adenovirüs	60 saniye
Norovirüs (5)	3 dakika

1) Karma ilaç dirençli Staphylococcus aureus; 2) HBsAg Antijen testi; 3) BVDV taşıyıcı testi; 4) BCoV taşıyıcı testi; 5) FCV taşıyıcı testi.

DGHM Standard metotları ve EN 1500, prEN 12791, prEN 12054, AFNOR NF T 72150, NF T 72170, NF T 72200 uyumlu; DGHM / VAH listelenmiş kuruluş.

Biyomedikal ürün yetki numarası: CHZB0364

100g'daki içeriği

Aynen yazılacak.

Fiziki Özellikleri

Ren:	Şeffaf, Renksiz Sıvı
Koku:	Limon kokulu
Raf Ömrü:	48 Ay
pH-Değeri:	Nötür

OROMED® Jel

Nazık, geniş etki alanlı yapışkan hissi vermeyen el dezenfektanı

OROMED® Jel kullanıma hazır geniş anti mikrobik özellikli hidro-alkolik jel el ve dirseklerin cerrahi ve hijyenik dezenfeksiyonu içindir. Düşük viskozite içeriği sayesinde damlamayan kolay sürülebilir. Şeffaf ve yapışkan olmayan ve artık bırakmayan formülü sayesinde kullanımı hoş ve cilt yüzeyinde kuruyarak ciltte ipeksi hoş bir his bırakır. OROMED® Jel kendi has bir cilt koruma sistemi, nemlendiriciler, emolientler, vitaminler ve iyileştirici içeriklerinden oluşan bu sistem en hassas ellerde oluşan dezenfektana karşı hassasiyeti önler. OROMED® Jel kuruluk ve tahrişe karşı ferahlık sağlar. Yüksek miktarda antioksidan ve anti-yaşlanma maddeleri ciltte oluşan serbest radikalleri nötrleyerek elde erken yaşlanma hissini giderir. OROMED® Jel biosidal maddelerden, koku ve boyalardan arındırılmıştır. Jel kolaylıkla doğaya geri dönüşebilir ve çevre zarar vermez.

- **Anti-Aging (yaşlanmayı geciktiren) madde içerir**
- **Düşük viskozitesi ile damlama yapmaz**
- **Biosidal maddelerden, koku ve boyalardan arındırılmış formül**

Kullanım

Ürünü kuru ellere sürünüz ve 6-aşamalı teknik (EN 1500) kullanarak ellerinizi iyice sürünüz.

Hijyenik el dezenfeksiyonu için:

1 x 3ml kullanarak 30 saniye boyunca ovun.

Cerrahi el ve kol dezenfeksiyonu için:

2 x 5ml kullanarak 3 dakika.

Uygulama süresi boyunca elleri ürün ile nemli/ıslak tutun. Mukoza dokusunda kullanımı uygun değildir.

Kapsam Alanı ve Uygulama

El ile kolların dezenfeksiyonunda kullanılır.

Cilt ve Materyal Uyumluluğu

► İnsan cildi	Uyumlu
► Polietilen	Uyumlu
► PFTE	Uyumlu
► Polipropilen	Uyumlu
► Dökme demir	Uyumlu
► Alüminyum	Uyumlu

Sıkça Sorulan Sorular

► **Jelin sıvılara olan avantajları nedir?**

Jelin uygulaması daha kolaydır, kullanım esnasında daha hoş bir his verir, damlamama özelliği ile daha ekonomiktir.

► **Jeller sıvı el dezenfektanından daha az aktif mi?**

Araştırmada görülmüştür ki jeller likitlere nazaran mikroorganizmalara karşı daha az aktif. Buna rağmen, OROMED® Jel bağımsız olarak test edilmiştir ve kullanım süreleri ve etki alanı teyit edilmiştir.

► **Jel ile sıvı arasında uygulamada bir fark var mı?**

Hayır, jeller sıvı el dezenfektanlarında olduğu gibi aynı sıklıkta ve aynı yöntemle uygulanır.

► **OROMED® Jel'in cilt bakım özelliklerini etkin olmasının sebebi nedir?**

OROMED® Jel nemlendiriciler, emolientler, vitaminler ve iyileştirici içeriklerinden oluşan bu sistem en hassas ellerde oluşan dezenfektana karşı hassasiyeti önleyerek ciltte maksimum koruma, bakım ve his sağlar.

► **OROMED® Jel kullanmanın rakip jeller arasındaki avantajları nedir?**

OROMED® Jel sık kullanılsa dahi kullanım sonunda ciltte artık bırakmaz, parfüm ve renklendiricilerden arındırılmıştır ve yapışma hissi vermeden mükemmel cilt bakımı sağlar.

Güvenlik Önlemleri

R10 Yanıcı. R41 gözlerde kalıcı ve ciddi zarar tehlikesi. R67 Bu ürünün buharı baş dönme ve mide bulantısı yapabilir. S2 Çocukların erişebileceği yerden uzak tutunuz. S16 Tutuşturucu özelliği olan bölgelerden uzak yerde muhafaza ediniz – Sigara içmeyiniz. S25 Göz ile teması engelleyiniz. S26 Göz ile temas ederse, bol su ile gözü yıkayınız ve medikal yardıma başvurunuz. S35 Bu ürün ve kabı güvenli bir şekilde imha/atılmalı.

Paket biçimi ve Aksesuarları

30ml, 1 litre, 5 litre, 10 litre

Dirsek duvar dispenseri (500 ml), Dirsek duvar dispenseri (1 litre)

Etki Alanı / Kullanım Süresi

Bakterisit	30 saniye
Fungusit	30 saniye
Tüberkülosid	30 saniye
Zarflı virüsler (HBV, HIV dahil)	30 saniye
Hepatit C	30 saniye
Vaccinia Virüs	30 saniye
Enflüanza A Virüs	30 saniye

DGHM Standard metotları ve EN 1040, EN 1275, EN 1500 uyumlu; DVV / RKI yönetmeliğine uygun.

Biyomedikal ürün yetki numarası: CHZB0364

100g'daki içeriği

Aynen yazılacak.

Fiziki Özellikleri

Ren:	Renksiz hafif kıvamlı Sıvı
Koku:	Alkol
Raf Ömrü:	18 Ay
pH-Değeri:	Nötür

El Bakımı

Günün son İşi!

Alkol ve dezenfektanı günlük kullandığımızda ellerimize ciddi rahatsızlıklar verecektir.

Elimizde çatlaklıklar ve pürüzler oluşmaya başlayabilir, dezenfeksiyon işlemi yaparken ellerimizde yanma hissi oluşarak bu işlemten soğuma ve dezenfeksiyon protokolünü yapmama ihtiyacı duyulabilir. Uygun el kremleri cildin bakımını yapar ve nem oranlarını dengeler.

El bakım ürünlerini ne zaman kullanmalısınız?

- Çalışma gününün sonunda
- Uzun aralık verildiğinde

El Bakımında 3 Altın Kural

1. **Cildinize hızlı ve tamamen nüfuz edilebilen bir el kremi tercih edin.** Aksi taktirde cilt üzerinde yağlı bir katman oluşarak işlem yapmanıza engel teşkil edecektir.
2. **Nemlendirici ve cilt bakım materyalleri bulunan ürünler eldeki nem oranını dengelemede yardımcı olur.** Yapılan araştırmalara bakıldığında dezenfektanlara karşı alerjik bir durum var olmasının en büyük sebeplerinden birisi yetersiz cilt bakımı yapılmadığından meydana geldiği görülmektedir. Nemlendiriciler ve kokulardan meydana gelen alerjik durumlar nadir yaşanmaktadır.
3. **Petrol yan ürünleri içeren el bakım kremleri kullanmaktan kaçının.** Parafin gibi petrol yan ürünleri lateks, vinil ve nitril eldivenlerin yapısını bozar. Günlük dezenfeksiyon ve yıkamadan meydana gelen yıpranmalara karşı eller tüm gün boyunca korunmalı. Sağlıklı ve pürüzsüz eller rahatlıkla ve ellere zarar vermeden dezenfekte ve yıkanabilir. Cilt hasar görmüş, çatlamış veya gözenekli ise dezenfeksiyonu uygun olmaz. Meydana gelen sancı/acı uyumluluğu bertaraf eder.

El bakım kremleri gün içerisinde çalışma esnasında veya aralıklarda kullanılabilir. Ürünleri dispenslerden veya şahsi tüplerden kullanmayı tercih ediniz ve kavanozdan kullanmaktan kaçınınız. Bu tür ürünler ciltteki nem seviyelerini tekrar yapılandırır. Bu özellikle soğuk hava koşullarında, kuru ısıtıcı havası ellere ciddi tahrişe uğratır.

El kremi kullanmaktan kaçının:

- Dezenfeksiyon uyguladıktan hemen sonra ve öncesinde
- Eldiven giymeden önce

☀ El bakımı ile ilgili OROCLEAN'den İpuçları ve Hileler

- Ürünü gün içerisinde birkaç sefer uygulayınız.
- Cildiniz tarafından tamamen emilebilen bir cilt kremi kullanınız, bu şekilde el yüzeyinde yağlı bir tabaka bırakmaz.
- Uygulayacağınız ürünün nemlendirici ve bakım özelliklerini gözetleyiniz, bu şekilde nem oranı denetim altına alınabilir.
- Petrol bazlı el kremi kullanmayınız aksi takdirde lateks, vinil ve nitril eldivenlerin yapılarını olumsuz olarak etkileyebilir.

OROCREME

Tahriş olmuş ve hassas ciltler için ekonomik el kremi

OROCREME gündelik kullanılabilen sıvı el kremidir. Dikkatlice seçilmiş besleyici içeriği ile ellerinizi yumuşak ve pürüzsüz bırakırken tahriş olmuş ve kurumuş ellerinizi rahatlatır. OROCREME cildinizin doğal nem oranını dengeler ve korur. El Kremi kolaylıkla emilir, yağsızdır ve cildin nemli kalmasını sağlar.

- **Hızlı emilim**
- **Nemlendirici maddeler içerir.**
- **Yağsız**

Kullanım

Güç içerisinde birkaç aralıklarla uygulayınız. El yıkama losyonları veya sabun kullanımından kaynaklanan cilt kuruluğu yaşayan kişiler için kullanımı tavsiye edilir.

Kapsam Alanı ve Uygulama

- **Ellerin günlük bakımında**
- **Hassas, kuru ve yıpranmış eller**

Sıkça Sorulan Sorular

► **OROCREME hangi sıklıkta uygulamalıyım?**

Günde birkaç sefer OROCREME bakım ürünüdür ve sık yıkanan ellerde meydana gelen kuruluk ve hassasiyet rahatsızlıklarında kullanımı için idealdir.

► **Ellerim kuru değil. Yinede cilt kremi sürmeli miyim?**

Önem almak her zaman iyidir. Günlük el yıkama, dezenfeksiyon ve eldiven kullanımı elde cilt problemleri yaşanmasına sebebiyet verebilir. Ciltte düşük nem semptomlarına dikkat gösterin.

► **Eldiven giymeden önce el kremi sürebilir miyim?**

Hayır. El kremi eldivendeki lateks proteinlerin ve tahribat yaşatabilecek diğer maddelerin cilde geçirgenlik olasılığını artırır. Bunun yanı sıra, el kremi lateks kumaşı ile reaksiyon haline girip ciltte alerji ve kaşınmalara sebebiyet verebilir.

► **Kremlerde yağlamamı yoksa nemlendirici etkisi mi olmalı, yoksa her ikisi demi olmalı?**

El kremleri en azından nemlendirici etkisi olmalı. Yağlama etkisi olan bir ürün genellikle geride yağlı katmanlar bırakabilir, nemlendiriciler ise cildin daha derinliklerine ulaşarak nem seviyesini kontrol altına alır.

Güvenlik Önlemleri

S25 Göz ile teması engelleyiniz. S26 Göz ile temas ederse, bol su ile gözü yıkayınız ve medikal yardıma başvurunuz.

Paket biçimi ve Aksesuarları

230ml dispanserli, 500ml

İçerik (INCI doğrultusunda Komisyon direktifi 2006/257/EEC anlamında)

Aynen yazılacak.

Fiziki Özellikleri

Renk:	Pembe sıvı
Koku:	Orman Esintisi kokusu
Raf Ömrü:	30 Ay
pH-Değeri:	5.5 – 6.5

Yüzeylerin Dezenfeksiyonu

Bakterilere karşı Geniş kapsamlı Savaş açın

Her hasta birer potansiyel bakteri taşıyıcısıdır. Delme ve cilalama mikroorganizmaların hastanın ağ ortamından hasta koltuğunun 2 metre çapına dağılmasa sebep olur. Klinikteki eşyaları, hortumları, enstrümanları ve göz koruyucu gözlüklere kadar her yeri enfeksiyon ile kaplıyabilir. Buda temas ile dağılan hastadan hastana nakledilebilen enfeksiyon risklerini ciddi derecede artırır. Ulaşılabilecek en ücra köşeler dahi enfeksiyon riskinden kaçamazlar. Mikroplar elden kapı kollarına, telefonlara veya ışık düğmelerine bulaşır buda yüzey dezenfeksiyonunu oldukça önemli dereceye yükseltir.

Yüzey Dezenfektanları – Tercih için 9 kriter

Yüzeylerin dezenfeksiyonunda temelde alkol bazlı, hızlı dezenfeksiyon yapan ürünler kullanılır. Buna rağmen uygun bir yüzey dezenfektanı seçimi karmaşık ve komplike olabilir. Doğru seçimi yapabilmek için işte burada birkaç önemli noktalar verdik:

1. **Aldehit veya fenol içeren ürünler kullanmayınız:** bu ajanlar insanlar için toksik ve zehirleyicidir.
2. **Düşük kimyevi ve alkol içeriği:** kimyasallar ve alkol deriyi ve mukoza zarlarına, aynı zamanda çevreye zarar verebilirler.
3. **Hızlı harekete geçen:** hastalar arası hızlı dezenfekte işlemine olasılık tanır.
4. **CE işaretli ve Alman Hijyen ve Mikrobiyoloji Derneğine (DGHM) kayıtlı:** bu dernekte listelenerek ürün hakkındaki bilgilerin doğru olduğunu ve tüm hukuki gereksinimlere uygunluğundan emin olabilirsiniz.
5. **Etkili Alan:** Yüzey dezenfektanlarının en azında bakteri, fungi, TB, HBV and HIV karşı etkin olmalı.
6. **Ürün kullanım alanı ve kullanım biçiminin doğru tespiti:** Ürün seçiminde karışıklığı ve uygunsuz kullanımı engeller.
7. **Maliyeti düşük konsantre kıvamı:** %2 konsantre yerine %1 konsantre kullanımı maliyeti yarı yarıya azaltır.
8. **Mükemmel Malzeme uyumluluğu:** dişçi koltuğu ve diğer medikal cihazlar pahalı olabilir dolayısıyla bu tür cihazlara zarar vermeyen ürün kullanımı gerekir.
9. **İz veya artık bırakma:** zaman kazandırır.

1001 yüzey – 1001 ürün?

Her yüzey için her ürün uygun değildir. Doğru ürünü doğru yüzeyde kullanmak hem maliyet tasarrufuna hem de zaman kazanmaya yarar ve çevresel izleri azaltır.

- Küçük çalışma alanları ve medikal cihazlar için hızlı çalışan sprey ve silme dezenfektanları.
- Dezenfektana batırılmış ıslak silme bezleri enstrümanları ve yüzeyleri hızlı dezenfekte eder. Satın alma kararını verirken, kutu içerisindeki silme bez adedini/refil paketi, bez boyu, bezin kalitesi ve kalınlığını dikkate alın. Büyük boy bezler daha az maliyetlidir. Bezin doyma seviyesi o bezin kullanım yüzey miktarını belirler.
- Doğru bakım ve doğru dezenfektan seçimi dişçi koltuğunun kullanım ömrünü uzatır.

Bakterilere karşı olan savaşı devam ettirmek

Her tedavi sonrasında hasta etrafındaki yüzeylerin tümü iyice dezenfekte edilmelidir. Bu bölgeler mümkün olduğunca boş bırakarak hızlı ve etkin dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilmeli.

Hastaya uzak bölgelere ise gözetim yeterlidir, tek ayrıcalık hemen temizlenip dezenfekte edilebilen gözle görülebilir kan, irin, ve diğer enfeksiyon edici sıvılarının bulunduğu enfeksiyonlu yüzeylerdir.

☀ Yüzey dezenfeksiyonu ile ilgili OROCLEAN'den İpuçları ve Hileler

- Rutin temizlik: Temizleme ve dezenfeksiyon prosedürleri rutin olarak aynı şekilde uygulanmalı, bu şekilde dezenfekte edilmemiş unutulmuş yüzey kalmaz.

- Cimri olmayın: Dezenfektan yüzeyi tamamen kaplamalı, ancak bu şekilde yüzey dezenfektanının kapsam alanı ve etki alanı sağlanıp bakteriler ile etkin bir şekilde savaşır komple bir dezenfeksiyon elde edilebilir.
- Sprey sıkmayın, silin: bu şekilde havaya aerosol yöntemi ile dezenfektan karışmasını engelleyip hava yolları tahriş edecek unsur oluşmaz. Bunun yanı sıra silerek yüzeyin tümü kaplanmış olur. Sprey şeklinde kullanıldığında çoğu zaman her yer kaplanmayabilir.
- Kolayca ıslatın: Kurumuş silme bezi basit bir şekilde dezenfektan ile ıslatılıp tekrar kullanılabilir. Sadece aynı üreticinin aynı ürünü ile ıslatıp kullanın.
- Aşırı enfeksiyon kaplanmış yüzeyler: Yüzeyi ilk önce dezenfektana batırılmış tek kullanımlık beze ile silip sonra tüm yüzeyi dezenfekte ediniz.
- Güvenlik: Gözünüzü, cildinin ve hava yolunuzu korumak için uygulama esnasında her zaman maske, göz korucu ve eldiven kullanınız. Dezenfeksiyon işlemi bittikten sonra pencereleri açarak havalandırmasını sağlayın.

ISORAPID® Sprey

Düşük alkol içerikli geniş kapsam alanlı şimşek hızlı dezenfektan.

ISORAPID® Sprey aldehit içermeyen, kullanıma hazır spreyliye bilir ve silinebilir varyasyonlarında medikal cihaz (örneğin: laboratuvar masaları, tedavi koltukları, diş hekimi koltuğu yüzeyi, alet tepsisi, başlık ve anguldurva, reflektör destek kolları, çelikten/alüminyum/bakır/silikon veya kauçuktan mamul dental enstrümanlar) dezenfektanıdır.

%50'den daha az alkol içererek alerji oluşum potansiyeli azaltırken ürünün materyal uyumluluğunu artırır. ISORAPID® Sprey kolaylıkla doğaya geri dönüşebilir ve taze ve çiçek kokusu sizi ferahlatır. ISORAPID® Sprey aynı zamanda DENTIRO® Wipes ve ISORAPID® Wipes etkinlik süresini uzatmada kullanılabilir. Kendi nemli bezinizi oluşturmak için ISORAPID®'i Kuru bir bezin üzerine dökmeniz yeterlidir.

- **Geniş etkin alan**
- **%50'den daha az alkol içeriği**
- **Mükemmel materyal uyumluluğu**

Kullanımı

Dezenfekte edilecek yüzeye veya objeyi komple sürerek nemlendirin ve reaksiyonu tamamlaması için süresini bekleyin (Bekleme sürelerine uyun). Gerektiğinde, yüzeyi ve objeleri tek kullanımlık bez ile silerek kurulayınız. Alkol ile uyumlu materyaller üzerinde kullanınız. Hassas materyaller üzerinde kullanılacak ise önceden küçük bir yere sürerek deneyin.

Kapsam Alanı ve Uygulama

medikal cihazlar, laboratuvar masaları, tedavi koltukları, diş hekimi koltuğu yüzeyi, alet tepsisi, başlık ve anguldurva, reflektör destek kolları, çelikten/alüminyum/bakır/silikon veya kauçuktan mamul dental enstrümanların sprey veya silme metodu ile hızlı aktifleşen dezenfektasyonu içindir.

Materyal Uyumluluğu

► Polietilen	Uyumlu
► PFTE	Uyumlu
► Polipropilen	Uyumlu
► Silikon Kauçuk	Uyumlu
► Kauçuk	Uyumlu
► PVC	Uyumlu
► Akrilik Cam	Uyumlu
► Çelik	Uyumlu
► Dökme demir	Uyumlu
► Alüminyum	Uyumlu
► Bakır	Uyumlu
► Pirinç	Uyumlu

Sıkça Sorulan Sorular

► ISORAPID Sprey uyguladıktan sonramı sileceğim?

Evet. Mevzuata göre yüzey dezenfeksiyonu "spreyle ve sil" yöntemi uygulanır. Silmek, yüzeydeki bakteri ve kalıntıları mekaniksel olarak alınmasını sağlar.

► Spreyle menin dezavantajları nedir?

Yüzey dezenfektanları çeşitli kimyasal maddeler içerir ve bunlarda aerosol yardımı ile odadaki havaya karışabilir. Bu partiküllerin teneffüs edilmesi alerjilerin oluşmasını veya insanın hava yolunda tahriş meydana gelmesine sebebiyet verebilir.

► ISORAPID® Sprey'i alet dezenfeksiyonunda kullanılabilir mi?

Evet. ISORAPID® Sprey küçük ve uyumlu olan materyal özelliğine sahip enstrümanlarda kullanılabilir.

► ISORAPID® Sprey'i DENTIRO® Wipes ile beraber kullanabilir miyim?

Evet. Her iki üründe aynı özelliklere sahip olduğundan, ISORAPID® Sprey'i kullanarak DENTIRO® Wipes ve ISORAPID® Wipes ıslatılabilir.

Güvenlik Önlemleri

R10 Yanıcı. R41 gözlerde kalıcı ve ciddi zarar tehlikesi. S2 Çocukların erişebileceği yerden uzak tutunuz. S16 Tutuşturucu özelliği olan bölgelerden uzak yerde muhafaza ediniz – Sigara içmeyiniz. S23 Spreyi teneffüs etmeyiniz. S25 Göz ile teması engelleyiniz. S26 Göz ile temas ederse, bol su ile gözü yıkayınız ve medikal yardıma başvurunuz. S51 Sadece hava sirkülasyonu rahat ve bol olan yerlerde kullanınız.

Paket biçimi ve Aksesuarları

100ml, 500ml, 1 litre, 2 litre, 5 litre, 10 litre

Etki Alanı / Kullanım Süresi

Bakterisit/Fungusi (1)	
(temiz durumlarda)	30 saniye
(kirli durumlarda)	60 saniye
MRSA (2)	30 saniye
Tüberkülosid	60 saniye
Mikobakterisit (M.avium) (1)	60 saniye
Hepatit B / HIV (3)	30 saniye
Hepatit C (4)	30 saniye
Korona virüs (SARS) (5)	30 saniye
Enflüanza A Virüs	30 saniye
Papova virüs (SV 40) (6)	60 saniye
Adeno virüs (6)	60 saniye

1) Pratik koşullar altında yapılmış testler dahil Yüzey Dezenfektanları için DGHM Standard metotlarına uyumlu; 2) Karma ilaç dirençli Staphylococcus aureus; 3) HBsAg Antijen testi; 4) BVDV taşıyıcı testi; 5) BCoV taşıyıcı testi; 6) Zarflanmamış virüs

DGHM Standard metotları ve EN 1040, EN 1276, EN 1275, EN 1650 (C. Albicans), EN 14348; uyumlu; DGHM/VAH listelenmiş.

100g'daki içeriği

Aynen yazılacak.

Fiziki Özellikleri

Renk:	Şeffaf, renksiz sıvı
Koku:	taze, çiçek kokusu
Raf Ömrü:	48 Ay
pH-Değeri:	Nötr

ISORAPID® Likit

Noro virüse karşı geniş kapsam alanlı hızlı dezenfektan

ISORAPID® Likit aldehit içermeyen, kullanıma hazır alkol bazlı hızlı dezenfekte eden medikal cihaz (örneğin: laboratuvar masaları, tedavi koltukları, diş hekimi koltuğu yüzeyi, alet tepsisi, başlık ve anguldurva, reflektör destek kolları, çelikten/alüminyum/bakır/silikon veya kauçuktan mamul dental enstrümanlar) dezenfektanıdır.

ISORAPID® Likit geniş spektrumlu anti-bakteriyel, anti-fungal ve anti-viral özellikleri bünyesinde barındırarak mikro-bakteri veya norovirüs gibi inat patojenleri 60 saniye içerisinde nötrler. Bu ürün modern anti-mikrobik maddeler üzerine üretilmiştir bu sayede hem daha güvenli olmasını hem de temizleme ajanı olarak ta kullanma imkanı sunar. %50 gibi az alkol içererek alerji oluşum potansiyeli azaltırken ürünün materyal uyumluluğunu artırır. ISORAPID Likit kolaylıkla doğaya geri dönüşebilir patlama ısısı 30° C üzerinde olması yanma tehlikesine karşı daha güvenlidir.

- **60 saniye içerisinde Norovirüsleri öldürür**
- **En sert koşullarda dahi yüksek çözünürlük sağlar.**
- **Modern anti-mikrobik içeriği vardır**

Kullanım

Dezenfekte edilecek yüzeye veya objeyi komple sürerek nemlendirin ve reaksiyonu tamamlaması için süresini bekleyin (Bekleme sürelerine uyun). Gerektiğinde, yüzeyi ve objeleri tek kullanımlık bez ile silerek kurulayınız. Alkol ile uyumlu materyaller üzerinde kullanınız. Hassas materyaller üzerinde kullanılacak ise önceden küçük bir yere sürerek deneyin.

Kapsam Alanı ve Uygulama

- Medikal cihazlar, laboratuvar masaları, tedavi koltukları, diş hekimi koltuğu yüzeyi, alet tepsisi, başlık ve anguldurva, reflektör destek kolları, çelikten/alüminyum/bakır/silikon veya kauçuktan mamul dental enstrümanların spray veya silme metodu ile hızlı aktifleşen dezenfektasyonu içindir.

Materyal Uyumluluğu

► Polietilen	Uyumlu
► PTFE	Uyumlu
► Polipropilen	Uyumlu
► Dökme demir	Uyumlu
► Alüminyum	Uyumlu

Sıkça Sorulan Sorular

► Norovirüslerin teşkil ettiği sağlık riskleri nelerdir?

Norovirüsler yüksek seviyeli enfekte edici virüslerdir, bunlar hastalarda ciddi derecede Gastroenteritis rahatsızlığına yol açarlar. Hafta sonu hastane ziyaretleri, uzun süreli hasta bakım klinikleri ve diğer genel açık kurum ve kuruluşlarda sıkça karşılaşılmaması ciddi bir sağlık sorunu haline dönüşebilme ihtimalini yükseltmektedir.

► Eğer Norovirüsler yemek, su ve diğer direkt temaslar yolu ile naklediliyorsa koruyucu önlem olarak neden yüzey dezenfeksiyonu önemlidir?

Tüm yüzeyler, özellikle el teması sık olan yüzeyler, patojenlerin ve özellikle norovirüs saçaklarının barındığı ve toplandığı rezerv haline dönüşür.

► Yüzeylerin hızlı dezenfeksiyonu esnasında norovirüsler neden problem teşkil eder?

Norovirüsler alkol bazlı dezenfektanlara karşı çok dirençlidir. Dezenfektan sıvısı 2 dakika içerisinde kuru, piyasadaki çoğu alkol bazlı yüzey dezenfektanları virüsü öldürmek için 2 dakikadan daha uzun süreler ihtiyaç duyar, dolayısıyla işlem hızlı yapılmalıdır.

► Alkol bazlı dezenfektanları patlama noktaları neden önem arz eder?

Patlama noktası yanıcı bir likidin hava ile karıştığında patlaması için gereken en düşük ısı değeridir. Eğer bu değer 21 C altında ise ürün "Yanıcı" olarak işaretlenmesi mecburidir ve dolayısıyla muhafazasında veya kullanımında yanma tehlikesi oldukça yüksektir.

Güvenlik Önlemleri

R10 Yanıcı. R41 gözlerde kalıcı ve ciddi zarar tehlikesi. S2 Çocukların erişebileceği yerden uzak tutunuz. S16 Tutuşturucu özelliği olan bölgelerden uzak yerde muhafaza ediniz – Sigara içmeyiniz. S26 Göz ile temas ederse, bol su ile gözü yıkayınız ve medikal yardıma başvurunuz. S51 Sadece hava sirkülasyonu rahat ve bol olan yerlerde kullanınız.

Paket biçimi ve Aksesuarları

1 litre, 5 litre, 10 litre

Etki Alanı / Kullanım Süresi

Bakterisit (1)	60 saniye
Fungusit (1)	60 saniye
Tüberkülosid	60 saniye
Mikobakterisit (1)	60 saniye
Zarflanmış virüsler (HBV, HIV dahil)	30 saniye
Hepatit C (2)	30 saniye
Vaksini virüs	30 saniye
Norovirüs (3)	60 saniye

1) Pratik koşullar altında yapılmış testler dahil Yüzey Dezenfektanları için DGHM Standard metotlarına uyumlu; 2) BVDV taşıyıcı testi, 3) MNV taşıyıcı testi.

DGHM Standard metotları ve EN 1040, EN 1276, EN 1275, EN 1650 (C. Albicans), EN 14348; uyumlu.

100g'daki içeriği

Aynen yazılacak.

Fiziki Özellikleri

Renk:	Şeffaf, renksiz sıvı
Koku:	Alkol
Raf Ömrü:	48 Ay
pH-Değeri:	Nötr

ISORAPID® XXL Wipes

Ekonomik, yumuşak ama yüksek dirençli geniş spektrumlu silme bezi

ISORAPID® XXL Wipes

ISORAPID® XXL Wipes, bu el bezleri ISORAPID® Sprey ile ıslatılıp medikal cihazları dezenfektasyonunda kullanılır (örneğin: laboratuvar masaları, tedavi koltukları, diş hekimi koltuğu yüzeyi, alet tepsisi, başlık ve anguldurva, reflektör destek kolları, çelikten/alüminyum/bakır/silikon veya kauçuktan mamul dental enstrümanlar). Kullanıcı tarafından hazırlandığından arzu edildiği miktar kadar dezenfektan ile ıslatılıp maksimum etkinliği ayarlanabilir. Bez çok yumuşak ve esnektir, bu şekilde uygulayacağınız ekipmana zarar vermezken yırtılmaz ve delik oluşmaz. Bezin dokusu temizlik kabiliyetini artıracak şekilde tasarlanmıştır. Bez mikro dokular ile üretilmiştir, bunun sayesinde en ufak partikülleri yüzeyden kaldırarak hapseder. Kuru silme bezi iki boyutta piyasaya arz edilmiştir: 80 yapraklık 29x29cm ebadında rulolar ve 100 yapraklık 29x20cm ebadında rulolar. Bunlar 2 litre ISORAPID® Sprey ile ıslatılır. Islatılacak miktar kullanıcı ihtiyacı doğrultusunda 1.5 ile 2.3 litre arasında değişebilir.

- **Yumuşak, dayanıklı uzun ömürlü silme bezi**
- **Kirin yüzeyden alınmasını optimize edecek doku**
- **Bir bez ile hasta arası yüzey dezenfeksiyonu için yeterli**

Kullanım

ISORAPID® XXL Wipes hazırlanması: Kuru bez rulosunu kovanın içerisine yerleştirin ve rulonun ilk yaprağını yuvasının ucundan çıkacak şekilde ayarlayınız. Rulonun yüzeyine eşit şekilde istediğiniz miktarda ISORAPID® Sprey ile ıslatın. Kovanın kapağını kapatın, 30 dakika bekleyin ve ilk bezi kovanın yuvasından çekin. Kovanın kapağını iyice oturtun. Yapılış tarihi, kullanılan dezenfektan miktarı ve kovayı hazırlayan bilgileri içeren etiketi kovanın üzerine yapıştırın. Hazırlanan ISORAPID® XXL Wipes 30 gün içerisinde kullanılmalıdır.

Kullanım: ISORAPID® XXL Wipes kovadan bezi 45 C açıda kenara doğru çekiniz. Dezenfekte edilecek yüzey ve cismin tamamını nemlendirecek/ıslatacak şekilde uygulayınız ve reaksiyonu tamamlaması için süresini bekleyin (Bekleme sürelerine uyun). Gerekğinde, yüzeyi ve objeleri tek kullanımlık bez ile silerek kurulayınız. Alkol ile uyumlu materyaller üzerinde kullanınız. Hassas materyaller üzerinde kullanılacak ise önceden küçük bir yere sürerek deneyin. Her kullanım sonrası kovanın kapağını sıkıca kapatın.

Kapsam Alanı ve Uygulama

- Medikal cihazlar, laboratuvar masaları, tedavi koltukları, diş hekimi koltuğu yüzeyi, alet tepsisi, başlık ve anguldurva, reflektör destek kolları, çelikten/alüminyum/bakır/silikon veya kauçuktan mamul dental enstrümanların silme metodu ile hızlı aktifleşen dezenfektasyonu içindir.

Materyal Uyumluluğu

► Polietilen	Uyumlu
► PFTE	Uyumlu
► Polipropilen	Uyumlu
► Silikon Kauçuk	Uyumlu
► Kauçuk	Uyumlu
► PVC	Uyumlu
► Akrilik Cam	Uyumlu
► Çelik	Uyumlu
► Dökme demir	Uyumlu
► Alüminyum	Uyumlu
► Bakır	Uyumlu
► Pirinç	Uyumlu

Sıkça Sorulan Sorular

► ISORAPID® XXL Wipes hazırlanırken nelere dikkat etmeliyim?

Hazırlık prosedürü dikkatlice evraka kayıt edilmeli. Kovanın hazırlanış tarihi, kullanılan dezenfektan miktarı, kovayı hazırlayan personel bilgileri ve diğer bilgileri kaydeden bir çizelge oluşturulması tavsiye edilir. İdeal olanı bu bilgileri içeren bir etiketin kova üzerine yapıştırılmasıdır.

► Neden silme bezini ve solüsyonunu aynı üreticiden almak tavsiye edilir?

Üretici kullanılacak bezin ve solüsyonun bir biri ile uyumlu olduğunun garantisini verebilmeli. Çoğu zaman bezlerin içerdiği bazı maddeler dezenfektan sıvıları ile uyumlu olmayabiliyor. Aynı problem çocuk ıslak mendil bezleri içinde geçerlidir, bunlar cilt bakımı için geliştirilmiştir ve dezenfeksiyon sıvısı ile ıslatılmaları için uygun değildir.

► Kuru silme bezi yerleştirmeden öncemi solüsyonu kovaya dökmeliyim yoksa tam tersimi?

Kovaya ilk önce bez rulosunu yerleştirip sonra dezenfektan sıvısını boşaltmak, bezin eşit miktarda hızlı bir biçimde ıslatılmasını sağlayacaktır.

► Islatılmış bezleri kullanmadan önce ne kadar beklemeliyim?

Bezler 30 dakika gibi kısa bir süre içerisinde kullanıma hazır olurlar. Hazırlık safhasında iken bezin dezenfektan sıvısı ile tamamen kaplandığından emin olunuz.

Güvenlik Önlemleri

R10 Yanıcı. R41 gözlerde kalıcı ve ciddi zarar tehlikesi. S2 Çocukların erişebileceği yerden uzak tutunuz. S16 Tutuşturucu özelliği olan bölgelerden uzak yerde muhafaza ediniz – Sigara içmeyiniz. S23 Spreyi teneffüs etmeyiniz. S25 Göz ile teması engelleyiniz. S26 Göz ile temas ederse, bol su ile gözü yıkayınız ve medikal yardıma başvurunuz. S51 Sadece hava sirkülasyonu rahat ve bol olan yerlerde kullanınız.

Paket biçimi ve Aksesuarları

2 Litrelik ISORAPID® Sprey ile 80 yapraklık (29x29) rulolar

2 Litrelik ISORAPID® Sprey ile 100 yapraklık (29x20) rulolar

Etki Alanı / Kullanım Süresi

Bakterisit/Fungusi (1)

(temiz durumlarda) 30 saniye

(kirli durumlarda) 60 saniye

MRSA (2) 30 saniye

Tüberkülosid (1) 60 saniye

Mikobakterisit (M.avium) (1) 60 saniye

Hepatit B / HIV (3) 30 saniye

Hepatit C (4) 30 saniye

Korona virüs (SARS) (5) 30 saniye

Enflüanza A Virüs 30 saniye

Papova virüs (SV 40) (6) 60 saniye

Adeno virüs (6) 60 saniye

1) Pratik koşullar altında yapılmış testler dahil Yüzey Dezenfektanları için DGHM Standard metotlarına uyumlu; 2) Karma ilaç dirençli Staphylococcus aureus; 3) HBsAg Antijen testi; 4) BVDV taşıyıcı testi, 5) BCoV taşıyıcı testi; 6) Zarflanmamış virüs

DGHM Standard metotları ve EN 1040, EN 1276, EN 1275, EN 1650 (C. Albicans), EN 14348; uyumlu; DGHM/VAH listelenmiş.

100g'daki içeriği

Aynen yazılacak.

Fiziki Özellikleri

Renk: Şeffaf, renksiz sıvıya batırılmış

Koku: taze, çiçek kokusu

Raf Ömrü: Kullanıma hazır bezler: 30 gün

pH-Değeri: Nötr

DENTIRO® Wipes

2 ebatla ve 3 farklı koku seçeneği ile “Klasik olan”

DENTIRO® Wipes, kullanıma hazır v önceden dezenfektan ile ıslatılış, geride artık ve iz bırakmayan medikal cihazların yüzeylerinin hızlı dezenfektasyonunda kullanılır (örneğin: laboratuvar masaları, tedavi koltukları, diş hekimi koltuğu yüzeyi, alet tepsisi, başlık ve anguldurva, reflektör destek kolları, çelikten/alüminyum/bakır/silikon veya kauçuktan mamul dental enstrümanlar). DENTIRO® Wipes’in her bez yaprağı oldukça dezenfektana doymuş olup her defasında kolay ve etkili bir dezenfeksiyon yapmanızı sağlar. %50 gibi az alkol içererek alerji oluşum potansiyeli azaltırken ürünün materyal uyumluluğunu artırır. DENTIRO® Wipes aldehit içermez ve kolaylıkla doğaya geri dönüşebilir. Etkinliğini artırmak için DENTIRO® ürünleri ve ISORAPID® Sprey kullanılabilir.

- **Mükemmel malzeme uyumluluğu**
- **Kurduğunda artık ve iz bırakmaz**
- **2 farklı ebat ve 3 koku seçeneği**

Kullanım

Kullanım öncesi refil torbasının keserek ruloyu çıkarınız. İlk yaprağı rulodan çekerek kapaktaki yıldız şeklinde delikten geçiriniz ve kapağı Wipes kutusuna yerleştirin. Bezi yana doğru çekiniz. Dezenfekte edilecek yüzey ve cismin tamamını nemlendirecek/ıslatacak şekilde uygulayınız ve reaksiyonu tamamlaması için süresini bekleyin. Alkol ile uyumlu materyaller üzerinde kullanınız. Hassas materyaller üzerinde kullanılacak ise önceden küçük bir yere sürerek deneyin. Her kullanım sonrası kovanın kapağını sıkıca kapatın.

Kapsam Alanı ve Uygulama

- Medikal cihazlar, laboratuvar masaları, tedavi koltukları, diş hekimi koltuğu yüzeyi, alet tepsisi, başlık ve anguldurva, reflektör destek kolları, çelikten/alüminyum/bakır/silikon veya kauçuktan mamul dental enstrümanların silme metodu ile hızlı aktifleşen dezenfektasyonu içindir.

Materyal Uyumluluğu

► Polietilen	Uyumlu
► PFTE	Uyumlu
► Polipropilen	Uyumlu
► Silikon Kauçuk	Uyumlu
► Kauçuk	Uyumlu
► PVC	Uyumlu
► Akrilik Cam	Uyumlu
► Çelik	Uyumlu
► Dökme demir	Uyumlu
► Alüminyum, yüksek ısıda oluşmuş alüminyum	Uyumlu
► Bakır	Uyumlu
► Pirinç	Uyumlu

Sıkça Sorulan Sorular

► Sprey yerine silerek dezenfekte etmenin avantajları nelerdir?

Küçük yüzeylerin veya tek enstrümanların hızlı temizliği ve dezenfeksiyonu için kullanıma hazır silme bezleri daha pratiktir. Dezenfektan ile ıslatılmış silme bezleri alkol veya kimyasal aerosol/buharının tedavi alanında yayılmasını önler.

► DENTIRO® Wipes çok çabuk kuruyor, ne yapmalıyım?

Dezenfeksiyon sürecinde DENTIRO® Wipes her hangi bir Oroclean yüzey dezenfektanı ile tekrar ıslatılabilir. DENTIRO® Wipe’ların ıslaklığını korumak için refil torbasını kutunun içerisine yerleştirin ve kullanım sonunda kutunun kapağını sıkıca kapatın.

► Kendi ıslak bezlerinizi yapmaya gerçekten değer mi?

Buradaki temel avantaj ebat, ve bezin çeşidi ve koku seçeneğinizin var olmasıdır. Buna rağmen kendi bezini oluşturma maliyeti ve zahmeti çoğu zaman daha fazladır.

Güvenlik Önlemleri

R10 Yanıcı. S2 Çocukların erişebileceği yerden uzak tutunuz. S16 Tutuşturucu özelliği olan bölgelerden uzak yerde muhafaza ediniz – Sigara içmeyiniz. S24/25 Göz ile teması engelleyiniz, serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.

Paket biçimi ve Aksesuarları

120 yapraklık (14,5x20cm) kutu, Koku: Klasik, Çiçek, Limon
12 x 120 yapraklık refil torbası, Koku: Klasik, Çiçek, Limon

100 yapraklık (14,5x40cm) Jumbo kutu, Koku: Klasik, Çiçek, Limon
12 x 100 yapraklık Jumbo refil torbası, Koku: Klasik, Çiçek, Limon

Etki Alanı / Kullanım Süresi

Bakterisit	30 saniye
Fungusit	30 saniye
Tüberkülosid	30 saniye
MRSA (1)	30 saniye
Hepatit B / HIV (2)	2 dakika
Hepatit C (3)	30 saniye
Korona virüs (SARS) (4)	30 saniye

1) Karma ilaç dirençli Staphylococcus aureus; 2) HBsAg Antijen testi; 3) BVDV taşıyıcı testi, 4) BCoV taşıyıcı testi; 6) Zarflanmamış virüs

DGHM Standard metotları ve AFNOR NF T 72170, EN 1040, EN 1275, (C. Albicans),4; DGHM/VAH listelenmiş.

100g'daki içeriği

Aynen yazılacak.

Fiziki Özellikleri

Renk:	Şeffaf, renksiz sıvıya batırılmış
Koku:	Alkol, çiçek, limon kokusu
Raf Ömrü:	24 Ay
pH-Değeri:	Nötr

DENTIRO® Light

Kokusuz küçük yüzeyler ve enstrümanların dezenfeksiyonu

DENTIRO® Light kullanıma hazır alkol bazlı hızlı dezenfekte eden medikal cihaz (örneğin: laboratuvar masaları, tedavi koltukları, diş hekimi koltuğu yüzeyi, alet tepsisi, başlık ve anguldurva, reflektör destek kolları, çelikten/alüminyum/bakır/silikon veya kauçuktan mamul dental enstrümanlar) dezenfektanıdır. DENTIRO® Light kolaylıkla doğaya geri dönüşebilir ve parfüm veya koku içermez. DENTIRO® light aynı zamanda DENTIRO® Wipes ve ISORAPID® Wipes etkinlik süresini uzatmada kullanılabilir. Kendi nemli bezinizi oluşturmak için DENTIRO® ve ISORAPID® 'i kuru bir bezin üzerine dökmeniz yeterlidir.

- Parfüm içermez
- Kısa bekleme süreleri
- Doğaya geri dönüştürülebilir

Kullanım

Dezenfekte edilecek yüzeye veya objeyi komple sürerek nemlendirin ve reaksiyonu tamamlaması için süresini bekleyin (Bekleme sürelerine uyun). Gerektiğinde, yüzeyi ve objeleri tek kullanımlık bez ile silerek kurulaştırınız. Alkol ile uyumlu materyaller üzerinde kullanınız. Hassas materyaller üzerinde kullanılacak ise önceden küçük bir yere sürerek deneyin.

Kapsam Alanı ve Uygulama

► Medikal cihazlar, laboratuvar masaları, tedavi koltukları, diş hekimi koltuğu yüzeyi, alet tepsisi, başlık ve anguldurva, reflektör destek kolları, çelikten/alüminyum/bakır/silikon veya kauçuktan mamul dental enstrümanların sprey veya silme metodu ile hızlı aktifleşen dezenfektasyonu içindir.

Materyal Uyumluluğu

► Polietilen	Uyumlu
► PFTE	Uyumlu
► Polipropilen	Uyumlu
► Silikon Kauçuk	Uyumlu
► Kauçuk	Uyumlu
► PVC	Uyumlu
► Akrilik Cam	Uyumlu
► Çelik	Uyumlu
► Dökme demir	Uyumlu
► Alüminyum	Uyumlu
► Bakır	Uyumlu
► Pirinç	Uyumlu

Sıkça Sorulan Sorular

► VOC Nedir?

VOC, “Uçucu ve yanıcı organik bileşen” ifadesinin kısaltmasıdır ve ürün içerisinde birkaç uçucu ve yanmaya müsait organik bileşenleri tanımlar. Bu tür bileşenler çok sayıda solüsyonlarda mevcuttur.

► DENTIRO® Light VOC içeriyor mu?

Evet. Tüm alkol bazlı sprey dezenfektanı VOC (Uçucu ve yanıcı organik bileşen) içerir.

► DENTIRO® Light; DENTIRO® Mikro ve DENTIRO® Sensitive'den hangi bakımdan farklı?

DENTIRO® light kendine has bir formülü ve kapsam alanı vardır. Buna ilave olarak DENTIRO® light kokusuzdur, DENTIRO® Mikro ve DENTIRO® Sensitive her ikisi de kokuludur.

► DENTIRO® Light'ı DENTIRO® Wipes ve ISORAPID® Wipes ile beraber kullanabilir miyim?

Evet, her iki üründe benzer bileşeni vardır. DENTIRO® light; hem DENTIRO® Wipes hem de ISORAPID® Wipes ıslatmak/nemlendirmek için kullanılabilir. DENTIRO® light; DENTIRO® ve ISORAPID® kuru bezlerini kullanarak ıslak bez yapımı için kullanılabilir.

► Hangisi daha iyidir, sprey mi yoksa silme mi?

Dezenfeksiyon için silme sprey tekniği yerine silme tekniği kullanılmalı, bu şekilde daha etkilidir. Bunun yanı sıra dezenfeksiyonu silme yöntemi kullanmak alerji oluşum riskin azaltır.

Güvenlik Önlemleri

R10 Yanıcı. S2 Çocukların erişebileceği yerden uzak tutunuz. S16 Tutuşturucu özelliği olan bölgelerden uzak yerde muhafaza ediniz – Sigara içmeyiniz. S23 Spreyi teneffüs etmeyiniz. S26 Göz ile temas ederse, bol su ile gözü yıkayınız ve medikal yardıma başvurunuz. S51 Sadece hava sirkülasyonu rahat ve bol olan yerlerde kullanınız.

Paket biçimi ve Aksesuarları

500ml, 1 litre, 2 litre, 5 litre, 10 litre

Etki Alanı / Kullanım Süresi

Bakterisit (1)	30 saniye
Fungusit (1)	30 saniye
Tüberkülosid (1)	30 saniye
MRSA (2)	30 saniye
Hepatit B / HIV (3)	30 saniye
Hepatit C (4)	30 saniye
Adenovirüs	2 dakika

1) Pratik koşullar altında yapılmış testler dahil Yüzey Dezenfektanları için DGHM Standard metotlarına uyumlu; 2) Karma ilaç dirençli Staphylococcus aureus; 3) HBsAg Antijen testi; 4) BVDV taşıyıcı testi

100g'daki içeriği

Aynen yazılacak.

Fiziki Özellikleri

Renk:	Şeffaf, renksiz sıvı
Koku:	Alkol
Raf Ömrü:	36 Ay
pH-Değeri:	Nötr

DENTIRO® Mikro

Ferah ve temiz limon kokulu, hızlı yüzey dezenfeksiyonu

DENTIRO® Mikro aldehit içermeyen, kullanıma hazır, hızlı dezenfekte eden medikal cihaz (örneğin: laboratuvar masaları, tedavi koltukları, diş hekimi koltuğu yüzeyi, alet tepsisi, başlık ve anguldurva, reflektör destek kolları, çelikten/alüminyum/bakır/silikon veya kauçuktan mamul dental enstrümanlar) dezenfektanıdır. %50 gibi az alkol içererek alerji oluşum potansiyeli azaltırken ürünün materyal uyumluluğunu artırır. DENTIRO® Mikro kolaylıkla doğaya geri dönüşebilir. DENTIRO® Mikro aynı zamanda DENTIRO® Wipes ve ISORAPID® Wipes etkinlik süresini uzatmada kullanılabilir. Kendi nemli bezinizi oluşturmak için DENTIRO® ve ISORAPID® 'i kuru bir bezin üzerine dökmeniz yeterlidir.

- Hoş limon kokusu
- Mükemmel malzeme uyumluluğu
- Doğaya geri dönüştürülebilir

Kapsam Alanı ve Uygulama

► Medikal cihazlar, laboratuvar masaları, tedavi koltukları, diş hekimi koltuğu yüzeyi, alet tepsisi, başlık ve anguldurva, reflektör destek kolları, çelikten/alüminyum/bakır/silikon veya kauçuktan mamul dental enstrümanların sprey veya silme metodu ile hızlı aktifleşen dezenfektasyonu içindir.

Materyal Uyumluluğu

► Polietilen	Uyumlu
► PFTE	Uyumlu
► Polipropilen	Uyumlu
► Silikon Kauçuk	Uyumlu
► Kauçuk	Uyumlu
► PVC	Uyumlu
► Akrilik Cam	Uyumlu
► Çelik	Uyumlu
► Dökme demir	Uyumlu
► Alüminyum	Uyumlu
► Bakır	Uyumlu
► Pirinç	Uyumlu
► Laboratuvar masası plastiği, beyaz, mavi ve gri	Uyumlu

Sıkça Sorulan Sorular

► Alkol bazlı ve alkolsüz yüzey dezenfektanları arasındaki temel fark nedir?

Alkolsüz dezenfektanlar genelde kısa zaman sarfında yüksek miktarda bakteri öldüremezler. Çoğu alkolsüz dezenfektanların gücü TB, HCV ve fungileri 5 dakika içerisinde yok etmeye yetmez, bu sebepten dolayı hasta değişimi arasındaki alkolsüz dezenfektanlar yüzey dezenfeksiyonu için uygun değildir.

► DENTIRO® Mikro'yu DENTIRO® Wipes veya ISORAPID® Wipes ıslatmak/nemlendirmek için kullanabilir miyim?

Evet, her iki üründe benzer bileşeni vardır. DENTIRO® Mikro; hem DENTIRO® Wipes hem de ISORAPID® Wipes ıslatmak/nemlendirmek için kullanılabilir. DENTIRO® Mikro aynı zamanda DENTIRO® ve ISORAPID® kuru bezlerini kullanarak ıslak bez yapımı için kullanılabilir.

► DENTIRO® Mikro; DENTIRO Sensitive'den farkı nedir?

Her iki ürünün içeriğinde aynıdır. DENTIRO Mikronun DENTIRO daha kuvvetli bir limon kokusu var

Güvenlik Önlemleri

R10 Yanıcı. R41 gözlerde kalıcı ve ciddi zarar tehlikesi. S2 Çocukların erişebileceği yerden uzak tutunuz. S16 Tutuşturucu özelliği olan bölgelerden uzak yerde muhafaza ediniz – Sigara içmeyiniz. S23 Spreyi teneffüs etmeyiniz. S26 Göz ile temas ederse, bol su ile gözü yıkayınız ve medikal yardıma başvurunuz. S51 Sadece hava sirkülasyonu rahat ve bol olan yerlerde kullanınız.

Paket biçimi ve Aksesuarları

1 litre, 2 litre, 5 litre, 10 litre

Etki Alanı / Kullanım Süresi

Bakterisit/Fungusit (1)	
(temiz durumlarda)	30 saniye
(kirli durumlarda)	60 saniye
Tüberkülosid (1)	60 saniye
Mikobakterisit (M.avium) (1)	60 saniye
Hepatit B / HIV (2)	30 saniye
Hepatit C (3)	30 saniye
Papova virüs (SV 40) (4)	60 saniye

1) Pratik koşullar altında yapılmış testler dahil Yüzey Dezenfektanları için DGHM Standard metotlarına uyumlu; 2) HBsAg Antijen testi; 3) BVDV taşıyıcı testi; 4) Zarflanmamış virüs

DGHM Standard metotları ve EN 1040, EN 1275 (C. Albicans), uyumlu; DGHM/VAH listelenmiş.

100g'daki içeriği

Aynen yazılacak.

Fiziki Özellikleri

Renk:	Şeffaf, renksiz sıvı
Koku:	Limon Kokulu
Raf Ömrü:	48 Ay
pH-Değeri:	Nötr

DENTIRO® Sensitive

Ferah limon kokulu tüm yüzeylerin dezenfeksiyonu

DENTIRO® Sensitive aldehit içermeyen, kullanıma hazır, alkol bazlı, hızlı dezenfekte eden medikal cihaz (örneğin: laboratuvar masaları, tedavi koltukları, diş hekimi koltuğu yüzeyi, alet tepsisi, başlık ve anguldurva, reflektör destek kolları, çelikten/alüminyum/bakır/silikon veya kauçuktan mamul dental enstrümanlar) dezenfektanıdır. %50 gibi az alkol içererek alerji oluşum potansiyeli azaltırken ürünün materyal uyumluluğunu artırır. DENTIRO® Sensitive kolaylıkla doğaya geri dönüşebilir ve hoş limon kokusu vardır. DENTIRO® Sensitive aynı zamanda DENTIRO® Wipes ve ISORAPID® Wipes etkinlik süresini uzatmada kullanılabilir. Kendi nemli bezinizi oluşturmak için DENTIRO® ve ISORAPID®'i kuru bir bezin üzerine dökmeniz yeterlidir.

► Hoş limon kokusu

► Mükemmel malzeme uyumluluğu

► %50 gibi az alkol içeriği

Kapsam Alanı ve Uygulama

► Medikal cihazlar, laboratuvar masaları, tedavi koltukları, diş hekimi koltuğu yüzeyi, alet tepsisi, başlık ve anguldurva, reflektör destek kolları, çelikten/alüminyum/bakır/silikon veya kauçuktan mamul dental enstrümanların sprej veya silme metodu ile hızlı aktifleşen dezenfektasyonu içindir.

Materyal Uyumluluđu

► Polietilen	Uyumlu
► PFTE	Uyumlu
► Polipropilen	Uyumlu
► Silikon Kauçuk	Uyumlu
► Kauçuk	Uyumlu
► PVC	Uyumlu
► Akrilik Cam	Uyumlu
► Çelik	Uyumlu
► Dökme demir	Uyumlu
► Alüminyum	Uyumlu
► Bakır	Uyumlu
► Pirinç	Uyumlu

Sıkça Sorulan Sorular

► DENTIRO® Sensitive'i DENTIRO® Wipes veya ISORAPID® Wipes ıslatmak/nemlendirmek için kullanabilir miyim?

Evet, her iki üründe benzer bileşeni vardır. DENTIRO® Sensitive; hem DENTIRO® Wipes hem de ISORAPID® Wipes ıslatmak/nemlendirmek için kullanılabilir. DENTIRO® Mikro aynı zamanda DENTIRO® ve ISORAPID® kuru bezlerini kullanarak ıslak bez yapımı için kullanılabilir.

► DENTIRO® Sensitive'in DENTIRO® Mikro'dan farkı nedir?

Her iki ürünün içeriğinde aynıdır. DENTIRO® Mikronun DENTIRO® Sensitive göre daha kuvvetli bir limon kokusu var

► DENTIRO® Sensitive'i ne zaman kullanmalıyım?

Her tedaviden sonra, dişçi koltuğunun 2 metrelik çap alanındaki tüm yüzeyler dezenfekte edilmelidir.

Güvenlik Önlemleri

R10 Yanıcı. R41 gözlerde kalıcı ve ciddi zarar tehlikesi. S2 Çocukların erişebileceği yerden uzak tutunuz. S16 Tutuşturucu özelliği olan bölgelerden uzak yerde muhafaza ediniz – Sigara içmeyiniz. S23 Spreyi teneffüs etmeyiniz. S26 Göz ile temas ederse, bol su ile gözü yıkayınız ve medikal yardıma başvurunuz. S51 Sadece hava sirkülasyonu rahat ve bol olan yerlerde kullanınız.

Paket biçimi ve Aksesuarları

500ml, 1 litre, 5 litre, 10 litre

Etki Alanı / Kullanım Süresi

Bakterisit/Fungusit (1)	
(temiz durumlarda)	30 saniye
(kirli durumlarda)	60 saniye
Tüberkülosid (1)	60 saniye
Mikobakterisit (M.avium) (1)	60 saniye
Hepatit B / HIV (2)	30 saniye
Hepatit C (3)	30 saniye
Papova virüs (SV 40) (4)	60 saniye

1) Pratik koşullar altında yapılmış testler dahil Yüzey Dezenfektanları için DGHM Standard metotlarına uyumlu; 2) HBsAg Antijen testi; 3) BVDV taşıyıcı testi; 4) Zarflanmamış virüs

DGHM Standard metotları ve EN 1040, EN 1275 (C. Albicans), uyumlu; DGHM/VAH listelenmiş.

100g'daki içeriği

Aynen yazılacak.

Fiziki Özellikleri

Renk:	Şeffaf, renksiz sıvı
Koku:	Limon Kokulu
Raf Ömrü:	48 Ay
pH-Değeri:	Nötr

DENTIRO® Foam/Köpük **Hassa Materyaller için nazik bakım**

DENTIRO® Foam/Köpük kullanıma hazır, hassas yüzeyli (plastik parçalar), tedavi koltuklar, muayene masaları ve benzeri medikal ekipmanların dezenfeksiyonu ve temizliği için kullanılır. Zararsız formülü PVC Gibi çok hassas yüzeyleri korur. DENTIRO® Foam/Köpük kolaylıkla doğaya geri dönüşebilir.

- **Dezenfekte eden bakım ürünü**
- **Nazik ve zararsız formül**
- **Hassas Materyaller için**

Kullanım

DENTIRO® Foam/Köpüğü köpükendirici şişeye doldurunuz. Dezenfekte edilecek bölgelere şişeden köpük boşaltınız. Kuru bir bez kullanarak köpüğü eşit bir şekilde yayınız, aktifleşmesi için bir müddet bekleyiniz ve yüzeyi silerek kurulayınız. Günde bir veya iki defa kullanınız.

Kapsam Alanı ve Uygulama

- Hassas yüzeyli medikal cihazların dezenfeksiyonu, bakımı ve temizliği için kullanılır.
- Özellikle plastikten mamul tedavi koltukları ve muayene masaları gibi alkole duyarlı ürünler ve PVC gibi hassas ürünler için uygundur.

Materyal Uyumluluğu

- | | |
|----------------|--------|
| ► Polietilen | Uyumlu |
| ► PFTE | Uyumlu |
| ► Polipropilen | Uyumlu |
| ► PET | Uyumlu |
| ► Dökme demir | Uyumlu |
| ► Alüminyum | Uyumlu |

Sıkça Sorulan Sorular

- **DENTIRO® Foam/Köpüğü her hasta arasından yüzey dezenfeksiyonu için kullanabilir miyim?**

Hayır, DENTIRO® Foam/Köpük asıl kullanım amacı PVC gibi hassas materyallerin ve dişçi koltuklarındaki sentetik deri döşemelerin temizliği ve bakımı için tasarlanmıştır. Hasta aralarında yüzeyleri dezenfekte etmek için daha kuvvetli alkol bazlı hızlı aktifleşen dezenfektanlar kullanınız.

- **DENTIRO® Foam/Köpüğü DENTIRO® Wipes ile beraber dişçi koltuğu üzerinde kullanabilir miyim?**

Evet, her iki ürün bir biriyle uyumludur.

- **DENTIRO® Foam/Köpüğü hangi sıklıkta kullanmalıyım?**

Hassas dişçi koltuğu yüzeylerinin bakımı ve korunması için DENTIRO® Foam/Köpüğü günde bir veya iki sefer kullanmanızı tavsiye ederiz.

Güvenlik Önlemleri

R10 Yanıcı. S2 Çocukların erişebileceği yerden uzak tutunuz. S24/25 Göz ile teması engelleyiniz, serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. S26 Göz ile temas ederse, bol su ile gözü yıkayınız ve medikal yardıma başvurunuz.

Paket biçimi ve Aksesuarları

200ml, 2 litre

Etki Alanı / Kullanım Süresi

- | | |
|---------------------|-----------|
| Bakterisit | 10 dakika |
| Fungusit | 10 dakika |
| Hepatit B / HIV (1) | 5 dakika |

1) HBsAg Antijen testi

DGHM Standard metotlarına uyumlu.

100g'daki içeriği

Aynen yazılacak.

Fiziki Özellikleri

Renk:	Şeffaf, renksiz sıvı
Koku:	Alkolik
Raf Ömrü:	36 Ay
pH-Değeri:	Nötr

Yerler

Bakteri, Virüs, Fungi

Yerleri temiz tutun

Tedavi Süresince aerosol/havada uçan buharlaşmalar çalışma alanının 2 metre çapın enfeksiyona maruz kalmaktadır. Mikroplar çalışma ortamında hızlı bir şekilde yayılabilirler. Patojenler giysilere tutunabilir veya hava yollarına girebilir. Bu nedenden dolayı dışçı koltuğunun civarındaki zeminler günlük olarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

Yüksek riskli hastaların tedavisi sonrasında veya göz ile görülebilir enfeksiyon var ise, yerler derhal dezenfekte edilmeli. Hastaların tedavi alanının uzağındaki bölgelerde (örneğin, lavabo zemini veya hasta kabul odası) haftada bir kez dezenfektasyon yapmak yeterlidir.

Geniş yüzeyler için en iyi mikroptan arınma stratejileri

Yerler ve zeminlerin dezenfektasyonu 4 farklı metot ile yapılabilir:

- **OROCLEAN® Floor Wiper/ Zemin Silici Paspas:** Bu özel tasarlanmış aparat üzerinde dezenfektan haznesi barındırmaktadır. Aparat üzerindeki kol basitçe çekildiğinde yüzeye direkt olarak dezenfektan sprey olarak sıkılır. Peşinden OROCLEAN® Floor Wiper ile bu sıvı zemin üzerinde iyice ovulur/paspaslanır. Bu metot en kolay ve hızlı olanıdır.
- **Çift Silme metodu:** Tüm odalar dezenfektana batırılmış paspas ile silinir. Fazla sürülmüş dezenfektanı tekrar paspasla alınır. Dezenfeksiyon etkin olması için yüzeyin tümü dezenfektan ile kaplanmalı, bu metot günümüzde pek kullanılmamaktadır.
- **Çift kova metodu:** Kovanın bir tanesi dezenfektan ile doldurulur diğeri ise kullanılmış dezenfektanı paspastan sıkarak tahliye etmek için kullanılır, bu şekilde mikropların temiz kovayı enfeksiyon bulaştırmasından kaçınılır.
- **Buhar temizleyicisi ile dezenfekte etmek:** Bu yöntem kolay olmasına rağmen uygulanması tavsiye edilmez çünkü zemine direkt olarak uygulanmamaktadır.

Yer dezenfektanları – doğru seçim yapmak için kriterler

Geniş ve büyük yüzeyler için yüksek performanslı ve nazik dezenfektan ihtiyacı duyulur. Yer dezenfektanı satın alındığında üzerindeki etiketi dikkatlice okuyunuz ve paket bilgilerini inceleyerek sizin gereksinimlerinizi karşılayabilecek doğru ürün olup olmadığını kontrol ediniz:

1. **Tekrar kontrol et:** CE numarasını ve Biosit numarasını
2. **Konsantreler kullanıma hazır olanlardan daha çok seçenek sunar ve daha naziktir:** gerekli olan konsantrasyonlardaki değişik ihtiyaçlar hem maliyeti hem de materyal uyumluluğunu etkiler.
3. **İçerik:** Büyük ve geniş yüzeyler için dördü amonyum bileşeni içeren alkolsüz dezenfektanların kullanılmasını tavsiye ederiz. Bu ürünler hem yanıcı değildirler, materyaller üzerinde daha naziktir ama buna rağmen mikroplara karşı daha etkilidirler.
4. **Materyal uyumluluk:** İyi bir ürün tüm yüzeyler ile uyumlu olmalıdırlar. Yeni oluşan materyaller için kullanım öncesinde materyal üzerinde bir köşede test edilmelidir.
5. **Etkin kullanım alanı:** Dirençli mikroplar (Adenovirüs), inat ve sökülmesi zor kalıntılara karşı daha etkili olabilmesi bu husus çok önemlidir. Bakteri ve funguslara karşı etkinliği de çok önemlidir.

☀ Yer dezenfektanı ile ilgili OROCLEAN'den İpuçlar ve Hileler

- ▶ Dezenfektan solüsyonunu hazırlarken daima gölük ve eldiven giyiniz.
- ▶ Her zaman yeni/taze dezenfektan solüsyonu hazırlayınız: Eski dezenfektanı bir gün bekletmek etkinliğini azaltabilir. İşlemi kolaylaştırmak için Kovaya ilk önce dezenfektanı koyunuz ardından su ilave ediniz.
- ▶ Yeterli solüsyon kullanınız: Her metre kare için 20ml ile 40ml arasından solüsyon kullanılması tavsiye edilir.
- ▶ Her zaman doğru konsantrasyonu kullanınız: fazla kullanılırsa geride artık bırakır ve buda gereksiz yere maliyet oluşturur. Az miktarda kullanılırsa etkinliği olumsuz yönde olur.
- ▶ Her zaman soğuk veya ılık su kullanın: sıcak su dezenfektanı buharlaşmasına sebebiyet verir. Bunun yanı sıra sıcak su proteinin topaklanmasına ve yoğunlaşmasına sebep olarak enfeksiyonun sökülmesi daha da zorlaşır.
- ▶ Hiçbir zaman temizlik solüsyonları ile dezenfektanları bir biri ile karıştırmayın. Daha önceden test edilmemiş bir karışım dezenfektanın etkinliğini azaltabilir. Yüksek kaliteli yer dezenfektanları hem de temizleme hem de dezenfekte özelliklerini bünyesinde barındırır.
- ▶ Her yüzey için yeni bez kullanın
- ▶ Yüzeyin dezenfeksiyonu yapıldıktan sonra yüzeyin kurumasını bekleyin. Silinirse dezenfektanın etkinliği azaltılabilir.
- ▶ Dezenfektan uygulandıktan sonra odayı havalandırın!
- ▶ Kullanılmış bezler derhal kirli sepete konulmalı. Dezenfektan için üretilmiş özel yıkama deterjanı kullanarak en az 60°C ısıda yıkanmalıdır veya 95°C'de kaynatılmalı. Yıkama işleminden sonra beleri kurulayınız ve güvenli bir şekilde muhafaza ediniz. Tek kullanımlık bezler tekrar yıkama zahmeti olmadığından daha kullanışlıdır.
- ▶ Kullanılmış paspaslar ve kovalar yıkanıp, temizlenip dezenfekte edilip kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.

ISORAPID® Floor/Yer

Ekonomik yer dezenfektanı – 1 Litre konsantreden 200 Litre kullanıma hazır solüsyon

Medikal Cihazlar direktifi (93/42/EC) uygun olarak: ISORAPID® Floor taze sıvı kıvamında, kokulu su ile yıkanabilir alet ve altyapılar gibi medikal cihazların yüzeyleri üzerinde paspas ile veya silerek dezenfektasyon yapılmasını sağlar. 3 yüzey aktif madde ve 1 gelişmiş temizleme ajanların bir birinden aldığı güç ile etkisi ISORAPID® Floor'u yüksek temizleme gücü ile ekonomik yapmaktadır.

1 Litrelik dezenfektan solüsyonunu %0.5 ölçüde sulandırarak 200 Litre kullanıma hazır solüsyon elde edilir. 1 Litre kullanıma hazır dezenfektan solüsyonu 50m² alanı dezenfekte etmeye yeterlidir.

ISORAPID® Floor aynı zamanda dezenfektana batırılıp bekletilebilir büyük ebatlı medikal cihazlar (idrar şişeleri, yatak tavaları) ile de kullanılabilir. ISORAPID® Floor aldehit, fenol, kostik potas ve yanıcı organik maddeler (VOC) içermez ve dolayısıyla yüksek materyal uyumluluğu vardır.

ISORAPID® Floor kolaylıkla doğaya geri dönüşebilir ve çevreye zarar vermez.

Biosidal ürün direktifi uygun olarak: ISORAPID® Floor likit konsantredir ve ovma ve kazıma ile yerlerin ve diğer geniş ve büyük yerlerin temizliği ve dezenfeksiyonunu sağlar.

- ▶ **Mükemmel materyal uyumluluğu**
- ▶ **Kuvvetli ve güçlü temizlik**
- ▶ **Çok etkin**

Kullanım

Silme dezenfeksiyonu için gerekti yoğunlukta sulu solüsyon kullanınız. Doğru ölçüyü kullanmak için şişenin kapağını ölçü aleti olarak kullanınız. Arzu edilen miktar elde edilene kadar kapağa konsantre sıvıyı dökünüz (20ml'den 40 ml aralığında). Dezenfeksiyonu yapılacak yüzeyin tümünü kaplamalıdır. 1 m2 yüzeyi dezenfekte etmek için 20-40ml kullanıma hazır dezenfektan solüsyonu yeterlidir.

Kapsam Alanı ve Uygulama

- Medikal cihazlar, medikal altyapılar ve aygıtların yıkanabilir yüzeylerinin silme veya kazıma yöntemi ile dezenfeksiyonu için.
- Aynı zamanda dezenfektana batırılıp bekletilebilir büyük ebatlı medikal cihazlar (idrar şişeleri, yatak tavaları) ile de kullanılabilir.
- Doğal taş, plaka taş, PVC, duvarlar, sağlık cihazları, fayans ve laboratuvar masalarının dezenfeksiyonu için kullanılabilir.

Materyal Uyumluluğu

► Polietilen	Uyumlu
► PFTE	Uyumlu
► Polipropilen	Uyumlu
► Laminant yer kaplaması	Uyumlu
► Parke	Uyumlu
► PVC yer kaplama materyali	Uyumlu
► Laboratuvar Masası	Uyumlu
► Seramik fayans, beyaz	Uyumlu
► Doğal taş, cilalanmış	Uyumlu
► Doğal taş, cilalanmamış	Uyumlu
► Plastik diş koltuğu kenarları (medikal cihazlar)	Uyumlu
► Tahta Mobilya, cilalanmış	Uyumlu

Sıkça Sorulan Sorular

► ISORAPID® Floor ile ISORAPID® Sprey arasındaki fark nedir?

ISORAPID® Sprey küçük yüzeylerin ve medikal cihazların hızlı bir şekilde dezenfeksiyonu için tasarlanmıştır. ISORAPID® Floor ise su bazlı ve konsantre kıvamda gelmektedir ve büyük ve geniş alanların ve sağlık ekipmanlarının dezenfeksiyonunda kullanılır.

► Yerler ne zaman dezenfekte edilmelidir?

Her gün sonunda tedavi alanının bulunduğu yerlerin temizlenmesi ve dezenfeksiyonu tavsiye edilir. Göz ile görülebilir kan, tükürük veya diğer enfeksiyonlu sıvıların hemen anında temizlenmesi gereklidir.

► Bir metre kareyi dezenfekte etmek için ne kadar ISORAPID® Floor kullanmalıyım?

1 m² için 20-40ml kullanıma hazır dezenfektan solüsyonu gereklidir. ISORAPID® Floor çok ekonomiktir: 1 Litrelik dezenfektan solüsyonunu %0.5 ölçüde sulandırarak 200 Litre kullanıma hazır solüsyon elde edilir. Diğer bir ifade ile 1 Litre 10,000m² alana dezenfekte eder.

► ISORAPID® Floor tüm yer kaplama tipleri için uygun mudur?

ISORAPID® Floor yoğun ve detaylı bir şekilde materyal uyumluluğu için test edilmiştir. Buna rağmen, yeni bilinmeyen materyaller üzerinde kullanılacak ise önceden küçük bir yere sürerek deneyin.

Güvenlik Önlemleri

R34 yanma hissi oluşabilir. S2 Çocukların erişebileceği yerden uzak tutunuz. S26 Göz ile temas ederse, bol su ile gözü yıkayınız ve medikal yardıma başvurunuz. S28 Cilt ile teması sonunda hemen bol su ile yıkayınız. S35 Bu malzeme ve onun kullanıldığı kap güvenli bir şekilde atılmalı/imha edilmeli. S37/39 Uygun bir şekilde eldiven ve göz/yüz koruyucu kullanınız. S46 Yutulursa derhal medikal tavsiyesine başvurun ve bu ürünün kutusunu veya etiketini gösterin. Daha fazla bilgi için güvenlik data sayfasına bakın. Dezenfektanları dikkatlice kullanın. Kullanım öncesi ürünün etiketini ve ürün bilgisini okuyunuz.

Paket biçimi ve Aksesuarları

1 Litre, 5 Litre

OROCLEAN® Floor Wiper/Paspas
Bez (20 x 29cm) 100 adet
Bez (29 x 29cm) 80 adet
Tekrar Kullanılabilir Bez 1 parça

Etki Alanı / Kullanım Süresi

Bakterisit/Fungusi (C. Albicans)	%0.25	15 dakika
Phase 2 / Step 2 yüzey testi	%0.5	15 dakika
Tüberkülosid (M. Terrae)	%0.25	60 dakika
	%0.5	30 dakika
	%2	15 dakika
BVDV / Hepatit C	%0.25	5 dakika
Sınırlı Virüs (HIV, HBV, Vaksina Virüs dahil)		
Temiz şartlar	%0.25	120 dakika
	%0.5	15 dakika
Kirli şartlar	%1	15 dakika

Avrupa Standartlarına uyumlu EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 1650, EN 13624, EN13697 (bakteri, C. Albicans), EN 13727, EN 14348 ve RKI / DVV yönetmeliğine uyumlu.

Biosit ürün yetki numarası:CHZN1105

Dosaj

100g'daki içeriği

Aynen yazılacak.

Fiziki Özellikleri

Renk:	Şeffaf, yeşil sıvı
Koku:	Taze
Raf Ömrü:	36 Ay
pH-Değeri:	%2 Solüsyon: 10:1

ISORAPID® OP-Forte AF

Yerleri tahriş etmeden dezenfekte edin. Akrilik Cam için kullanımı uygun

Medikal Cihazlar direktifi (93/42/EC) uygun olarak: OROLIN® OP-Forte AF çok nazik ama güçlü sıvı kıvamında, su ile yıkanabilir alet ve altyapılar gibi medikal cihazların yüzeyleri üzerinde paspas ile veya silerek dezenfektasyon yapılmasını sağlar. OROLIN® OP-Forte AF yüksek materyal uyumluluğu ile övünürken aldehit, fenoller ve kostik potas içermez. OROLIN® OP-Forte AF meyve kokulu olup kolaylıkla doğaya geri dönüşebilir ve çevreye zarar vermez.

Biosidal ürün direktifi uygun olarak: OROLIN® OP-Forte AF likit konsantredir ve paspas veya silerek doğal taş, plaka taş, PVC, duvarlar, sağlık cihazlar, Sırlı Fayans, laboratuvar masaları ve diğer büyük ve geniş yüzeyleri temizler ve dezenfekte eder. OROLIN® OP-Forte AF'nin Nazik formülü ürünü akrilik cam ve tedavi görmemiş tahta gibi materyaller üzerinde güvenli bir şekilde kullanımına olasılık tanır.

- **Mükemmel materyal uyumluluğu**
- **Kuvvetli ve güçlü temizlik**
- **Meyve Kokulu**

Kullanım

Silme dezenfeksiyonu için gerekti yoğunlukta sulu solüsyon kullanınız. Doğru ölçüyü kullanmak için şişenin kapağını ölçü aleti olarak kullanınız. Arzu edilen miktar elde edilene kadar kapağa konsantre sıvıyı dökünüz (20ml - 40 ml aralığında). Dezenfeksiyonu yapılacak yüzeyin tümünü kaplamalıdır. 1 m2 yüzeyi dezenfekte etmek için 20-40ml kullanıma hazır dezenfektan solüsyonu yeterlidir.

Kapsam Alanı ve Uygulama

- Medikal cihazlar, medikal altyapılar ve aygıtların yıkanabilir yüzeylerinin silme veya kazıma yöntemi ile dezenfeksiyonu için.
- Doğal taş, plaka taş, PVC, duvarlar, sağlık cihazları, fayans ve laboratuvar masalarının dezenfeksiyonu için kullanılabilir.

Materyal Uyumluluđu

► Polietilen	Uyumlu
► PFTE	Uyumlu
► Polipropilen	Uyumlu
► Akrilik Cam	Uyumlu
► Alüminyum	Uyumlu
► Alüminyum, yüksek ısıda oluşmuş alüminyum	Uyumlu

Sıkça Sorulan Sorular

► ISORAPID® Floor ile OROLIN® OP-Forte AF arasındaki fark nedir?

Her ikisi de yer ve sağlık ekipmanları gibi büyük yıkanabilir yüzeylerin temizliğinde ve dezenfeksiyonu için kullanılır. ISORAPID® Floor daha hızlı çalışırken OROLIN® OP-Forte AF daha naziktir ve özellikle ham/işlenmemiş tahta ve akrilik cam gibi hassas yüzeylerde kullanılmak için tasarlanmıştır.

► Bir metre kareyi dezenfekte etmek için ne kadar OROLIN® OP-Forte AF kullanmalıyım?

1 m² için 20-40ml kullanıma hazır dezenfektan solüsyonu gereklidir. 1 Litre solüsyon ile 50m² alana dezenfekte etmeye yeterlidir.

► OROLIN® OP-Forte AF tüm yer kaplama tipleri için uygun mudur?

Aldehit, fenoller veya potasyumlardan uzak nazım formülü sayesinde OROLIN® OP-Forte AF yüksek uyumluluk sağlar. Doğal taş, plaka taş, PVC, ham/işlem görmemiş tahta ve akrilik cam gibi geniş materyal seçeneği üzerinde kullanıma müsaittir. Buna rağmen, yeni bilinmeyen materyaller üzerinde kullanılacak ise önceden küçük bir yere sürerek deneyin.

► OROLIN® OP-Forte AF kullandıktan sonra fazla sıvıları silmek gerekir mi?

Kullanıma hazır OROLIN® OP-Forte AF geride hiçbir artık ve iz bırakmaz dolayısıyla durulumaya/yıkama ihtiyacı olmaz.

Güvenlik Önlemleri

R36/38 Gözlere ve ciltte tahrişe sebebiyet verebilir. 1. S2 Çocukların erişebileceği yerden uzak tutunuz. S26 Göz ile temas ederse, bol su ile gözü yıkayınız ve medikal yardıma başvurunuz. S28 Cilt ile teması sonunda hemen bol su ile yıkayınız. S37/39 Uygun bir şekilde eldiven ve göz/yüz koruyucu kullanınız. Daha fazla bilgi için güvenlik data sayfasına bakın. Dezenfektanları dikkatlice kullanın. Kullanım öncesi ürünün etiketini ve ürün bilgisini okuyunuz.

Paket biçimi ve Aksesuarları

2 Litre, 5 Litre

OROCLEAN Floor Wiper/Paspas

Etki Alanı / Kullanım Süresi

Bakterisit	%0.75 4 saatte
	%1 1 saatte
	%2 15 dakika
Fungusit	%0.75 4 saatte
	%1 1 saatte
	%2 15 dakika
Fungu (işlenmemiş tahta üzerindeki)	%1.5 4 saatte
	%2 1 saatte
Hepatit B / HIV (1)	%5 1 saatte
Enflüanza A Virüs	%0.75 15 dakika

1) HBsAG antijen testi

Avrupa Standartlarına uyumlu ANFOR NF T 72150*, NF T 72170*, NF T 72200 (*Spektrum 4); DGHM / VAH listelenmiş.

Biosit ürün yetki numarası: CHZB0288

Dosaj

100g'daki içeriği

Aynen yazılacak.

Fiziki Özellikleri

Renk: Şeffaf, yeşil sıvı
Koku: Kokulu
Raf Ömrü: 36 Ay
pH-Değeri: %1 Solüsyon: 7.0

Enstrümanlar

Her şey sizin güvenliğiniz için!

Günlük iş akışının önemli bir yoğunluğunu enstrümanların tekrar kullanımı oluşturur. Kişi kendini görünmez tehlikelerden nasıl korur? Enstrümanlar nasıl sınıflandırılır? Dezenfeksiyon hangi durumlar için kullanılmalı ve ne durumda sterilizasyon gerekli olur? Dezenfektan seçimi ne kadar önem arz eder? Enstrümanların işlenmesinde hangi adımları takip etmem gerekir? Size şimdi çok karmaşık olan kanunu düzenlemeler özetini ve pratik ipuçları sunalım.

Medikal cihazlar üç gruba ayrılır – kritik olmayan, yarı kritik olan ve kritik medikal cihazlar.

Bu basit gruplaştırma enstrümanları kategorize ederek işleme prosedürlerinin personele ve hastalara yansiyabilecek riskleri detaylandırır.

Medikal Cihazların sınıflandırılması

Kritik Olmayan medikal cihazlar sağlıklı cilt (örn: çene desteği) ile direkt temas kurar. Basit bir temizlik yeterlidir. Mukoza zarı etrafında tedavi esnasında kullanılan cihazlara kan ve tükürükten mikrop ile enfeksiyon olma olasılığından dezenfekte edilmeleri tavsiye edilir.

Yarı Kritik olan medikal cihazlar mukoza zarı ve yara almış cilt üzerinde kullanılır İstilacı olmayan prosedürler için kullanılır. Dezenfeksiyon gereklidir. Bu ilave olarak cihaza ve uygulanan prosedüre bağlı olarak sterilizasyonda gerekebilir.

Kritik Medikal cihazlar mukoza zarı ve yara almış ciltte direkt olarak müdahale eder ve bundan dolayı kan ve dokular ile direkt temas eder. Bu kategorideki ürünler Endoskop cihazı, katater, veya implant gibi ürünlerdir. Bu tür cihazlar sterilize edilmelidir. Aşağıdaki ürünlerin tekrar kullanılabilmesi kati direktiflere bağlıdır; Dönen ve ileri geri hareket eden enstrümanlar, transmisyon enstrümanları (türbin, başlık ve anguldurva) ve bunun yanı sıra hava ve/ya su besleyen cihazlar.

Medikal cihazların tekrar işlenmesi yetkili personel tarafından yapılmalı. Yasal gereksinimleri karşılanabilmesi için yarı kritik ve kritik medikal cihazların geri işlenebilmesi evrakla kayıt altına alınıp yetkili denetleyici personeli tarafından onaylanmalı.

Önce dezenfekte et – neden?

Enstrümanların veya medikal cihazların manüel olarak işlenmesi her dental klinik için önemli rolü vardır. Enfeksiyon kapmış enstrümanların temizliği dental personel üzerinde ciddi riskleri ve enfeksiyon kapma olasılığı teşkil eder.

Birim Konsepti

Bölgelere ayırmak hem iş akışı hem de güvenliğini geliştirir:

Kırmızı Bölüm yüksek riskli bölgeleri temsil eder, örneğin enstrümanların tekrar işlendiği yerlerdir.

Sarı Bölüm ise enstrümanların temizlendiği, tekrar dezenfekte edildiği, yıkanıp kurutulduğu ve paketlenildiği ve sterilize edildiği bölümlerdir.

Yeşil Bölüm toz geçirmez steril enstrümanların muhafaza edildiği yerlerdir.

İlgili bölümleri renkli bant ile işaretleyin.

İnsan mı Makine mi?

Temizlik ve dezenfeksiyon cihazları, aynı zamanda termal dezenfeksiyon cihazı olarak da tanımlanır, karmaşık tekrar işleme gereksinimlerinden dolayı çoğu zaman kullanımı tavsiye edilir. Bu tür cihazların kullanımı birçok avantaj sağlar. Kullanımı kolay, güvenli ve insan hatasını önler.

Bu tür ürünlerin yüklü satın alma maliyetleri ve kapladığı alanın verimsizliğinin yanı sıra başka dezavantaj ve endişeleri de vardır:

Isıya duyarlı medikal cihazlar termal dezenfeksiyon cihazlarında tekrar kullanıma kazandırılmaz; sentetik ürünler, ağız aynaları ve benzeri materyaller sınırlı ölçüde tekrar kullanıma kazandırılabilir.

Kesici dönen enstrümanlar manüel olarak tekrar işlenmelidir ki keskinliklerini korusunlar.

Renk ile kodlanmış veya etiket indikatörleri zamanla koyuluğunu yitirerek işlem görmeyebilir.

Çelikten mamul enstrümanların paslanma durumu söz konusu olabilir.

Başlık ve anguldurvalar üniversal tekrar işlenebilme direktiflerine uygun olmadığından bazı durumlarda yetersiz kalıp paslanmalara sebebiyet verebilir. Sık aralıklarda bakım ve onarım yüksek maliyetlerin oluşmasına neden olabilir. Medikal cihazların tekrar işlenmesi konusunda karar verirken açık ve net kriterler veya yönlendirmeler her zaman farklı termal dezenfeksiyon cihazları için uygun olmayabilir. Kullandığınız tekrar işleme prosedürü ne olursa olsun her zaman işlem sonunda enstrüman üzerinde artık kalıp kalmadığını kontrol edin.

Prosedürü anlatan ve aletlerin nasıl kullanılacağını izah eden anlamları açık talimatlar ve dokümantasyonlar dikkat edilerek insan hatasını manüel tekrar kazandırılması sürecinde en aza indirecektir.

Doğru Dezenfektanı seçin

Alkilimin bazı dezenfektanlar enstrümanların manüel olarak tekrar kazandırma prosedürleri için uygundur. Kan veya tükürük gibi organik enfekte ediciler bu tür dezenfektanların lipit-eritme etkisi ve geniş spektrumundan dolayı etki etmez. Buna ilave olarak ta gerekli olan konsantrasyon seviyeleri de oldukça düşüktür

Dezenfektan seçerken hiçbir şeyden özün vermeyin ve işlemi en yüksek standartta elde etmek için kriterlere uyun:

CE işareti satın aldığınız dezenfektanın üzerindeki bilgilerin doğru olduğunu ve Avrupa standartlarına uygun olduğunu garantisidir.

DGHM listelenmiş olması katı bir muayene safhasından geçtiğinin göstergesidir. Dezenfektan **bakterisit, fungusit ve virüsit** olmalı. Kanunen ürün TB'ye karşı etkin olması gereklidir.

İyi temizleme özelliği de seçim için kritiktir. Kuvvetli temizlik ajanları ön yıkama ve sonra yıkama ihtiyacını gerektirmez.

Konsantreler hem maliyet hem de yerden tasarruf etmenizi sağlar.

Alkilimin konsantrelerin etkinliğini artırır ve proteinler ile mücadelede dezenfeksiyon gücü yitirmesini önler.

Aldehit ve fenoller toksiktir! Maalesef bu tür maddeler dezenfektanlarda sık görülmektedir. Be ajanları içeren dezenfektanları kesinlikle kullanmayınız.

Kısa uygulama süreleri korozyonu veya materyal değişikliklerini en aza indirir. Yüksek konsantreli solüsyonlar genelde kısa uygulama süreleri olur çünkü materyallere ve çevreye karşı daha katı ve yıpratıcıdır ve bunun yanı sıra daha pahalıdır. Kesici rotasyon el enstrümanlar için daha hızlı aktifleşen dezenfektanlar tercih edilmelidir.

Bekleme süreleri hazırlanan solüsyonların etkinliği konusunda bilgi vermektedir.

OROCID-MULTISEPT® Plus bu kriterlerin tümünü ihtiva eder ve aldehit, fenoller ve korozyon edici dördü amonyum bileşenler içermez.

Bir başka batırma şekli!

Standart haline getirilmiş manüel dezenfeksiyon prosedürü 7 adımdan oluşmaktadır:

Enstrümanları dikkatlice ızgaralı tepsi üzerine ev içi kullanımı için eldiven kullanarak yerleştirin. Elek üzerine konulacak enstrüman sayısı önemli değildir, önemli olan tüm enstrümanların sıvı içerisine batırılabilmesidir.

Yavaşça eleği dezenfektan banyo kabına yerleştirin, hava kabarcıklarının oluşmamasına dikkat gösterin.

Banyo kabının ağzını kapak ile kapatarak oluşabilecek buharlar ve buğun yayılmasını önleyin.

Kullanma sürelerini kesin uyun. TB patojenleri dezenfektanlara karşı daha dirençlidir!

Bekleme süresi dolduğunda dikkatlice eleği banyodan çıkarın ve musluk altında akan bol su ile durulayın.

Enstrümanları temiz tek kullanılmış havlu ile veya basınçlı hava ile kurulayın. Enstrümanı göz ile inceleyerek artık ve fonksiyonluğunu kontrol edin.

Enfeksiyona sebebiyet verebileceği artıklar varsa tekrar temizleyin. Bu temizleme neticesinde tekrar enfeksiyon kapmış olma riskine karşı tekrar dezenfekte ediniz. Hasarlı veya yeterli bir şekilde temizlenemeyen enstrümanlar kullanılmamalı.

Günlük dezenfektan solüsyonu değiştirilmesini tavsiye ederiz. Hijyenik plana göre hareket edildiğinde hafta 2-3 sefer dezenfektan solüsyonunun yenilenmesi daha gerçekçi ve uygundur. Değiştirme sıklığı genelde dezenfekte edilecek enstrümanların hacmi ve üzerinde birikmiş kirin yoğunluğuna göre değişmektedir. Bulutlanmış veya renk değişmiş solüsyonlar değiştirilmelidir.

Bilinmesi gereken diğer bilgiler.....

Temizlik öncesi kullanılacak alkalın solüsyonlarında BAG numarası veya CE belirleyicileri bulunmalıdır.

Orta Kritik medikal cihazlar çoğu zaman sterilizasyon ihtiyaç duymaz. Daha fazla bilgi için +41(0)44 226 44 44 arayınız.

Kritik medikal cihazların tekrar işlenmesi kesinlikle tavsiye edilen prosedürlere uyulmalı. CJD (Creutzfeldt Jakob Hastalığı) ile enfekte olmuş hastaların tedavisi yapılırken doğru enstrüman tekrar işleme prosedürlerine çok önem taşımaktadır.

OROLIN® Burbath

Yıkama veya Kurutma ihtiyacı duymayan Yıldırım Kadar hızlı frez dezenfektanı.

OROLIN® Burbath kullanıma hazır ve aldehit içermez, dental ve cerrahide kullanılan kesici uçların temizliği ve dezenfeksiyonunda kullanılır, (örn. Kemik kesici, çelik fezler, parlaticılar, monte edilmiş uçlar, lastik tekerlek ve bitirim frezleri) OROLIN® Burbath çok geniş etki alanına sahiptir ve işlevi hızlı yapar. Protein tüketen ajanlar ve çok versatil tensitler sayesinde yüksek temizleme gücüne haizdir. OROLIN® Burbath kolaylıkla doğa ile geri dönüşüm sağlar ve çevreye zarar vermez.

- Bir Dakika içerisinde comple bir işlev tamamlar
- Kuvvetli temizleme gücü
- Geniş etki alanı (tam bir virüs öldürücü)

Kullanımı

Kullanıma hazır olan bu sıvıyı bir küvet veya kabın içerisine dökerek dezenfekte edilecek frezlerin tüm yüzeylerinin sıvı içerisinde olacak şekilde yerleştirip etkisini göstermesi için belirlenen süre boyunca bekletin (etiket üzerindeki belirtilmiş uygulama sürelerine uyunuz). Dezenfeksiyon işlemi tamamlandıktan sonra su ile yıkamayınız. Frezlerin kuruması için bekletin. Dezenfektan sıvısını haftalık veya kullanım sıklığına bağlı olarak daha erken bir süre içerisinde boşaltıp tazeleyiniz. Aliminyum, bakır veya alkole duyarlı materyalden yapılmış frezler ile kullanımı uygun değildir.

Kapsam Alanı ve Uygulama

- Dental ve Cerrahide kullanılan kesici uçların temizliğinde ve dezenfeksiyonunda kullanılır.

- Kemik kesiciler, countersink frezleri, karbid frezler, öğütücüler, bitirim frezleri, pirinç malzemesinde yapılmış frez temizleme fırçaları, sivri uçlu ve cilalamada kullanılan fırçalar, lastik parlatma tekerleri
- Aliminyum, bakır veya alkole duyarlı materyalden yapılmış frezler ile kullanımı uygun değildir.

Materyal Uyumluluğu

► Polietilen	Uyumlu
► Polipropilen	Uyumlu
► Dökme çelik	Uyumlu
► Çelikten mamül emstrumenlar	Uyumlu
► Çelik dental frezler	Uyumlu

Sıkça Sorulan Sorular

► **Ellerimi ne zaman yıkamalıyım?**

Genelde çalışma gününe başlamadan önce, tedavi sürecinde iken göz ile görülebilir bir enfeksiyon var ise, arada mola verildiğinde öncesinde ve sonrasında ve çalışma günü sona erdiğinde.

► **OROLIN® Losyonu güç içerisinde birkaç sefer kullanabilir miyim?**

Evet. OROLIN® Losyonun içerdiği özel seçilmiş cilt koruyucu ajanları cildin nem dengesini korur ve sık yıkamadan ve kurulamadan medya gelen tahrişlere karşı koruyucu vazifesi görür.

► **OROLIN® Losyonu kullandıktan sonra ellerimi nasıl kurulayabilirim?**

Ellerinizi tek kullanımlık havlu yardımı ile kurulayınız.

► **Kalıp sabunların kullanılmamasını duydum. Bu doğrumu?**

Evet. Eller her zaman sıvı sabun ile yıkanmalıdır, kalıp sabun ile değil. Kalıp sabunundaki nem mikro organizmaların üremesi için ideal ortam yaratır. Bunun yanı sıra sabun artıkları alerjiye sebebiyet verebilir.

Paket biçimi ve Aksesuarları

50ml, 1 litre, 5 litre

Dirsek duvar dispanserli (500 ml), Dirsek duvar dispanserli (1 litre)

İçerik (INCI doğrultusunda Komisyon direktifi 2006/257/EEC anlamında)

Aynen yazılacak.

Fiziki Özellikleri

Renk:	Beyaz Sıvı
Koku:	Limon Kokusu
Raf Ömrü:	18 Ay
pH-Değeri:	Nötr

ASEPTOPRINT® Sprey

Dental Ölçü maddeleri için hızlı spreyli dezenfeksiyon

ASEPTOPRINT® Sprey kullanıma hazır Dental ölçü maddeleri ve ölçü kaşıklarının dezenfeksiyonunda kullanılır. Dezenfektanın içeriğinde aldehit olmadığından ölçü maddelerinde renk bozulmalarına sebebiyet vermez ve yüzeyde kan ve proteinin kalıntıları bırakmaz. ASEPTOPRINT® Sprey, ölçü maddesinin veya alçı modellerinin boyutsal dengesini ve stabilitesini etkilemez., en yoğun kontaminasyonda dahi yüksek dezenfekte etkisi gösterir. ASEPTOPRINT® Sprey özellikle K-Silikonlarda daha yüksek verim sağlar ve polisulift, aljinat, ve A Silikonlarında dezenfeksiyonu içinde kullanılabilir. Kolaylık doğaya geri dönüşebilir ve doğa dostudur.

- Kısa bekleme süresi
- Aldehit içermez
- Geniş etki alanı

Kullanımı

Ölçü maddesini ve ölçü kaşığının tamamını ıslatın. Belirtilen bekleme sürelerine uyunuz. Su ile yıkamadan önce yüzeyi nazik bir şekilde siliniz. Alkol ile uyumlu materyallerde kullanınız. Hassas malzemeler üzerinde kullanmadan önce test edip kullanınız.

Kapsam Alanı ve Uygulama

- Dental ölçülerin dezenfeksiyonu ve temizliğinde kullanılır.
- Aljinat, Polieter, polisülf, A-Silikon ve KSilikonların yanı sıra ölçü kaşıkları, ısıрма mumu, ortodonti araçlar, dental laboratuvar enstrümanları ve protez malzemelerinde kullanımı için uygundur.

Materyal Uyumluluğu

► Polieter ölçü maddesi)	Uyumlu
► Polisülfit ölçü maddesi)	Uyumlu
► Aljinat ölçü maddesi)	Uyumlu
► Silikon ölçü maddesi)	Uyumlu
► Polietilen	Uyumlu
► PTFE	Uyumlu
► Polipropilin	Uyumlu
► Silikon Kauçuk	Uyumlu
► Kauçuk	Uyumlu
► PVC	Uyumlu
► Akrilik Cam	Uyumlu
► Çelik	Uyumlu
► Dökme Demir	Uyumlu
► Bakır	Uyumlu
► Pirinç Metali	Uyumlu

Sıkça Sorulan Sorular

► ASEPTOPRINT® Sprey ile ASEPTOPRINT® Likit arasındaki farklar nedir?

ASEPTOPRINT® Sprey kullanıma hazırlanırken ASEPTOPRINT® likit konsantredir.

► ASEPTOPRINT® Likit kullanmadan önce ölçü maddelerini önden temizlemelimi?

Hayır. ASEPTOPRINT® Sprey'in kuvvetli temizleme özelliği sayesinde önden temizliğe gerek yoktur. ASEPTOPRINT® Sprey aldehit içermez.

► ASEPTOPRINT® Sprey'i dental ölçü maddelerine direkt spreyleyebilirmi?

Evet. ASEPTOPRINT® Sprey kullanıma hazır dental ölçü maddelerinin hızlı dezenfeksiyon için kullanılır.

Paket biçimi ve Aksesuarları

1 litre sprey dahil.

Etki Alanı / Kullanım Süresi

Bakterisit/ Fungusit (1)	
(Temiz durumlarda)	30 Saniye
(Kirli durumlarda)	30 Saniye
Tüberklosit (1)	60 Saniye
Mikobakterisit (M.avium)(1)	60 Saniye
Hepatit B / HIV (2)	30 Saniye
Hepatit C (3)	30 Saniye
Papovavirüs (SV 40) (4)	60 Saniye

1) Pratik koşullar altında yapılmış testler dahil Yüzey Dezenfektanları için DGHM Standard metotlarına uyumlu; 2) HBsAg Antijen testi; 3) BVDV taşıyıcı testi; 4) Zarflanmamış virüs

DGHM Standard metotları ve EN 1040, EN 1275 (C. Albicans), uyumlu; DGHM/VAH listelenmiş.

İçerik 100g'de

20 g Etanol, 28 g 1-propanol, 0.056g Kuarteneri Amonyum Karması

Fiziki Özellikleri

Renk:	Şeffaf renksiz Sıvı
Koku:	Alkol
Raf Ömrü:	48 Ay
pH-Değeri:	Nötr

OROCLEAN® Plus

Çeşitli sakşın ünitelerinin temizliği ve dezenfeksiyonunda kullanılır.

OROCLEAN Plus dental aspiratör,